



COLORVUE® PROBES

カラーコードプローブ カラービュー



事 実 -FACT-

インプラント周囲ポケットの測定はインプラントを臨床評価する上でのパラメーターとなります。プロービング値の増大はインプラント周囲病変のサインになります。¹

挑 戦 -CHALLENGE-

インプラント周囲粘膜の付着は天然歯の場合に比べ弱く、コラーゲン繊維の走向が放射状であると言う科学的データを尊重し、注意深くプロービングを行わなければなりません。²

解決法 -SOLUTION-

リサーチによると、インプラント周囲粘膜の付着度合を記録しておくことは、観察・評価する際に役立つとされています。ヒューフレディ社の『カラービュー』は、粘膜の小さな変化も簡単に確認することができます。この高い視認性を持ったレジン製のプローブは、ガラス繊維やグラファイトフィラーが添加されていないので、インプラントの表面性状に影響を及ぼす可能性を低減します。また、『カラービュー』は、柔軟性があり丸みを帯びたチップが特徴のため、患者さんが痛みを感じにくくなっています。

¹ Mombelli, A, Muhle T, Bragger U, Lang NP, Burgin WB 1997 Comparison of periodontal and peri-implant probing by depth-force pattern analysis. Clin Oral Impl Res 8:448-454.

² Gerber JA, Tan WC, Balmer TE, Salvi GE, Lang, NP Bleeding on probing and pocket depth pressure in relation to probing pressure and mucosal health around implants. Clin. Oral Impl. Res. 20, 2009:75-78.

カラービューの特徴

- ・ 鮮やかな黄色のチップと黒色マーキングが口腔内での視認性を向上し、より迅速でより正確な診査が行えます。
- ・ 柔軟性があり丸みを帯びたチップなので患者さんが痛みを感じにくくなっています。
- ・ 太い径のハンドルは人間工学に基づいてデザインされており、最後尾で打診することもできます。



How the best perform

Hu-Friedy

豊富なカラービューの バリエーション

カラーコードプローブ カラービュー

お好みに応じて4種のチップのデザインを選択できます。



カラービュー **11**
(3-6-8-11)
PCV11KIT6
(キット:ハンドル1本 & チップ7入)
8,500円

PCV11PT
(交換チップのみ12入)
12,600円



カラービュー **12**
(3-6-9-12)
PCV12KIT6
(キット:ハンドル1本 & チップ7入)
8,500円

PCV12PT
(交換チップのみ12入)
12,600円



カラービュー
ウィリアムズ
(1-2-3-5-7-8-9-10)
PCVWKIT6
(キット:ハンドル1本 & チップ7入)
8,500円

PCVWPT
(交換チップのみ12入)
12,600円



カラービュー
UNC12
(1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12)
PCVNCIT6
(キット:ハンドル1本 & チップ7入)
8,500円

PCVUNC12PT
(交換チップのみ12入)
12,600円

【製造販売元・製品に関するお問い合わせ先】

ヒューフレディ・ジャパン合同会社 Hu-Friedy.co.jp

〒101-0021 東京都千代田区外神田6-13-10 プロステック秋葉原6F
Tel 03-4550-0660 【受付時間】9:00~17:00(土・日・祝祭日を除く)

【製造元】 Hu-Friedy Mfg. Co., LLC

販売名:カラービュープローブ(一般的名称:歯周ポケットプローブ) 医療機器届出番号:3B3X10195G07103 ●医療機器の分類:一般医療機器(クラスI)
掲載商品の標準価格には消費税等は含まれておりません。標準価格は、2017年11月20日現在のものです。
仕様および外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。記載されている寸法は特定の記載が無い限り作業部の
幅および径、または全長を示した公称値になります。ヒューフレディ社製品は職人の手によって最終仕上げを行っているため、若干の誤差が生じるこ
とがあります。

【商標について】以下はヒューフレディ社の米国特許商標局に登録された商標です: Hu-Friedy, Colorvue
©2017 Hu-Friedy Japan LLC. All rights reserved. HF-110J/1117

