



RUBBER DAM CLAMPS

ラバーダムクランプ

ラバーダムクランプとは？

根管治療やコンポジットレジン充填時に、使用するリーマーやファイルが唾液に触れたり、薬液が粘膜に接触しないようにしたり、その部位に集中できるように該当歯を孤立させる際に使用します。ラバーダムパンチを用いてラバーダムシートを穿孔し、そこにラバーダムフォーセップスでラバーダムクランプを挿入して該当歯に装着します。その後ラバーダムシートをラバーダムフレームに固定して処置中の操作性を確保します。

ヒューフレディ社のラバーダムクランプは…

該当歯の大きさおよび部位により選択します。上下顎または左右側で使用できるものや、上顎のみや下顎のみなどの片顎で対応するものもあります。歯頸部で確実に固定されるように、3段階にわたる焼成温度管理により柔軟な弾力性を有しています。また、ウィングと呼ばれる翼状の部分の有無でも選択することができます。

翼ありでは翼の部分でラバーダムシートを確実に抑え込むことができ、クランプ装着を容易に行えます。翼なしではより視野の確保が明確になります。

表面はサテンスチールと呼ばれるマットな仕上げになっており、デンタルユニットのライト点灯下でも反射を軽減し、眩し過ぎることなく処置が行えます。



クランプフォーセップ

クランプフォーセップ

〈全長約17cm〉
軽量タイプ、また、マット加工のためライトの反射を軽減します。

RDF
¥17,300



クランプフォーセップ 4

〈全長約17.5cm〉
SSホワイトデザインと呼ばれており、先端部は非常に細くなっていて視野を確保しクランプを把持しやすくなっています。

RDF4
¥23,100



How the best perform

Hu-Friedy

ラバーダムパンチ

ラバーダムパンチ

〈全長約16cm〉
マット加工のためライトの反射を軽減します。

RDP
¥38,600



ラバーダムパンチ アインスワース

〈全長約17.5cm〉
アインスワースパンチと呼ばれており、穿孔させる穴の大きさを下顎前歯、上顎前歯、犬歯・小臼歯、上顎大臼歯、下顎大臼歯の5段階から選ぶことができます。高品質なステンレススチールを使用しており、耐久性に優れています。


RDPA
¥36,200



ラバーダムクランプ マット仕上げ

前歯用 212


上下顎前歯に使用します。翼なしのタイプで、顎堤の頬舌の幅が狭い症例にも適用します。顎堤の幅が広い場合には、RDCM212SAがあります。

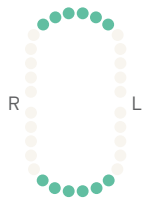

RDCM212
¥2,100

小臼歯用 2A


上下小臼歯に使用します。翼ありのフラットタイプで、確実にラバーダムシートを固定します。歯牙に対してより強固にロックさせる場合には、RDCM2ASがあります。

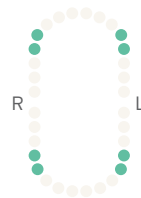


RDCM2A
¥2,100

大臼歯用 14A

上下顎大臼歯に使用します。翼ありの大型タイプで、大臼歯でも確実にロックできます。歯牙のサイズがもう少し小さい場合には、RDCM14があります。

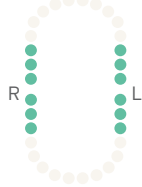

RDCM14A
¥2,100

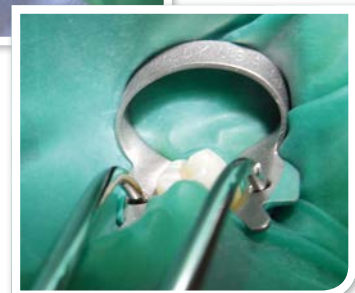

【製造販売元・製品に関するお問い合わせ先】

ヒューフレディ・ジャパン合同会社 Hu-Friedy.co.jp

〒101-0021 東京都千代田区外神田6-13-10 プロステック秋葉原6F
Tel 03-4550-0660 【受付時間】9:00~17:00(土・日・祝祭日を除く)

【製造元】Hu-Friedy Mfg. Co., LLC

販売名:ラバーダムパンチ(一般名称:歯科用ラバーダムパンチ)医療機器届出番号:1383X10195G50101 販売名:クランプフォーセップ(一般名称:歯科用ラバーダムクランプ)医療機器届出番号:1383X10195G49101 販売名:ラバーダムクランプ(一般名称:歯科用ラバーダムクランプ)医療機器届出番号:1383X10195G18101

●医療機器の分類:一般医療機器(クラスI) 掲載商品の標準価格には消費税等は含まれておりません。標準価格は、2020年02月01日現在のものです。仕様および外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。記載されている寸法は特定の記載が無い限り作業部の幅および径、または全長を示した公称値となります。ヒューフレディ社製品は職人の手によって最終仕上げを行っているため、若干の誤差が生じることがあります。

【商標について】以下はヒューフレディ社の米国特許商標局に登録された商標です: Hu-Friedy

©2020 Hu-Friedy Japan LLC. All rights reserved. HF-038/J/0220

Hu-Friedy