



LET'S TRY HU-FRIEDY INSTRUMENTS

根分岐部病変にチャレンジしてみよう!

その1

ファイルスケーラー ダイヤモンドテック

ダイヤモンドテックファイルスケーラーは、**根分岐部や歯根の凹凸**に適したサイズと形状です。

360°ダイヤモンドダストコーティングされているため、**ストロークの方向を考えずに使用**できます。

また、直径11mmの両頭ハンドルは人間工学的にも優れているので、歯科の専門家の皆様に効率よくご利用いただけます。



根分岐部用
ネイバース



近遠心用



☆ひとことメモ☆

ダイヤモンドテック・ネイバースは、根分岐部用プローブ、ネイバースと同じ形状で、簡単に分岐部にアクセスが可能です。

SDCN7
¥10,200



☆ひとことメモ☆

近遠心用は、隅角部や下顎の分岐部間が狭窄しているケースにも使用可能です。

SDCM/D7
¥10,200



Let's TRY!!! 試してみよう! ①

さまざまな方向にストロークして、
根分岐部のスケーリングを
行ってみてください。

ウラも
見てネ




シクルスケーラーのマスクット
NEVIくん
ネビィ

How the best perform

その2

ディブライメントキュレット

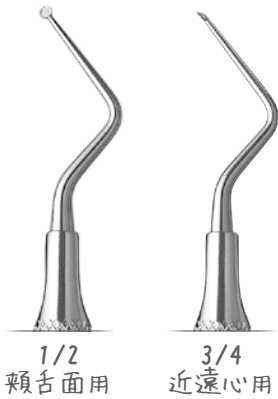

SOH1/2
¥5,300

SOH3/4
¥5,300



スプーン型の刃全体にカッティングエッジが付与されているので縦横斜めすべての方向へのプッシュまたはフルストロークができます。

☆ひとことメモ☆

ディブライメントキュレットとは…
スケーリングやルートプレーニング後の仕上げに使用するキュレットです。
軽いタッチでディブライメント。
取り残しをきれいに除去できます!

Let's TRY!!! 試してみよう! ②

2つのキュレットのどちらの面をどの部位に使用するか確認してみてください。

もしグレイシーキュレットで根分岐部の処理を行うなら……

シャンクが細く、狭い隙間にスムーズにアクセスできる
マイクロミニファイブがおススメです!
硬めのシャンクでピンポイントに歯石除去が可能です。



遠心根の
近心面

近心根の
遠心面

リジッドシャンク

SMS11/129E2
近心面用キュレット
SMS11/129E2
¥5,800

SMS13/149E2
遠心面用キュレット
SMS13/149E2
¥5,800

☆ひとことメモ☆

シャンクは通常のグレイシーより3mm長く、ブレードは半分の長さ、70%の厚さ。
臼歯部の複雑な歯根の形態や、根分岐部・歯根の凹みに適しています。超音波スケラ等、パワースケラ使用後の取り残しにも有効です。

Let's TRY!!! 試してみよう! ③

実際にシャンクの細さや硬さを分岐部に当てて確認してみてください。



【製造販売元・製品に関するお問い合わせ先】

ヒューフレディ・ジャパン合同会社 Hu-Friedy.co.jp

〒101-0021 東京都千代田区外神田6-13-10 プロステップ秋葉原6F
Tel 03-4550-0660 【受付時間】9:00~17:00(土・日・祝祭日を除く)

【製造元】Hu-Friedy Mfg. Co., LLC

販売名: グレイシーキュレット (一般名称: 歯周用キュレット) 医療機器届出番号: 1383X10195G0101、販売名: ファイルスケラ (一般名称: 歯科用スケラ) 医療機器届出番号: 1383X10195G02102、販売名: ディブライメントキュレット (一般名称: 歯科用キュレット) 医療機器届出番号: 1383X10195G06104 ●医療機器の種類: 一般医療機器(クラスI)
掲載商品の標準価格には消費税等は含まれておりません。標準価格は、2018年7月15日現在のものです。仕様および外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。
記載されている寸法は特定の記載が無い限り作業部の幅および径、または全長を示した公称値になります。ヒューフレディ社製品は職人の手によって最終仕上げを行っているため、若干の誤差が生じることがあります。【商標について】以下はヒューフレディ社の米国特許商標局に登録された商標です。HU-FRIEDY © 2018 Hu-Friedy Japan LLC. All rights reserved. HF-089.J/0718

