

# LUXATING HYBRIDS

## ルクセーティング ハイブリッド



### 臨床的現実 -FACT-

抜歯の際に不適切なインスツルメントを選択すると、想定外の結果や患者さんの不快感を生み出す原因になり得ます。

### 対応策 -CHALLENGE-

歯牙や破折した歯根を頬側歯槽骨への損傷なく抜去するためには、正しいインスツルメント選択をする必要があります。

### 具体的解決法 -SOLUTION-

歯科医師が頬側板を維持しつつ低侵襲な状態で抜歯をするために、ルクセーティング ハイブリッドは薄く適正な角度に屈曲した作業部を持つ製品です。


太くて軽いサテンスチールハンドルは把持しやすく、繊細な手技をコントロールできます



### ルクセーティング ハイブリッドの特徴

- 薄い先端作業部により、歯根尖端及び隣接歯間部へのアクセスが容易になりました。
- 先端形状には7種のバリエーションがあり、口腔内で適用部位が明確化します。
- 鋭く磨き上げられたカッピングエッジは歯周靭帯を容易に切断できます。
- 高品質の外科処置器材用ステンレススチールを使用し手作業で仕上げられており、器具の寿命が長く、耐腐食性にも優れています。


ルクセーティング ハイブリッドのラインナップは裏面でご紹介しています

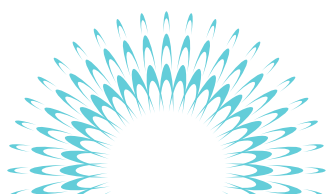

How the best perform

**Hu-Friedy**

## ルクセーティングハイブリッド

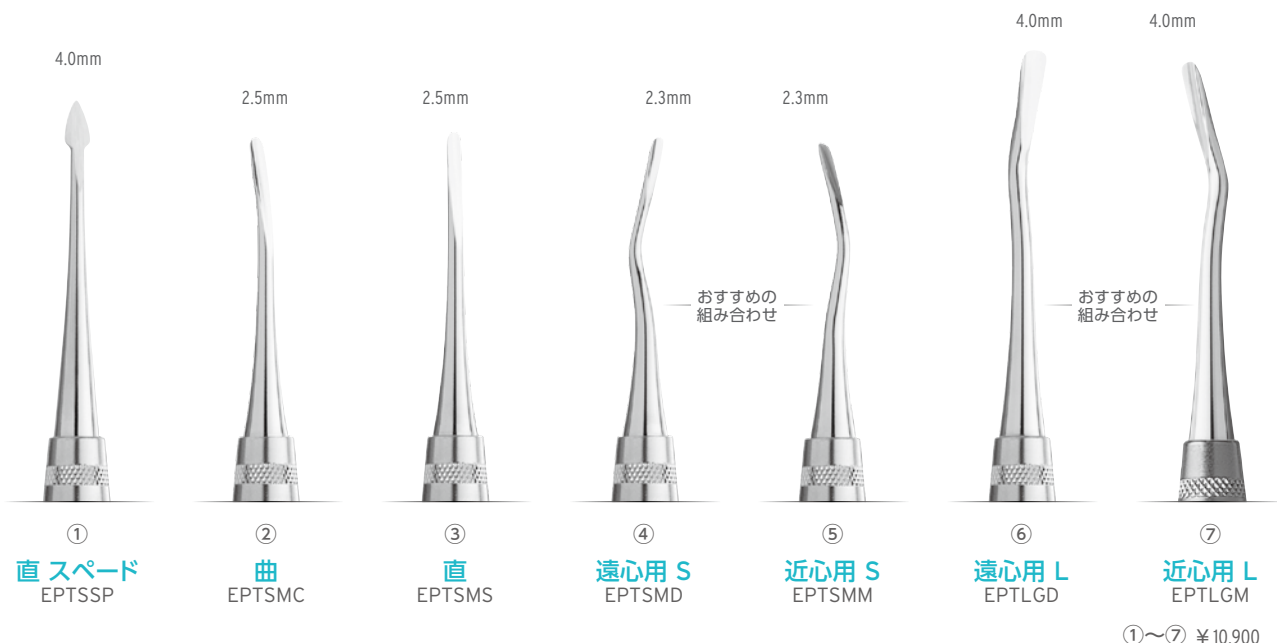

⑧ キット  
EPTKIT  
¥72,000

【キット内容】

- ①～⑦×各①本
- セラミックストーン 円筒型 (SSKC)×1本
- IMSカセット シグネチャー 8本用 レッド (IM5080)×1個



ルクセーティングハイブリッドは歯周靭帯を切断するための薄くて鋭いブレードが付与されています。ブレードのエッジを保つため、定期的なメンテナンスを行ってください。

【シャープニング方法】インスツルメントを機の縁など動かない場所に固定させます。キットに付属されているセラミックストーンのような円筒型の砥石を、ルクセーティングハイブリッドの作業部に沿わせ、ハンドルの方向へストーンを動かしてシャープニングを行います。

	商品コード	商品名	標準価格	数量	
注文書	①	EPTSSP	ルクセーティングハイブリッド 直 スペード (#6 サテンスチール)	10,900円	
	②	EPTSMC	ルクセーティングハイブリッド 曲 (#6 サテンスチール)	10,900円	
	③	EPTSMS	ルクセーティングハイブリッド 直 (#6 サテンスチール)	10,900円	
	④	EPTSMD	ルクセーティングハイブリッド 遠心用 S (#6 サテンスチール)	10,900円	
	⑤	EPTSMM	ルクセーティングハイブリッド 近心用 S (#6 サテンスチール)	10,900円	
	⑥	EPTLGD	ルクセーティングハイブリッド 遠心用 L (#6 サテンスチール)	10,900円	
	⑦	EPTLGM	ルクセーティングハイブリッド 近心用 L (#6 サテンスチール)	10,900円	
	⑧	EPTKIT	ルクセーティングハイブリッド キット	72,000円	

【歯科商店名】

【製造販売元・製品に関するお問い合わせ先】

ヒューフレディ・ジャパン合同会社

〒101-0021 東京都千代田区外神田6-13-10 プロステック秋葉原6F

Tel 03-4550-0660 【受付時間】9:00～17:00(土・日・祝祭日を除く)

【製造元】 Hu-Friedy Mfg. Co., LLC

掲載商品の標準価格には消費税等は含まれておりません。標準価格は、2017年10月21日現在のものです。仕様および外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。記載されている寸法は特定の記載が無い限り作業部の幅および径、または全長を示した公称値になります。ヒューフレディ社製品は職人の手によって最終仕上げを行っているため、若干の誤差が生じることがあります。【商標について】以下はヒューフレディ社の米国特許商標局に登録された商標です：Hu-Friedy 販売名：ルクセーティングハイブリッド (一般的な名称：歯科用エレーベータ) 医療機器届出番号：1383X1019503104 ●医療機器の分類：一般医療機器 (クラスI) ©2017 Hu-Friedy Japan LLC. All rights reserved. HF-141J/017