



SIDEKICK® SHARPENER

ハンディシャープナー サイドキック



サイドキック(SIDEKICK®)とは?

スケーラーやキュレットの定期的なシャープニングに使用します。正しいシャープニングを定期的に行うことで、インスツルメントの寿命が長くなります。

※SIDEKICK:口語的表現で、「親友」「仲間」「パートナー」を意味します

- **ハンディサイズのコンパクト・軽量デザインにより、チェアサイドでのシャープニングに対応**
持ち運びに便利なハンディサイズで、診察室のわずかなスペースでシャープニングすることができます。また、チェアサイドで即シャープニングすることができるなど場所を選びません。
- **難しい技術を必要としない、簡単なシャープニング**
インスツルメントの第一シャングを第一シャングガイドに沿わせるだけの簡単操作で、シャープニングが可能です。
- **短期間でシャープニング完了、メンテナンス効率をアップ**
わずかな時間でシャープニングが行えるので、日常的な器具のメンテナンスの効率化を図ります。
- **AC電源不要のコードレス仕様**
単3電池2個で動きます。
- **オートクレーブ滅菌が可能なパーツを採用**
シャープニングストーン、ガイドプレート、ガイドプレートスクリューは取り外すことができ、オートクレーブ滅菌が可能です。



G グレーシーキュレット



S/U シックルスケラー
ユニバーサルキュレット

サイドキックの使用方法

- **インスツルメントに合った溝にブレードをあてる:**
グレイシーキュレットは(G)、シックルスケラーとユニバーサルキュレットは(S/U)の溝にブレードを置きます。
- **第一シャングガイドに沿わせる:**
インスツルメントの第一シャングを第一シャングガイドに沿わせ(これだけで角度が決まります)ブレードの背面を垂直バックストップに当てるようにします。
- **スイッチを入れて簡単シャープニング:**
シャープニング中はブレードの角度は動かさず、インスツルメントを左右に動かすと、砥石をまんべんなく使用することができます。砥石を長持ちさせられます。

実際の動作は...

使用方法
説明ムービーを
チェック!!!



サイドキック シャープニングキット
SDKKIT 60,000円

【付属品】

セラミックストーン1個、プラスチックテストスティック1本、拡大レンズ1個、単3形アルカリ乾電池2本、取扱説明CD-ROM1枚、取扱説明書1冊

【交換用パーツ】

セラミックストーン	SDKSTONEC	3,700円
セラミックストーン 粗目	SDKSTCOARS	3,700円
保持クリップ	SDKCLIP	2,400円
ガイドプレート	SDKGPLATE	2,000円
ガイドプレートスクリュー	SDKGPSCREW	2,400円

【製造販売元・製品に関するお問い合わせ先】

ヒューフレディ・ジャパン合同会社 Hu-Friedy.co.jp

〒101-0021 東京都千代田区外神田6-13-10 プロステップ秋葉原6F
Tel 03-4550-0660 【受付時間】9:00~17:00(土・日・祝祭日を除く)

【製造元】Hu-Friedy Mfg. Co., LLC

掲載商品の標準価格には消費税等は含まれておりません。標準価格は、2017年4月25日現在のものです。仕様および外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。【商標について】以下はヒューフレディ社の米国特許商標局に登録された商標です: Hu-Friedy, SIDEKICK ©2016 Hu-Friedy Japan LLC. All rights reserved. HF-577J0417

How the best perform

Hu-Friedy