



DIAMOND SHARPENING CARDS **NEW!**

ダイヤモンドシャープニングカード

特徴と利点

- 高品質ステンレス鋼に接着された工業用ダイヤモンドの均一なコーティングにより、極めて硬質で平滑な面でのインスツルメントのシャープニングが可能です。
- 3段階の粗さのレベルがあり、通常のマインテナンスから形態修正まで、それぞれのシャープニングに対するニーズに対応できます。
- 表面はくぼみや溝ができにくく耐久性があり、繰り返し使用してもスムーズさを維持します。また、通常の使用において、欠けたり割れたりすることがありません。
- 超音波洗浄器で容易に洗浄でき、高圧蒸気滅菌に対応しています。
- シャープニング時、オイルは不要です。
- 薄いクレジットカードサイズの形状で、診療器材と一緒に滅菌バッグやカセット内に容易に収納できます。

“ 驚くほど簡単に短時間でインスツルメントが研げました!! ”
HOLLY CHILDRESS, RDH

“ ダイヤモンドシャープニングカードは、軽くて把持が簡単! また、シャープニング中ほとんど力を加えずに期待した結果が得られるので大好きです。 ”
MICHELLE WILLIAMSON, RDH

“ ダイヤモンドシャープニングカードは、インスツルメントのブレードに適合させることがとても簡単でした。また、カードは簡単に滅菌できるので、インスツルメントセットと一緒に滅菌バッグに入れられるという点も気に入りました。 ”
KAREN YOUNGERMAN, RDH



How the best perform

Hu-Friedy

ダイヤモンドシャープニングカードの種類

ダイヤモンド
シャープニングカード
超細目

DSCXFINE
6,500円

★ダイヤモンド
シャープニングカード
細目

DSCFINE
6,500円

ダイヤモンド
シャープニングカード
中目

DSCMED
6,500円

ダイヤモンド
シャープニングカード
3セット

DSCSET
17,000円

セット内容：
超細目・細目・中目 各1枚

FAQ

よくある質問

Q: ダイヤモンドシャープニングカードとは何ですか？

A: ヒューフレディ社製のダイヤモンドシャープニングカードは、歯科用インスツルメントのシャープニングにおける新しい選択肢です。高品質なステンレス製カードは、片面に微細な工業用ダイヤモンドがコーティングされているため、非常に硬質で平滑なのにも関わらず、容易にシャープニングを行うことが可能です。

Q: ダイヤモンドシャープニングカードは、様々な種類の粗さで利用可能ですか？

A: ダイヤモンドシャープニングカードは、超細目・細目・中目の3種類があります。中目のカードには、若干大きめのダイヤモンドコーティングが施されており、短時間でシャープニングが出来ます。

Q: どの粗さを選ぶべきですか？

A: 形態修正を必要とするインスツルメントに迅速に鋭いエッジをたてる際には中目を使用、多少ダルになったインスツルメントの日常的メンテナンスには細目を使用し、既にシャープになっているブレードをさらに鋭く・精緻化する際には超細目を使用します。

Q: ダイヤモンドシャープニングカードでインスツルメントのシャープニングを行う際には、どのような種類の潤滑剤が必要ですか？

A: ダイヤモンドシャープニングカードはドライでも使用可能です、水を使用することもできます。潤滑オイルは不要です。

Q: ダイヤモンドシャープニングカードは、どのように清掃すればよいですか？

A: 使用後、ダイヤモンドシャープニングカードを超音波洗浄機に入れて洗浄してください。洗浄後、カードを水ですすぎ、柔らかいブラシで擦れば、カードに残った金属片を落とすことができます。

Q: ダイヤモンドシャープニングカードを滅菌することはできますか？

A: ダイヤモンドシャープニングカードは高圧蒸気滅菌することができます。滅菌器製造者の指示を順守してください。一部に軽度の色落ちや斑点が発生することがありますが、カードの性能に影響することはありません。

Q: すでに所有しているインスツルメントと一緒に滅菌バッグやカセットにダイヤモンドシャープニングカードを入れることはできますか？

A: 滅菌バッグおよびカセットなどに診療器材と一緒にダイヤモンドシャープニングカードを入れることができます。

Q: どのようにダイヤモンドシャープニングカードを使用すればよいですか？

A: 従来のシャープニングストーンを使用する際と同じ手法で、ダイヤモンドシャープニングカードを使用できます。シャープニング方法に疑問がある際は、ヒューフレディ社製『It's About Time スケーラーやキュレットのハンドシャープニングの方法』DVDをご覧ください。YouTube.comのHu-Friedy Japanチャンネルより、『It's About Time スケーラーやキュレットのハンドシャープニングの方法』動画をご覧ください。※ DVDをご所望の場合は、下記の電話番号へお問い合わせください。



YouTube
"It's About Time"

【製造販売元・製品に関するお問い合わせ先】

ヒューフレディ・ジャパン合同会社 Hu-Friedy.co.jp

〒101-0021 東京都千代田区外神田6-13-10 プロステック秋葉原6F
Tel 03-4550-0660 【受付時間】9:00~17:00(土・日・祝祭日を除く)

【製造元】Hu-Friedy Mfg. Co., LLC

●医療機器の分類-一般医療機器(クラスI) 掲載商品の標準価格には消費税等は含まれておりません。標準価格は、2017年4月1日現在のものです。
仕様および外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。
【商標について】以下はヒューフレディ社の米国特許商標局に登録された商標です:HU-FRIEDY
©2017 Hu-Friedy Japan LLC. All rights reserved. HF-593J/0417

Hu-Friedy