



Hu-Friedy

## LINGUAL DEBONDING PLIERS

リンガル ディボンディングプライヤー (678-709)

スプリングの反発力を  
応用して、舌側の矯正用  
ブラケットを最小限の力で  
スムーズに除去

NEW!

リンガル ディボンディングプライヤーは、舌側矯正用ブラケットの  
取り外しに適用です。独特なデザインにより、患者さんの快適性を  
損なうことなく矯正装置を素早くディボンディングできます。  
ヒューフレディ社製のリンガルカッターやプライヤーと併用します。

パートコード	製品名	標準価格
<b>678-709</b>	リンガルディボンディングプライヤー	37,000円
678-700	ディスタルエンドカッター	37,000円
678-701	ピン&リガチャーカッター	37,000円
678-702	ワインガルトプライヤー	34,000円
678-702-90	ワインガルトプライヤー 90°	34,000円
678-703	ブラケットリムービングプライヤー	34,000円
678-704	ハンマーヘッド NiTi プライヤー	34,000円
678-704SER	ハンマーヘッド NiTi プライヤー ギザ付	34,000円
678-705	マッシュプライヤー	34,000円
678-706	リガチャーディレクター	10,000円
678-707	リガチャーディレクターU字型	10,000円

ヒューフレディ社製プライヤーは、イムニティスチール (Immunity Steel®) と呼ばれる合金製です。イムニティスチールはカーボンとクロムをヒューフレディ独自のバランスで混ぜ合わせた外科用ステンレススチールで、強度と耐腐食性を兼ね備えています。



ディボンディングプライヤーの  
一方のフック型アームが  
舌側のブラケット下部に  
届くようにあてます。



もう一方のくさび型アームをブラケットと歯面の  
接着境界に差し込むようにしながら、タイウィングの  
下にアームのフックをひっかけます。プライヤーを握ると、  
くさび型アームが歯牙の舌側面に挿入され、  
ブラケットを剥離します。



YouTubeで  
使用動画を  
ご覧いただけます。

【製造販売元・製品に関するお問い合わせ先】

ヒューフレディ・ジャパン合同会社 **Hu-Friedy.co.jp**

〒101-0021 東京都千代田区外神田6-13-10 プロステック秋葉原6F  
Tel 03-4550-0660 【受付時間】9:00~17:00(土・日・祝祭日を除く)

【製造元】Hu-Friedy Mfg. Co., LLC

■リンガルプライヤー/歯科矯正用プライヤー/1383X10195G12103 ■ディレクター/歯科矯正用結さつ器/1383X10195G35101  
■バンドプッシャー/歯科矯正用バンドプッシャー/1383X10195G29101 ■プライヤー/歯科矯正用プライヤー/1383X10195G12101  
●医療機器の分類-一般医療機器(クラスI) 掲載商品の標準価格には消費税等は含まれておりません。標準価格は、2017年9月21日現在のものです。  
仕様および外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。記載されている寸法は特定の記載が無い限り作業部の幅および径、  
または全長を示した公称値になります。ヒューフレディ社製品は職人の手によって最終仕上げを行っているため、若干の誤差が生じることがあります。  
【商標について】以下はヒューフレディ社の米国特許商標局に登録された商標です：HU-FRIEDY, IMMUNITY STEEL  
©2017 Hu-Friedy Japan LLC. All rights reserved. HF0-1017J/0917

**Hu-Friedy**