



# HU-FRIEDY NEVI® SICKLE SCALER COLLECTION

## シッフルスケーラーNEVI®(ネビィ)の特徴

40年以上のキャリアを持つベテラン職人と口腔解剖学を熟知した臨床家達の手によって共同開発されたシッフルスケーラーシリーズ


—ヒューフレディ社製 シッフルスケーラーNEVI®(ネビィ)

### 作る人と使う人の共同開発

お客さまからのフィードバックとヒューフレディ社に長年伝わる品質・開発力・技術力を駆使して開発されました。


### ユニークなアングルと特徴的なシャングデザイン

4種の特徴的なシャングデザインは快適な使い心地で、手指の疲労を軽減し操作性を向上します。

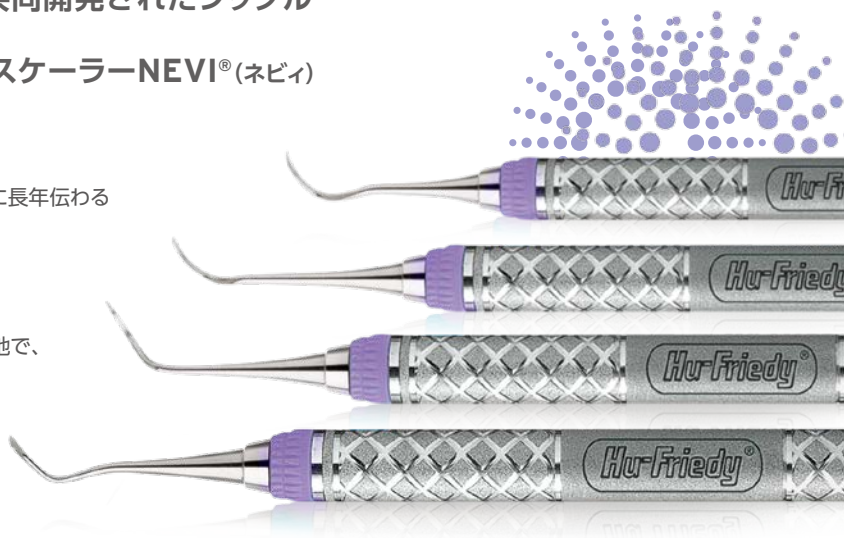

### スケーラー ネビィ 1 前歯用

おすすめ!

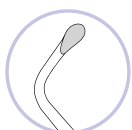


スプーン型ブレード

コンパクトな鎌型とスプーン型の2種のブレードで前歯のステインや歯石を効率よく除去


**SCNEVI19E2**

¥5,800

#### 【NEVI 1スプーン型ブレードのお手軽シャープニング方法】

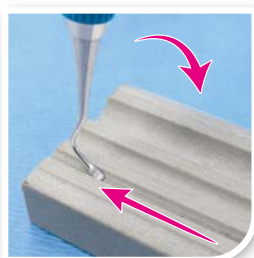

ペイツストーンで、溝に合わせて、ブルストロークでシャープニングします。  
〈コツ〉  
引き終わる時に、45度前方に倒し、先端部分をシャープにします。

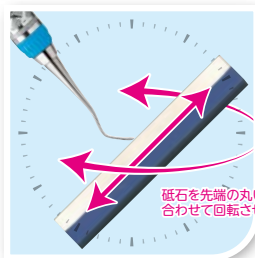

ハンドシャープニングの場合は、グレーシーやユニバーサル先端を研ぐ方法と同じく、先端を3時(右側)に向けて、砥石を1時~2時の位置(45°)に合わせて、丸みに合わせて砥石を回しながらストロークを行います。



舌側中央部にも当てやすくなっています。

喫煙される患者さんや色素が沈着しやすい方等に最適のスケーラーです! 医院に1本は必需品です。

How the best perform



## スケーラー ネビィ 2 白歯用



大きな屈曲と長めのブレードで、取り残しができやすい最後臼歯遠心面や歯間部へのアクセスが容易

**SCNEVI29E2**

¥5,800

## スケーラー ネビィ 3 白歯用

おすすめ!



日本人の歯牙に合わせたコンパクトで細いブレードは狭小な歯間部に適用。緩やかな屈曲がついているので、特に臼歯部のスケーリング向き。

**SCNEVI39E2**

¥5,800

## スケーラー ネビィ 4 白歯用



NEVIシリーズで最大サイズ且つリジッドタイプのブレード。長めのブレードは歯冠形態に沿わせながら、遠心面・近心面へ到達します。最後臼歯遠心面の強固な歯石除去にも適用。

**SCNEVI49E2**

¥5,800

【製造販売元・製品に関するお問い合わせ先】

ヒューフレディ・ジャパン合同会社 [Hu-Friedy.co.jp](http://Hu-Friedy.co.jp)

〒101-0021 東京都千代田区外神田6-13-10 プロステック秋葉原6F  
Tel 03-4550-0660 【受付時間】9:00~17:00(土・日・祝祭日を除く)

【製造元】 Hu-Friedy Mfg. Co., LLC

販売名:スケーラー(一般的名称:歯科用スケーラー)医療機器届出番号:1383X10195G02101 ●医療機器の分類:一般医療機器(クラスI)  
掲載商品の標準価格には消費税等は含まれておりません。標準価格は、2017年11月7日現在のものです。仕様および外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。

【商標について】以下はヒューフレディ社の米国特許商標局に登録された商標です:HU-FRIEDY, NEVI

©2017 Hu-Friedy Japan LLC. All rights reserved. HF-086/J/1117

**Hu-Friedy**