

ENZYMAX™

酵素系洗浄剤 エンザイマックス



Infection Prevention and Instrument Management



液 ボトルタイプ 3,800ml

粉

粉 個別包装タイプ



3.8ℓの水にポンと入れるだけ！
簡単に希釈液が作れます。

酵素系洗浄剤

エンザイマックスとは…

- **蛋白質分解酵素と澱粉質分解酵素の配合**で、器具、白衣に付着した血液・唾液・澱粉を効果的に落とせます。
- キレート剤が水に溶けている金属イオンを取り込み、器具の金属表面をマスキングして**表面腐蝕やヒンジの動作不良を防ぐ**ため、器具表面が新品同様の輝きを持続させます。
- 超音波洗浄器、浸漬両方に使用可能です。
- **pH値は6.5-8.5と中性**、ステンレス製器具に優しい洗浄剤です。

【使用方法】

- 洗浄方法に合った割合で希釈して使用します。
- 32℃～60℃の湯水を使うと一層効果が上がります。
- 洗浄後は、水で十分洗い流します。

【超音波洗浄器】

- ・洗浄時間は、各超音波洗浄器が推奨する時間を守ってください。
- ・水洗い後は必ず乾燥させてから滅菌してください。

【器具の浸漬(予備洗浄)】

- ・洗浄する器具などを3～5分間浸漬します。
- ・15分以上浸漬しないでください。

【衣服の浸漬】

- ・洗浄する衣服を10分間浸漬し、その後普通に洗濯してください。

【希釈の割合】

	液 ボトルタイプ (1プッシュ=30cc)	粉 個別包装タイプ (1個=14g)
超音波洗浄器		
器具の浸漬(予備洗浄)	1プッシュにつき3.8ℓ	1個につき3.8ℓ
衣服の浸漬	2プッシュにつき3.8ℓ	1～2個につき3.8ℓ

※炭素鋼、タンブステンカーバイド鋼は5分以上漬けないでください。
※エンザイマックスは中性で器具に安全ですが、規定の時間以上の浸漬を行いますと、器具の腐蝕の原因となりますので必ず規定の時間を守ってください。

エンザイマックス バリエーション

液 3800ml ボトルタイプ **IMS-1226** 15,600円
合計で485ℓの希釈された洗浄液が作れます

ボトルポンプ 3800ml用 **IMS-1226P** 800円
1プッシュで3.8ℓの希釈液が作れます
※エンザイマックス 液 ボトルタイプをご購入の際は
ボトル用ポンプも同時購入いただくと便利にお使いいただけます

粉 800g **IMS-1230** 8,200円
合計で189ℓの希釈された洗浄液が作れます

粉 32包 個別包装タイプ **IMS-1232** 8,600円
合計で121ℓの希釈された洗浄液が作れます


スプレージェル

709ml 450回分

IMS-1229

2,800円

使用後のインスツルメントにスプレーする
プレクリーナー。腐食防止剤を含む2種類の
酵素を配合したジェルです。
洗浄前の汚染物がインスツルメントに
固着しないよう湿潤状態を保ち、血液や組織片、
その他の付着物の溶解に役立ちます。
布製品に付着した染み抜き用にも使えます。

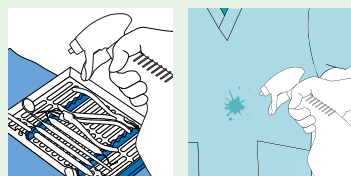

IMS™ LILAC UTILITY GLOVES

ニトリルユーティリティグローブ



Infection Prevention and Instrument Management



器材処理用グローブ

ニトリル ユーティリティグローブとは…


- 裏地付でラテックスフリー
- ラテックス製のグローブと比較して薬品への耐性が強い
- 針刺しに強い*
- 手指への感覚が伝わりやすい形状でスリップ防止グリップ付
- 最大5回までオートクレーブ可能! ※耐熱温度121℃
メンテナンスとして週1回のオートクレーブを推奨

手袋に求められる安全性の基準となるヨーロッパ規格に適合!

※ニトリル ユーティリティグローブは、保護用品に関する European Directive 89/686/EECの要求事項、さらに保護用グローブに関する European standards EN420、EN374、EN388に適合しています。詳細はグローブに同封の説明書をご覧ください。

ヒューフレディ社製ニトリルユーティリティグローブは、アメリカ疾病対策予防センター(CDC)が推奨するグローブに適合しています。器具の洗浄や血液・その他の感染の可能性がある物質または化学物質との接触を伴う器材処理を実行する場合は、耐穿刺・耐薬品のユーティリティグローブの使用が、安全性の向上につながります!

【サイズの確認方法】

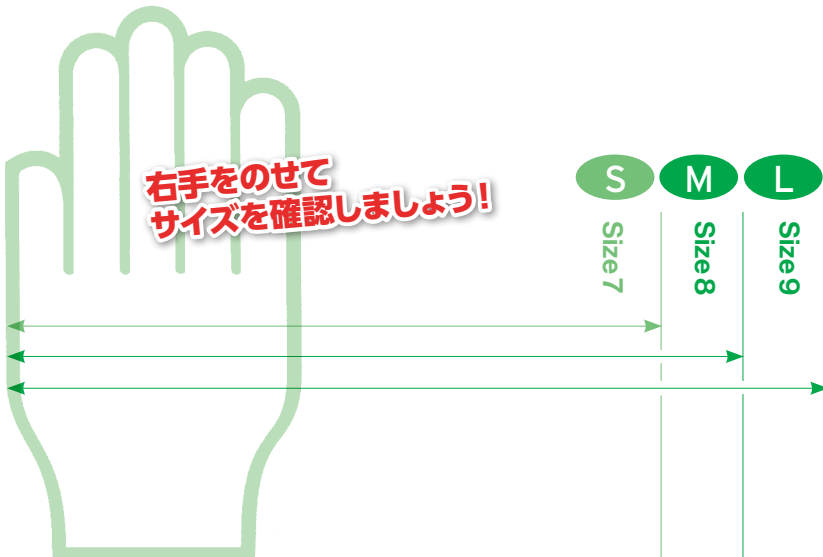

Sサイズ (3組入) **40-060** 2,800 円

Mサイズ (3組入) **40-062** 2,800 円

Lサイズ (3組入) **40-064** 2,800 円

【製造販売元・製品に関するお問い合わせ先】

ヒューフレディ・ジャパン合同会社 Hu-Friedy.co.jp

〒101-0021 東京都千代田区外神田6-13-10 プロステック秋葉原6F

Tel 03-4550-0660 【受付時間】9:00~17:00(土・日・祝祭日を除く)

【製造元】 **Hu-Friedy Mfg. Co., LLC**

掲載商品の標準価格には消費税等は含まれておりません。標準価格は、2023年2月1日現在のものです。仕様および外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。記載されている寸法は特定の記載が無い限り作業部の幅および径、または全長を示した公称値になります。ヒューフレディ社製品は職人の手によって最終仕上げを行っているため、若干の誤差が生じることがあります。【商標について】 以下はヒューフレディ社またはその関連会社の商標です: Hu-Friedy, Enzymax, IMS ©2023 Hu-Friedy Japan LLC. All rights reserved. HF-182J/2302

HuFriedyGroup
The Best In Practice