

SLIM Luxating Elevators

ルクセーティングエレベーター スリム



Instrumentation and
Procedural Products

2mm幅

13%スリム*



ELSLIM2SSX

3mm幅

20%スリム*




ELSLIM3CSX

※通常のルクセーティング
エレベーターとの比較

特 徴

- 13~20%スリム*な作業部!
- 歯槽骨に沿わせながら歯周靭帯を切断することにより低侵襲なエクストを実現
- 視認性の良いブラックラインコーティング

→ **周囲組織の温存が求められる症例に特に有用!**

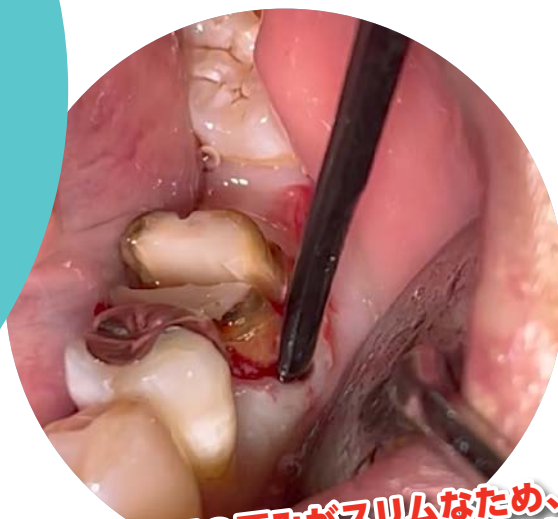

作業部の厚みがスリムなため、歯根膜腔に沿わせるような角度で容易に挿入可能!

臨床動画

ルクセーティングエレベーター「スリム」を用いて臨在歯・骨への負担が低減された「6」の抜歯



①バーで歯根分割を行い、ルクセーティングエレベーター「スリム」を回転させながら歯周靭帯を切断し歯根に沿って垂直方面に進める



②楔作用を利用しある程度進んだら再度回転させながら歯周靭帯の切断を繰り返し歯牙を脱臼



③鉗子を用いて愛護的に抜去

YouTube



この症例の動画はこちらから
ご覧いただけます

SLIM Luxating Elevators

ルクセーティングエレベーター スリム



ラインナップ



スリム 2C ショート

2 mm 曲

ブラックライン

ELSLIM2CSX



スリム 2S ショート

2 mm 直

ブラックライン

ELSLIM2SSX



スリム 3C ショート

3 mm 曲

ブラックライン

ELSLIM3CSX



スリム 3S ショート

3 mm 直

ブラックライン

ELSLIM3SSX

	商品コード	商品名	先端幅	先端仕様	標準価格(税別)	数量
注 文 書	ELSLIM2CSX	ルクセーティングエレベーター スリム 2C ショート BL	2mm	曲	9,800円	
	ELSLIM2SSX	ルクセーティングエレベーター スリム 2S ショート BL	2mm	直	9,800円	
	ELSLIM3CSX	ルクセーティングエレベーター スリム 3C ショート BL	3mm	曲	9,800円	
	ELSLIM3SSX	ルクセーティングエレベーター スリム 3S ショート BL	3mm	直	9,800円	

ヒューフレディ オフィシャルSNSでは
様々な情報を発信しております。

Instagram



Facebook



YouTube



LINE



【製造販売元・製品に関するお問い合わせ先】

ヒューフレディ・ジャパン合同会社 Hu-Friedy.co.jp

〒101-0021 東京都千代田区外神田6-13-10 プロステック秋葉原6F

Tel 03-4550-0660 【受付時間】9:00~17:00(土・日・祝祭日を除く)

【製造元】 **Hu-Friedy Mfg. Co., LLC**

掲載商品の標準価格には消費税等は含まれておりません。標準価格は、2024年3月21日現在のものです。
仕様および外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。記載されている寸法は特定の記載が無い限り作業部の幅および径、または全長を示した公称値になります。ヒューフレディ社製品は職人の手によって最終仕上げを行っているため、若干の誤差が生じることがあります。【商標について】以下はヒューフレディ社の米国特許商標局に登録された商標です：Hu-Friedy 販売名：ルクセーティングエレベーター（一般的名称：歯科用エレベーター）医療機器届出番号：13B3X10195G03103 ●医療機器の分類：一般医療機器（クラスI） ©2024 Hu-Friedy Japan LLC. All rights reserved. HFL-577J/2403

HuFriedyGroup
The Best In Practice