

検査 Diagnostic

ハンドルの種類	C03
カラービュー プローブ	C04
プローブ	C06
エクスプローラー (探針)	C10
エクスプロ	C13
ミラートップ	C14
ミラーハンドル	C16
ピンセット	C17

デュラスポンド (Duraspond™) エクスプローラー

工夫を重ねた正確さ



このエクスプローラーは、「デュラスポンド」の優れた能力を示すため、
屈曲させ巻きつけています。

-Fact- エクスプローラーとは

エクスプローラーは、齲蝕や歯石の探知、歯周ポケット内や根分岐部、修復部の診査に使用します。インストゥルメントセットに、不可欠なものです。

-Challenge- ヒューフレディ社の挑戦

定期診査にあたり、患者さんの状態を正確に診断してカルテに記載するためには、信頼できる精度と弾力性を持ったエクスプローラーを使用し、正確な検査結果を得る必要があります。

キューリックス (Qulix™) カラーコードプローブ

キューリックス (Qulix™) プローブは、黒いマーキングで色別されています。マーキングは、正確で平滑な仕上げが施されているため、欠けたり、剥がれたり、色褪せることはありません。





Handles

ハンドルの種類

【手根管症候群の予防】

インスツルメント使用時のストレスを軽減させる方法の一つとして、神経科医は、異なるサイズのハンドルを使い分けることを推奨しています。例えば、太めのハンドル（#6、#7ハンドル）は、比較的軽い力でインスツルメントを把持できます。多様なサイズのハンドルを組み合わせることで、手根管症候群の発症および重症化を防ぐことができます。

出典:

L・J・ガーワトスキー、D・B・マクフォール、D・スタック：
歯科衛生士のための手根管症候群予防法、歯科衛生学会誌、1992年2月

■ 両 頭

#7 サテンスチールカラー



軽い力で把持することができる太めのハンドル。シリコン製の黒いグリップ付

#6 サテンスチール



軽い力で把持することができる太めのハンドル。

#31 細 丸



従来からの細ハンドル。

■ 片 頭

#7 サテンスチールカラー



軽い力で把持することができる太めのハンドル。シリコン製の黒いグリップ付

#6 サテンスチール



軽い力で把持することができる太めのハンドル。

#30 細 丸



従来からの細ハンドル。

Colorvue™ Probes

カラービュープローブ

カラービュー (Colorvue™) は、口腔内で識別が容易なように、鮮やかな黄色いチップに黒いマークがついています。先端部は、柔軟性がありラウンド型なので、歯肉にやさしい操作ができます。インプラントにも安全でネジ式のため、カラーコードが摩耗した場合のチップ交換も簡単です。
※交換型チップは最大30回まで滅菌可能です。



カラービュー (COLORVUE™) のマーキングは鮮やかなので、歯肉と露出した根面との判別が容易です。歯周ポケットの深さや歯肉退縮量の読み取りが簡単です。



カラービューは、インプラント周囲粘膜の検査・評価に役立ちます。※

■ カラービュープローブ



● 11				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	仕様	取寄品
PCV11KIT6	8,900円	#6	Sキット (ハンドル1本、[チップ]7入)	
PCV11PT	13,000円		交換チップ (12入)	



● 12				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	仕様	取寄品
PCV12KIT6	8,900円	#6	Sキット (ハンドル1本、[チップ]7入)	
PCV12PT	13,000円		交換チップ (12入)	



● UNC University of North Carolina				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	仕様	取寄品
PCVNCKIT6	8,900円	#6	Sキット (ハンドル1本、[チップ]7入)	
PCVUNC12PT	13,000円		交換チップ (12入)	



● ウィリアムズ Williams				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	仕様	取寄品
PCVWKIT6	8,900円	#6	Sキット (ハンドル1本、[チップ]7入)	
PCVWPT	13,000円		交換チップ (12入)	



● カラービュー用ハンドル Colorvue Probe Handle				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
PH6	2,300円	#6	サテンスチール	

カラービュープローブ専用ハンドルのため、ミラーやインプラケアとの互換性はありません。

※©Montage Media 2005. 出典:M・レスマン:インプラントのメンテナンスに関するホワイトペーパー。Hu-Friedy Mfg. Co., LLC. 2010年9月

ハンドルの種類 (片頭)



#6 サテンスチール



■ カラービュープローブ バイオタイプ

カラービュープローブ『バイオタイプ(Biotype)』は、歯肉溝にプローブを30g未満の圧力で挿入し、プローブの先端が歯肉から透けて見えるまで歯肉のフェノタイプを容易に判定できるインストルメントです。

掲載画像 PBTPKIT12



バイオタイプ スターターキット				Biotype Starter Kit	
パートコード	標準価格	ハンドル番号	仕様	取寄品	
PBTPKIT12	14,500円		交換チップ(ブルー×4本、グリーン×4本、ホワイト×4本)、ハンドル×3本		



バイオタイプ ホワイト			White	
パートコード	標準価格	取寄品		
PBTPW	13,000円	☺		

交換チップ(12入)



バイオタイプ グリーン			Green	
パートコード	標準価格	取寄品		
PBTPG	13,000円	☺		


交換チップ(12入)



バイオタイプ ブルー			Blue	
パートコード	標準価格	取寄品		
PBTPB	13,000円	☺		


交換チップ(12入)

1.

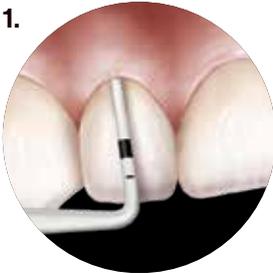


先端部が白色の1番プローブを歯肉溝に挿入
歯肉溝内で、白色が透けて見える
→『薄い』フェノタイプ
(白色が透けて見えない場合→2へ)

2.

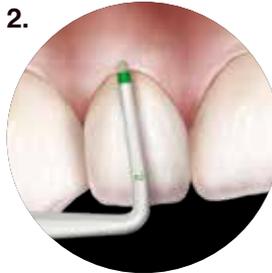

先端部が緑色の2番プローブを歯肉溝に挿入
歯肉溝内で、緑色が透けて見える
→『中濃度』フェノタイプ
(緑色が透けて見えない場合→3へ)

3.

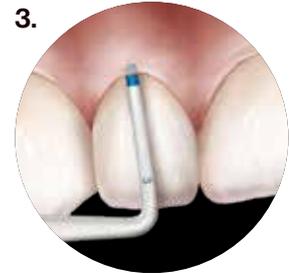

先端部が青色の3番プローブを歯肉溝に挿入
歯肉溝内で、青色が透けて見える
→『厚い』フェノタイプ
歯肉溝内で、青色が透けて見えない
→『非常に厚い』フェノタイプ

■ カラービュープローブ ペリオスクリーン

カラービュープローブ『ペリオスクリーン(PerioScreen™)』は、細かなプロービングを行う前に歯周ポケットの深さを手早く簡単に診査することが可能です。ユニバーサルな緑と赤のカラーコードは、歯周疾患の進行度を表しています。

掲載画像 PPS10KIT6



10					
パートコード	標準価格	ハンドル番号	仕様	取寄品	
PPS10KIT6	8,900円	#6	Sキット(ハンドル1本、[チップ]7入)		☺
PPS10PT	13,000円		交換チップ(12入)		☺

掲載画像 PPS12KIT6




12					
パートコード	標準価格	ハンドル番号	仕様	取寄品	
PPS12KIT6	8,900円	#6	Sキット(ハンドル1本、[チップ]7入)		☺
PPS12PT	13,000円		交換チップ(12入)		☺

ハンドルの種類(片頭)



#6 サテンスチール

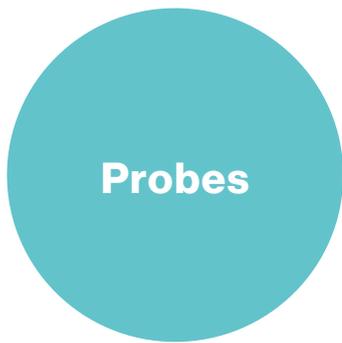

プローブ

Probes

■ カラーコードプローブ

カラーコードプローブは、キューリックス (Qulix™) と呼ばれる黒いマーキングで色別されています。この黒色部分は、通常の使用において、はがれたり薄くなったりすることはありません。



掲載画像 PCP26

CP2				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
PCP26	4,400円	#6	サテンスチール	
PCP2	4,200円	#30	細丸	



掲載画像 PCP86

CP8				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
PCP86	4,400円	#6	サテンスチール	
PCP8	4,200円	#30	細丸	

CP11と比較して最初の屈曲までの長さが5mm短いタイプ



掲載画像 PCP106

CP10				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
PCP107	4,600円	#7	サテンスチールカラー	🕒
PCP106	4,400円	#6	サテンスチール	
PCP10	4,200円	#30	細丸	



掲載画像 PCP116

● CP11				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
PCP117	4,600円	#7	サテンスチールカラー	
PCP116	4,400円	#6	サテンスチール	
PCP11	4,200円	#30	細丸	

基本の3-3-2-3のプローブ



掲載画像 PCP126

● CP12				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
PCP127	4,600円	#7	サテンスチールカラー	
PCP126	4,400円	#6	サテンスチール	
PCP12	4,200円	#30	細丸	

ハンドルの種類 (片頭) ※それぞれの製品に対応するハンドルの種類は製品写真の下の表をご確認ください



#7 サテンスチールカラー



#6 サテンスチール



#30 細丸

■ カラーコードプローブ



掲載画像 PQ2N6

3-3-3-3

● ネイバース Q2N				Q-2N Nabers Color - coded	
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品	
PQ2N7	6,600円	#7	サテンスチールカラー		
PQ2N6	6,400円	#6	サテンスチール		
PQ2N	6,200円	#31	細丸		

下顎根分岐部用(ファークーション用)

■ ポケットプローブ

黒色のマーキングが施されていないプローブです。



● ネイバース 2N				2N Nabers	
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品	
P2N6	4,800円	#6	サテンスチール		

下顎根分岐部用(ファークーション用)



● ネイバース 1N				1N Nabers	
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品	
P1N6	4,800円	#6	サテンスチール		

上顎根分岐部用(ファークーション用)



掲載画像 PW6

1-1-1-2-2-1-1-1

● ウィリアムズ				Williams	
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品	
PW6	4,400円	#6	サテンスチール		
PW	4,200円	#30	細丸		

1-1-1-2-2-1-1-1

● ゴールドマンフォックス/ウィリアムズ				Goldman-Fox / Williams	
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品	
PGF/W	4,800円	#31	細丸		

1-1-1-2-2-1-1-1


ハンドルの種類(両頭) ※それぞれの製品に対応するハンドルの種類は製品写真の下の表をご確認ください



#7 サテンスチールカラー



#6 サテンスチール

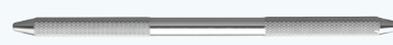

#31 細丸

ハンドルの種類(片頭)



#6 サテンスチール



#30 細丸

● おすすめ品

🕒 取寄品

取寄品欄に🕒マークがある製品は、お届けまでに時間を要します。予めご了承ください。

■ ノバテックプローブ

臼歯部への操作性がよい90度のデザインです。



ノバテックプローブ



従来のプローブ



ノバテック CP11				CP-11 Novatech
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
PCPNT11	4,600円	#30	細丸	

掲載画像 PCPNT26



ノバテック CP12				CP-12 Novatech
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
PCPNT26	4,800円	#6	サテンスチール	
PCPNT2	4,600円	#30	細丸	

掲載画像 PCPNT126



ノバテック UNC12				UNC12 Novatech
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
PCPNT126	4,800円	#6	サテンスチール	
PCPNT12	4,600円	#30	細丸	



● ノバテック UNC15				UNC15 Novatech
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
PCPNT156	4,800円	#6	サテンスチール	


ハンドルの種類(片頭) ※それぞれの製品に対応するハンドルの種類は製品写真の下の表をご確認ください



#6 サテンスチール



#30 細丸

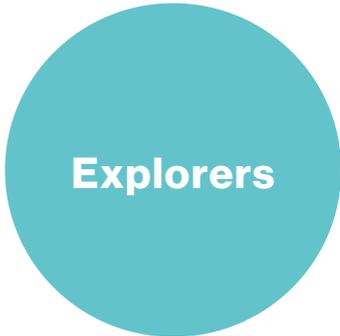

エクスプローラー (探針)

齶蝕や歯石の探知、歯周ポケット内や根分岐部、修復部の検査に使用します。
ヒューフレディグループ製のエクスプローラーは、「デュラスポンド」という特殊配合のステンレス鋼合金を使用しハンドメイドで製作しています。
このステンレス鋼合金は、柔軟性と弾力性、高い触覚感度を発揮し、高精度の診断を実現します。

■ エクスプローラー 片頭

掲載画像 EXS36



3				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
EXS36	2,300円	#6	サテンスチール	
EXS3	2,300円	#30	細丸	

基本の探針(作業部短め)

掲載画像 EXS3A6



● 3A				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
EXS3A7	2,500円	#7	サテンスチールカラー	
EXS3A6	2,300円	#6	サテンスチール	
EXS3A	2,300円	#30	細丸	

基本の探針



ポピュラータイプ 23				23 Popular Type
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SPEXS23	2,700円	#30	細丸	



● ポピュラータイプ 25				25 Popular Type
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SPEXS25	2,700円	#30	細丸	

3Aよりも太く、しなりが少ないタイプ



17				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
EXS176	2,300円	#6	サテンスチール	

ハンドルの種類(両頭) ※それぞれの製品に対応するハンドルの種類は製品写真の下の方の表をご確認ください



#7 サテンスチールカラー



#6 サテンスチール



#31 細丸

● おすすめ品

🕒 取寄品

取寄品欄に🕒マークがある製品は、お届けまでに時間を要します。予めご了承ください。



ウィルキンス/タフツ大学型TU17				TU17 Wilkins / Tufts
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
EXTU176	2,300円	#6	サテンスチール	🕒



シェパードフック 23				23 Shepherd's Hook
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
EXS236	2,300円	#6	サテンスチール	

■ エクスプローラー 両頭

掲載画像 EXD11/126



● 11/12 ODU

11/12 Old Dominion University				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
EXD11/127	3,300円	#7	サテンスチールカラー	
EXD11/126	3,100円	#6	サテンスチール	
EXD11/12	2,900円	#31	細丸	

特に臼歯部隣接面の深いポケット内の歯石探知に適しています。1本で全歯列に適用できるデザイン

11/12 ODUエクスプローラーの作業部を正しく適合させるには、第一シャンクが歯面と平行になるように位置付け、作業部を隣接歯間に挿入します。



掲載画像 EXD11/12A6



● アフターファイブ 11/12

11/12 After Five™				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
EXD11/12A7	3,300円	#7	サテンスチールカラー	
EXD11/12A6	3,100円	#6	サテンスチール	
EXD11/12AF	2,900円	#31	細丸	

EXD11/12より第一シャンクが3mm長いので、より深いポケットの探知に適しています。

掲載画像 EXD57



5

パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
EXD57	3,300円	#7	サテンスチールカラー	🕒
EXD56	3,100円	#6	サテンスチール	
EXD5	2,900円	#31	細丸	

歯肉縁下の歯石探知用#17と齲蝕診査用#23の組み合わせ



ポピュラータイプ 5

5 Popular Type				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SPEXD5	3,700円	#31	細丸	

ハンドルの種類 (片頭) ※それぞれの製品に対応するハンドルの種類は製品写真の下の表をご確認ください



#7 サテンスチールカラー



#6 サテンスチール



#30 細丸

標準価格は全て税抜価格です。



ポピュラータイプ 8				8 Popular Type
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
SPEXD8	3,700円	#31	細丸	



3A/TU17				
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
EX3A/TU176	3,100円	#6	サテンスチール	

基本の探針3Aと歯肉縁下の歯石探知用#TU17の組み合わせです。
隣接歯間部により届きやすいデザイン



ウィルキンス/タフツ大学型 TU17/23				TU17/23 Wilkins / Tufts
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
EXTU17/236	3,100円	#6	サテンスチール	☺

歯肉縁下の歯石探知用#TU17と齶齶診査用#23の組み合わせです。
#TU17は、使いやすくバランスの取れた作業部が特徴



ピッグテール 2A				2A Pigtail
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
EXD2A6	3,100円	#6	サテンスチール	☺



カウホーン 3CH				3CH Cowhorn
パートコード	標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
EXD3CH6	3,100円	#6	サテンスチール	☺


ハンドルの種類 (両頭) ※それぞれの製品に対応するハンドルの種類は製品写真の下の表をご確認ください



#6 サテンスチール



#31 細丸

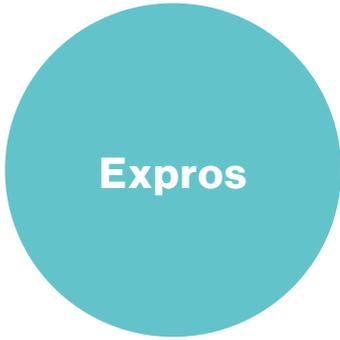

エキスプロ

一方の作業部がエキスプローラー、もう一方がプローブの両頭インストルメントです。診査および測定の両方に使用できます。

■ エクスプロ

掲載画像 XP23/116



3-3-2-3

23/CP11		標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
パートコード					
XPC5574		5,200 円	#7	サテンスチールカラー	
XP23/116		5,200 円	#6	サテンスチール	



3-3-3-3

23/CP12		標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
パートコード					
XP23/126		5,200 円	#6	サテンスチール	



1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1

UNC 23/UNC15		23/UNC 15 University of North Carolina		標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
パートコード							
XP23/UNC6		5,200 円	#6	サテンスチール			



1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1

TU17/UNC15		TU17/UNC15		標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
パートコード							
XPTU17/156		5,200 円	#6	サテンスチール			

ウィルキンス/タフツ大学型エキスプローラーと、UNC(ノースカロライナ大学)プローブのコンビネーション



1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1

3A/UNC15		3A/UNC15		標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
パートコード							
XP3A/NC156		5,200 円	#6	サテンスチール			



1-1-1-2-2-1-1-1

17/OW		17/Thin Williams		標準価格	ハンドル番号	ハンドル名	取寄品
パートコード							
XP17/OW6		5,200 円	#6	サテンスチール			

ハンドルの種類(両頭) ※それぞれの製品に対応するハンドルの種類は製品写真の下の表をご確認ください



#7 サテンスチールカラー



#6 サテンスチール

Mirror Heads

ミラートップ

ヒューフレディグループ製のミラートップは、HD(高鮮明度)コーティング、ロジウムコーティング、ブラックラインと様々なラインナップがあります。表面の加工方法、サイズ、片面・両面など目的に合わせて選択いただけます。
※ヒューフレディグループ製のミラートップのネジは、コーンソケットタイプです。

■ ミラートップ HDコーティング BL

軟組織との明瞭なコントラスト



HDコーティング*1
明度と色調を向上させたHDミラーは、口腔内でのより迅速で正確な処置のために優れた明度と鮮やかな色彩を再現。

DLCコーティング*2
標準的な金属製のミラーやそのハンドルと比較すると、丈夫で黒色のマットなコーティングが乱反射を低減。望まない眩しさを避けるために施術者がポジションを変更する必要がなく、疲労を軽減することが可能。

人間工学に基づいた太いハンドル
太いハンドルは操作しやすく軽く把持することができるため、手指の疲れを低減。

高いコントラストとシャープな視認性
コーティングの黒色が、より明瞭なコントラストを創出するため、口腔内におけるインスツルメント・歯牙・周囲組織間の識別が容易。*4



「デジタルデンティストリィ」に於ける更なる簡便さ

「臼歯部領域での口腔内スキャンングにおいては、しばしば舌の排除が必要になります。これまでのリトラクターやミラーの裏面は金属製であり、光を反射するため理想的な器具ではなく、スキャンングが中断したりひずみが生じたりしていました。ヒューフレディ社のHD ブラックラインミラーの使用により、このような光の反射は大幅に軽減されました。」

歯科医師 カルロ・ボッジオ (ミラノ市開業)



乱反射を80%まで低減*3

「私は患者さんに処置を行う際にはLEDライト付きのルーペを用いますが、その視野において乱反射が著明に低減され、より細部にわたり視認できる事に驚きました。1日の治療が終わった時に、HDブラックラインミラーを使用することで眼精疲労が少ないことに気がつきました。」

歯科衛生士 教育学修士 タミ・ワンレス


*1 HDミラー: High Definition (高鮮明度)ミラー
*2 DLCコーティング: Diamond-Like Carbon (ダイヤモンドライクカーボン)コーティング
*3 ヒューフレディ社製のDLCコーティングされたミラートップ・ミラーハンドルを同社ステンレス製のミラートップ・ミラーハンドルと比較した場合
*4 社内資料



HD BL 片面 5	#5 HD Black Line Single-Sided			
パートコード	入数	標準価格	取寄品	
MIR5HDB	1入	2,000円		
直径24mm				



HD BL 両面 5	#5 HD Black Line Double-Sided			
パートコード	入数	標準価格	取寄品	
MIR5DSHDB	1入	2,200円		
直径24mm				

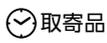

取寄品欄に🕒マークがある製品は、お届けまでに時間を要します。予めご了承ください。



■ ミラートップ HDコーティング



HD 片面3		#3 HD Single-Sided	
パートコード	入数	標準価格	取寄品
MIR3HD	1入	1,500円	

直径20mm



HD 片面4		#4 HD Single-Sided	
パートコード	入数	標準価格	取寄品
MIR4HD	1入	1,500円	
MIR4HD3	3入	4,000円	
MIR4HD12	12入	15,500円	🕒

直径22mm



HD 片面5		#5 HD Single-Sided	
パートコード	入数	標準価格	取寄品
MIR5HD	1入	1,500円	
MIR5HD3	3入	4,000円	
MIR5HD12	12入	15,500円	🕒

直径24mm




HD 両面4		#4 HD Double-Sided	
パートコード	入数	標準価格	取寄品
MIR4DSHD	1入	1,700円	
MIR4DSHD6	6入	9,700円	

直径22mm



HD 両面5		#5 HD Double-Sided	
パートコード	入数	標準価格	取寄品
MIR5DSHD	1入	1,700円	
MIR5DSHD6	6入	9,700円	

直径24mm

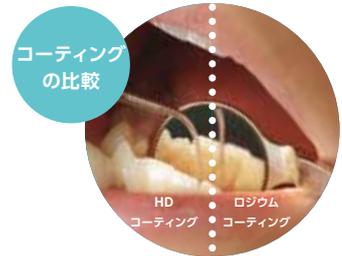

ヒューフレディグループ製HDミラーの特徴

- ロジウムコーティングのミラーより明るさが38.5%向上*4
- 他の表面ミラーより、明るさが50%向上*4
- 傷がつきにくく、長く使用できる
- 人間工学に基づいたデザインの太いハンドルを選択可能

■ ミラートップ ロジウムコーティング



片面4		#4 Rhodium Single-Sided	
パートコード	入数	標準価格	取寄品
MIR4/3	3入	2,900円	
MIR4/12	12入	10,800円	

直径22mm



片面5		#5 Rhodium Single-Sided	
パートコード	入数	標準価格	取寄品
MIR5/3	3入	2,900円	
MIR5/12	12入	10,800円	

直径24mm



両面4		#4 Rhodium Double-Sided	
パートコード	入数	標準価格	取寄品
MIR4DS/3	3入	4,000円	
MIR4DS/6	6入	7,700円	

直径22mm



両面5		#5 Rhodium Double-Sided	
パートコード	入数	標準価格	取寄品
MIR5DS/3	3入	4,000円	
MIR5DS/6	6入	7,700円	

直径24mm

両面ミラーは、流線型で人間工学に基づいたデザインなので、患者さんは快適に治療を受けられます。隙間がない構造は、効率的な清掃を可能にしました。

標準価格は全て税抜価格です。

Mirror Handles

ミラーハンドル

ヒューフレディグループ製のミラートップに合うコーンソケットタイプのミラーハンドルです。

■ ミラーハンドル コーンソケット



コーンソケット ハンドル BL		Black Line Cone Socket Mirror Handle	取寄品
パートコード	標準価格		
MH6B	2,900 円		

直径:9.4mm、全長:122mm



コーンソケット ハンドル #7		#7 Cone Socket Mirror Handle	取寄品
パートコード	標準価格		
MH7	2,700 円		

直径:9.4mm、全長:122mm



コーンソケット ハンドル #6		#6 Cone Socket Mirror Handle	取寄品
パートコード	標準価格		
MH6	2,700 円		

直径:9.4mm、全長:122mm




コーンソケット ハンドル #24		#24 Cone Socket Mirror Handle	取寄品
パートコード	標準価格		
MH24	2,300 円		

直径:7.8mm、全長:130mm



コーンソケット ハンドル #1		#1 Cone Socket Mirror Handle	取寄品
パートコード	標準価格		
MH1	2,300 円		

直径:4.7mm、全長:118mm

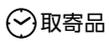

取寄品欄に☺マークがある製品は、お届けまでに時間を要します。予めご了承ください。



Dressing Pliers

ピンセット

口腔内外での材料の把持や運搬に使用します。

ピンセットは、すべて熱処理を施した重厚なステンレス鋼を使用しており、先端部の曲がりやズレが生じにくい構造です。

■ ピンセット



1 1 Perry

パートコード	標準価格	取寄品
DP1	4,800円	

ギザ付および本体中央部のピンにより、しっかり把持しズレにくい。

2 2 College

パートコード	標準価格	取寄品
DP2	4,800円	

ギザ付および本体中央部のピンにより、しっかり把持しズレにくい。

3

パートコード	標準価格	取寄品
DP3	4,800円	

ギザ付および本体中央部のピンにより、しっかり把持しズレにくい。

17

パートコード	標準価格	取寄品
DP17	4,800円	

ギザ付および本体中央部のピンにより、しっかり把持しズレにくい。



汎用 Utility Pick-Up
 パートコード **DPU17** 標準価格 4,200円 取寄品
 ギザ付および本体中央部のピンにより、しっかり把持しズレにくい。

18
 パートコード **DP18** 標準価格 4,800円 取寄品
 ギザ付および本体中央部のピンにより、しっかり把持しズレにくい。

18L 18L (Locking)
 パートコード **DP18L** 標準価格 8,100円 取寄品
 ロック付。ギザ付および本体中央部のピンにより、しっかり把持しズレにくい。

● **コーク型 18JS II** 18JSII
 パートコード **DP18JS-II** 標準価格 3,600円 取寄品
 ギザ無

The Best In Practice

【製造販売元・製品に関するお問い合わせ先】

ヒューフレディ・ジャパン合同会社 [Hu-Friedy.co.jp](https://www.hu-friedy.co.jp)

〒101-0021 東京都千代田区外神田6-13-10 プロステック秋葉原6F

Tel 03-4550-0660 【受付時間】9:00~17:00(土・日・祝祭日を除く)

【製造元】Hu-Friedy Mfg. Co., LLC

掲載商品の標準価格には消費税等は含まれておりません。標準価格は、2024年7月22日現在のものです。仕様および外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。記載されている寸法は特定の記載が無い限り作業部の幅および径、または全長を示した公称値になります。ヒューフレディ社製品は職人の手によって最終仕上げを行っているため、若干の誤差が生じることがあります。【商標について】以下はヒューフレディ社またはその関連会社の商標です：HU-FRIEDY ©2024 Hu-Friedy Japan LLC. All rights reserved. HF-120J/2407 Diagnostic All company and product names are trademarks of Hu-Friedy Mfg. Co. LLC its affiliates or related companies, unless otherwise noted. Marks not registered in all jurisdictions. Hu-Friedy Mfg. Co., LLC. reserves the right to change features of products, images and text at any time without notice.

【販売名 / 一般的名称 / 医療機器届出番号】

■エキスプロ / 歯科用探針 / 13B3X10195G05102 ■エキスプローラー / 歯科用探針 / 13B3X10195G05101 ■カラーコードプローブ / 歯周ポケットプローブ / 13B3X10195G07101 ■カラービュープローブ / 歯周ポケットプローブ / 13B3X10195G07103 ■パテックプローブ / 歯周ポケットプローブ / 13B3X10195G07104 ■ピンセット / ピンセット / 13B3X10195G34102 ■ポケットプローブ / 歯周ポケットプローブ / 13B3X10195G07102 ■ミラー / 歯鏡 / 13B3X10195G22101 ●医療機器の分類：一般医療機器 (クラスI)

 **HuFriedyGroup**
The Best In Practice