

Crown Removers

クラウンリムーバー



小さい力で
クラウン除去!!
メタルコアにも
おすすめ!!!

メタルクラウンにも
使える!

作業部にタングステン
カーバイドが付与され、
しなりのある柄で
力がかけやすい!
しっかり掴める!!


③ 仮歯用
全長 15.7cm
CRGR
¥29,400

① クリステンセン 直
先端幅 3.0mm
CRCH1
¥10,300

② クリステンセン 90°
先端幅 3.0mm
CRCH2
¥10,300



バーでスリットを入れる

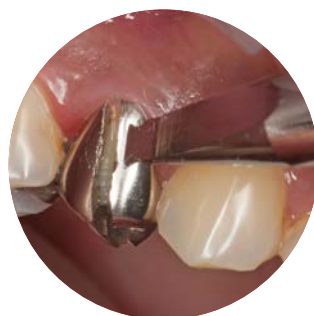

クリステンセンでスリットを
広げセメントを壊す



セメントが壊れ少し浮き上がったら
仮歯用鉗子 (CRGR) で
除去する



★「直」と「90°」の2種類の
クリステンセンを類舌的に
逆回転でトルクを加えセメントを
崩し、コアを除去する

	パートコード	商品名	標準価格(税別)	数量
①	CRCH1	クラウンリムーバー クリステンセン 直	¥10,300	
②	CRCH2	クラウンリムーバー クリステンセン 90°	¥10,300	
③	CRGR	クラウンリムーバー 仮歯用	¥29,400	

【製造販売元・製品に関するお問い合わせ先】

ヒューフレディ・ジャパン合同会社 **Hu-Friedy.co.jp**

〒101-0021 東京都千代田区外神田6-13-10 プロステック秋葉原6F

Tel 03-4550-0660 【受付時間】9:00~17:00(土・日・祝祭日を除く)

【製造元】 **Hu-Friedy Mfg. Co., LLC**

掲載商品の標準価格には消費税等は含まれておりません。標準価格は、2024年10月1日現在のものです。
仕様および外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。記載されている寸法は特定の記載が無い限り作業部の幅
および径、または全長を示した公称値になります。ヒューフレディ社製品は職人の手によって最終仕上げを行っているため、若干の誤差が生じることがあり
ます。■販売名/一般的名称/医療機器届出番号 ■クラウンリムーバー/歯科用起子及び剥離子/13B3X10195G13102 ●医療機器の分類:一般医療
機器(クラスI) 【商標について】以下はヒューフレディ社またはその関連会社の商標です:Hu-Friedy
©2024 Hu-Friedy Japan LLC. All rights reserved. M7540/J/2410

HuFriedyGroup
The Best In Practice