

# Let's Try HuFriedyGroup Instruments

## 根分岐部病変にチャレンジしてみよう!



### その1 ファイルスケーラー ダイヤモンドテック

ダイヤモンドテックファイルスケーラーは、**根分岐部**や**歯根の凹凸**に適したサイズと形状です。

**360°ダイヤモンドダストコーティング**されているため、**ストロークの方向を考えずに**使用できます。

また、直径11mmの両頭ハンドルは人間工学的にも優れているので、**歯科の専門家の皆様に効率よくご利用いただけます。**



根分岐部用  
ネイバース



近遠心用



#### ★ひとことメモ★

ダイヤモンドテック・ネイバースは、根分岐部用プローブ、ネイバースと同じ形状で、簡単に分岐部にアクセスが可能です。

**SDCN7**  
¥10,600

#### ★ひとことメモ★

近遠心用は、隅角部や下顎の分岐部間が狭窄しているケースにも使用可能です。

**SDCM/D7**  
¥10,600

#### Let's TRY!!! 試してみよう! ①

さまざまな方向にストロークして、**根分岐部のスケーリング**を行ってみてください。

ウラも  
見てネ



シクルスケーラーのマスク  
NEVIさん  
ネビィ

**HuFriedyGroup**  
The Best In Practice

その2

## ディブライメントキュレット



**1/2**  
頬舌面用  
SOH1/2  
¥5,800



**3/4**  
近遠心用  
SOH3/4  
¥5,800



スプーン型の刃全体にカッティングエッジが付与されているので縦横斜めすべての方向へのプッシュまたはプルストロークができます。



### ★ひとことメモ★

ディブライメントキュレットとは…  
**スケーリングやルートプレーニング後の仕上げ**に使用するキュレットです。  
軽いタッチでディブライメント。  
取り残しをきれいに除去できます!

### Let's TRY!!! 試してみよう! ②

2つのキュレットのどちらの面をどの部位に使用するのか確認してみてください。

### もしグレーシーキュレットで根分岐部の処理を行うなら……

シャンクが細く、狭い隙間にスムーズにアクセスできる  
**マイクロミニファイブ**がおススメです!  
硬めのシャンクでピンポイントに歯石除去が可能です。

遠心根の  
近心面



**マイクロミニファイブ**  
**11/12**  
近心面用キュレット  
SMS11/129E2  
¥6,200

近心根の  
遠心面



**マイクロミニファイブ**  
**13/14**  
遠心面用キュレット  
SMS13/149E2  
¥6,200

### ★ひとことメモ★

シャンクは通常のグレーシーより3mm長く、  
ブレードは半分の長さ、70%の厚さ。  
**臼歯部の複雑な歯根の形態や、根分岐部・  
歯根の凹みに適しています。**  
超音波スケーラー等、パワースケーラー  
使用後の取り残しにも有効です。

### Let's TRY!!! 試してみよう! ③

実際にシャンクの細さや硬さを分岐部に当てて確認してみてください。



NEVIさん  
ネビィ

【製造販売元・製品に関するお問い合わせ先】

**ヒューフレディ・ジャパン合同会社 Hu-Friedy.co.jp**  
〒101-0021 東京都千代田区外神田6-13-10 プロステック秋葉原6F  
Tel 03-4550-0660 【受付時間】9:00~17:00(土・日・祝祭日を除く)

【製造元】 **Hu-Friedy Mfg. Co., LLC**

掲載商品の標準価格には消費税等は含まれておりません。標準価格は、2025年1月1日現在のものです。  
仕様および外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。記載されている寸法は特定の記載が無い限り作業部の幅および径、または全長を示した公称値になります。ヒューフレディ社製品は職人の手によって最終仕上げを行っているため、若干の誤差が生じることがあります。■販売名/一般的名稱/医療機器届出番号 ■ファイルスケーラー/歯科用スケーラ/13B3X10195G02102 ■ディブライメントキュレット/歯科用キュレット/13B3X10195G06104 ■グレーシーキュレット/歯間用キュレット/13B3X10195G01101 ●医療機器の分類-一般医療機器(クラスI) 【商標について】 以下はヒューフレディ社またはその関連会社の商標です: Hu-Friedy ©2025 Hu-Friedy Japan LLC. All rights reserved. HF-089J/2501