

Sidekick™ Sharpener

ハンディシャープナー サイドキック



サイドキック (Sidekick™) とは？

スケーラーやキュレットの定期的なシャープニングに使用します。
正しいシャープニングを定期的に行うことで、
インスツルメントの寿命が長くなります。

※Sidekick: 口語的表現で、「親友」「仲間」「パートナー」を意味します

● AC電源不要のコードレス仕様

単3電池2個で動きます。

● ハンディサイズのコンパクト・軽量デザインにより、 チェアサイドでのシャープニングに対応

持ち運びに便利なハンディサイズで、診察室のわずかな
スペースでシャープニングすることができます。また、
チェアサイドで即シャープニングすることができるなど場所を
選びません。

● 難しい技術を必要としない、簡単なシャープニング


インスツルメントの第一シャंकを第一シャंकガイドに
沿わせるだけの簡単操作で、シャープニングが可能です。

● 短時間でシャープニング完了、メンテナンス効率をアップ


わずかな時間でシャープニングが行えるので、日常的な器具のメンテナンスの効率化を図ります。

● オートクレーブ滅菌が可能なパーツを採用

シャープニングストーン、ガイドプレート、ガイドプレートスクリューは取り外すことができ、
オートクレーブ滅菌が可能です。

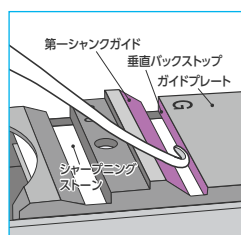

G グレーシーキュレット

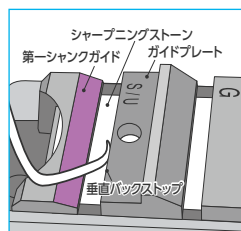

S/U シックルスケラー
ユニバーサルキュレット

サイドキックの使用方法

● インスツルメントに合った溝にブレードをあてる:

グレイシーキュレットは(G)、シックルスケラーと
ユニバーサルキュレットは(S/U)の溝にブレードを
置きます。

● 第一シャंकガイドに沿わせる:

インスツルメントの第一シャंकを第一シャंक
ガイドに沿わせ(これだけで角度が決まります)
ブレードの背面を垂直バックストップに
当てるようにします。

● スイッチを入れて簡単シャープニング:

シャープニング中はブレードの角度は動かさず、
インスツルメントを左右に動かすと、
砥石をまんべんなく使用することができ、
砥石を長持ちさせられます。

実際の動作は...

使用方法
説明ムービーを
チェック!!!



サイドキック シャープニングキット

SDKKIT 72,600円

【付属品】

セラミックストーン(SDKSTONEC)×1個、プラスチックテスト
スティック×1本、拡大レンズ×1個、取扱説明書×1冊

【交換用パーツ】

セラミックストーン※

SDKSTONEC 4,200円

セラミックストーン 粗目※

SDKSTCOARS 4,200円

保持クリップ

SDKCLIP 2,700円


ガイドプレート

SDKGPLATE 4,000円

ガイドプレートスクリュー

SDKGPSCREW 2,700円

※ストーンは裏返して両面使用できます。

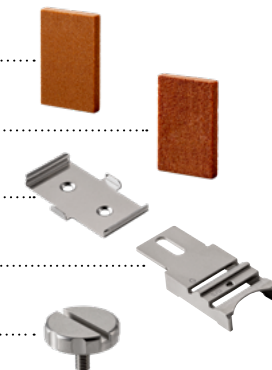

【製造販売元・製品に関するお問い合わせ先】

ヒューフレディ・ジャパン合同会社 Hu-Friedy.co.jp

〒101-0021 東京都千代田区外神田6-13-10 プロステック秋葉原6F

Tel 03-4550-0660 【受付時間】9:00~17:00(土・日・祝祭日を除く)

【製造元】 **Hu-Friedy Mfg. Co., LLC**

掲載商品の標準価格には消費税等は含まれておりません。標準価格は、2025年4月21日現在のものです。
仕様および外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。記載されている寸法は特定の記載が無い限り作業部の幅
および径、または全長を示した公称値になります。ヒューフレディ社製品は職人の手によって最終仕上げを行っているため、若干の誤差が生じることがあり
ます。【商標について】以下はヒューフレディ社またはその関連会社の商標です: Hu-Friedy, Sidekick ©2025 Hu-Friedy Japan LLC. All rights reserved.
HF-577J/2504

HuFriedyGroup
The Best In Practice