

# Arkansas Stone No.5 Bates

## アーカンサスストーン ベイツ



### デザインと使用方法 - DESIGN & USE -

- 半円状の溝部分でネビィ1やボーンキュレット、エキスカベーターなどの円形の作業部のシャープニングを簡単に行えます。
- 平面部分で円形ブレードの仕上げや、グレーシーキュレット・シッフルスケーラーなど一般的なインスツルメントをシャープニングできます。
- ストーン側面の大きな半円部分で大型のキュレット・ルクセーティングエレベーターなどをシャープニングできます。

### テクニック - TECHNIQUE -

#### 潤滑剤

専用のシャープニングオイルをご使用ください。

#### スケラー、エキスカベーター、ボーンキュレット

[作業部の丸みを形成]シャープニングするインスツルメントに適した溝に先端を当て、溝に沿って端から端までインスツルメントを引きます。必要に応じてこの作業を繰り返します。  
※エキスカベーターやボーンキュレットは、外周がぴったりとストーンに合っている事を確認しながらシャープニングします。

#### 大型のキュレット・ルクセーティングエレベーター など

インスツルメントの内面を側面の半円部分に沿わせませす。エッジがストーンにぴったりと沿うように少し傾けます。ストーンの長さ分を優しくプッシュストロークします。必要に応じてこの作業を繰り返します。

#### アーカンサスストーン ベイツ5

中目(10×3.8×1.3cm)

オイルを使用


**SS5**

¥15,400


### 【ベイツストーンを使用したネビィ1スプーン型ブレードの簡単シャープニング方法】



- ① ネビィ1スプーン型ブレードの背面を2mmの溝の一端にあて、軽く圧力をかけながら、溝に沿ってプルストロークします。

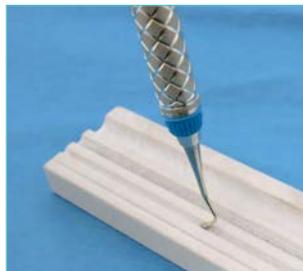

- ② 半分まで来たあたりから、ブレードを前方に傾けていき、溝の終わりにかけて先端部分もシャープにしていきます。必要に応じて上記の作業を繰り返し、ブレード縁全体をシャープニングします。

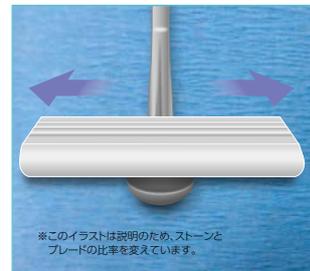

※このイラストは説明のため、ストーンとブレードの比率を変えています。

- ③ 仕上げに、ブレードの内面が床と平行になるようにします。ベイツストーンの背面(平面)を下方に向けて持ち、ブレードの内面と平行になるようにあてます。軽い力でストーンを左右に動かしながらバリを除去します。

## シャープニングストーンについて

シャープニングストーンは、鈍ったカッティングエッジを再び鋭利な状態にし、様々な粒度・形・サイズがあります。目的に合わせて、適切なストーン選びが重要になります。

おすすめ!



**デュアルストーン**  
粗目/細目  
(10×2.5×1.2cm)  
潤滑剤(水やオイル)は不要  
**SSDGRIT**  
¥5,200



**インディアストーン 1**  
細目  
(10×2.5×1.3cm)  
オイルを使用  
**SSF1**  
¥4,400



**セラミックストーン 3C**  
細目  
(7.6×3.2×0.6cm)  
水を使用または  
潤滑剤(水やオイル)は不要  
**SS3C**  
¥4,400



おすすめ!

**アーカンサスストーン**  
**フラット 4**  
中目  
(10×2.5×0.6cm)  
オイルを使用  
**SS4**  
¥4,400



**インディアストーン**  
**ウェッジ 6**  
粗目  
(11.4×4.8×0.9~0.3cm)  
オイルを使用  
**SS6**  
¥4,400



**アーカンサスストーン**  
**ウェッジ 6A**  
中目  
(11.4×4.8×0.9~0.3cm)  
オイルを使用  
**SS6A**  
¥4,400



**アーカンサスストーン**  
**円錐型(コニカル) 299**  
超細目  
(8.9×0.8cm)  
オイルを使用  
**SS299**  
¥5,000

おすすめ!



**プラスチック**  
**テストスティック**  
6本入(7.6×0.6cm)  
**PTS**  
¥2,600



**シャープニングオイル**  
(29.5ml)  
**SSO**  
¥2,800

## 【お手入れについて】

### シャープニングストーンのお手入れ

シャープニングストーンは、使用後は、清潔な布で拭いて金属粒子を取り除いてください。滅菌前に、オイルをこすり落とすか、超音波洗浄器にかけて除去します。滅菌後はシャープニング毎にオイルを使用します。必ずシャープニング石の全表面を使い、「溝」ができるのを防いでください。チェアサイドでシャープニングする必要がある場合には、オイルなし(ドライな状態)で使用することもできます。

**オート**  
**クレーブ**  
**OK!**

ヒューフレディ社のシャープニングストーン  
及びプラスチックテストスティックは  
オートクレーブ滅菌可能です。

【製造販売元・製品に関するお問い合わせ先】

ヒューフレディ・ジャパン合同会社 [Hu-Friedy.co.jp](http://Hu-Friedy.co.jp)

〒101-0021 東京都千代田区外神田6-13-10 プロステック秋葉原6F

Tel 03-4550-0660 【受付時間】9:00~17:00(土・日・祝祭日を除く)

【製造元】 **Hu-Friedy Mfg. Co., LLC**

掲載商品の標準価格には消費税等は含まれておりません。標準価格は、2025年1月21日現在のものです。仕様および外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。記載されている寸法は特定の記載が無い限り作業部の幅および径、または全長を示した公称値になります。ヒューフレディ社製品は職人の手によって最終仕上げを行っているため、若干の誤差が生じる場合があります。【商標について】以下はヒューフレディ社またはその関連会社の商標です：Hu-Friedy ©2025 Hu-Friedy Japan LLC. All rights reserved. HF-112/J/2501