

Crosstex™ Product Guide

クロステックス製品カタログ



掲載製品

- サージカルマスク
- 患者用エプロン
- エプロンディスペンサー
- ヘッドレストカバー
- 快適クッション
- ブラケットトレーカバー
- バリアフィルム
- シリンジスリーブ
- 滅菌ラップ
- 滅菌パウチ

Crosstex™ (クロステックス) とは…

ヒューフレディグループのCrosstex™ (クロステックス) は、1953年の創立以来約70年以上にわたり革新的な感染予防製品を考案し、製造することにより医療分野に貢献してきました。そして現在、高品質な感染予防製品を製造できる施設、迅速な流通基地から、全世界に製品を供給させて頂いています。

Crosstex™ (クロステックス) は、米国にてこの製品の大部分を製造し、「Made in U.S.A.」に強いこだわりをもち、大事にしております。

Crosstex™ (クロステックス) が目指すものは

ユニークで革新的な新製品の開発を継続的に努めることが、私たちの医療ミッションの基礎となるものです。私たちはより優れた感染管理、予防と安全のためのソリューションを提供する世界的なリーディング・メーカーとして、医療社会に奉仕できることを誇りに思っています。



正しいマスクの選択

最適なマスクの選択は、皆様のPPE (個人防護具) の大切な構成要素の一つです。

一見、どのマスクも同じように見えますが、それぞれのマスクは品質、遮断 (微粒子・バクテリア捕集) レベルに違いがあります。マスクの普及にともない、どのマスクが良いのか? ちゃんとしたものなのか? と迷われたことがあると思います。マスクの選び方として、実はパッケージに記載されているので、より安心して使用できるマスクであると判断できます。一般的に「レベル」の表示があるマスクは「サージカルマスク (外科)」に代表される、主に医療現場で使用されている医療用マスクで求められる性能の一つです。

米国では、ASTM (米国試験材料協会) でこのマスクの性能条件を定めており (ASTM-F2100)、それぞれ「レベル1」「レベル2」「レベル3」に分類されます。この規格名称は国が定める規格いわゆる「国家規格」であり、国から一定の性能が認められたマスクとなります。それぞれの条件は下記のようになっています。この規格をパッケージに記載するには、マスクを検査機関に提出し一定の性能があることを認められた場合に限り、3段階に分類されるレベルまたはクラスを記載することができます。

MaskEnomics	●	ASTM レベル 3	▲ 採集率の基準 ▼
	●	ASTM レベル 2	
	●	ASTM レベル 1	

試験内容	ASTM レベル 3	ASTM レベル 2	ASTM レベル 1
撥水性能力数値*1 (Fluid Resistance)	160mmHg	120mmHg	80mmHg
通気性*2 (ΔP)	< 5.0mm H ₂ O/cm ²	< 5.0mm H ₂ O/cm ²	< 4.0mm H ₂ O/cm ²
細菌ろ過効率*3 (BFE)	≥98%	≥98%	≥95%
微粒子ろ過効率*4 (PFE)	≥98%@0.1μm	≥98%@0.1μm	≥95%@0.1μm
難燃性*5 (Flame Spread)	Class1	Class1	Class1

用語の説明

※1 Fluid Resistance 撥水性能力数値

合成液体を使って試験した液体浸透抵抗性 (撥水性) を意味しています。マスク素材を通過する合成液体に対する液体浸透抵抗性で、通過が生じる最低圧力をmmHgで表わしています。この数値が大きい順に撥水性が高くなります。

※2 ΔP マスク素材の通気抵抗性

マスクがより高性能になれば、マスクのバリアとしての防御性能が高くなるため、呼吸性能 (通気性) は多少低下します。測定単位はmmH₂O/cm² でその数値が大きくなるほど、通気性は低下します。

※3 バクテリア捕集 (遮断) 効率

孔径1~5μで捕集 (遮断) されるバクテリアの比率です。数値が大きい順に捕集効率が高くなります。

※4 PFE 微粒子捕集 (遮断) 効率

孔径0.1~1.0μで捕集 (遮断) される微粒子の比率です。数値が大きい順に捕集効率が高くなります。

この微粒子サイズは「サブミクロン (μ)」です。『サブミクロン粒子捕集効率』は、エアロゾル (噴霧) 化した1μより小さな微粒子を捕える捕集能力で、エアロゾル流速でマスク素材を通過しない既知量の微粒子の比率で表示されます。

※孔径が1μ以上のマスク素材は通例BFEで評価され、PFEにより評価はありません。

※5 Flame Spread 可燃性

火災伝播性と呼ばれています。可燃性の最低評価はClass 1 (米連邦規格CFR16, 1610) です。

ASTMレベルで分類する処置例

ASTM レベル 3 Surgical Masks



飛散・飛沫水溶液、空中浮遊物が、
通常より多い治療環境下にて使用

- ・口腔外科(中-重)
- ・支台歯形成
- ・インプラント埋入
- ・歯周外科手術
- ・超音波スケーラーによる処置
(マグネット式・ピエゾ式)
- ・レーザー治療

ASTM レベル 2 Surgical Masks



飛散・飛沫水溶液、空中浮遊物が、
中程度の治療環境下にて使用

- ・口腔外科(軽-中)
- ・歯内療法
- ・予防処置
- ・コンポジットレジン修復
- ・シーラント処置
- ・SRP


ASTM レベル 1 Surgical Masks



飛散・飛沫水溶液、空中浮遊物が、
少ない治療環境下にて使用

- ・検査
- ・クリーニング／メンテナンス
- ・印象採取
- ・技工物取扱
- ・矯正

マスク 解剖図

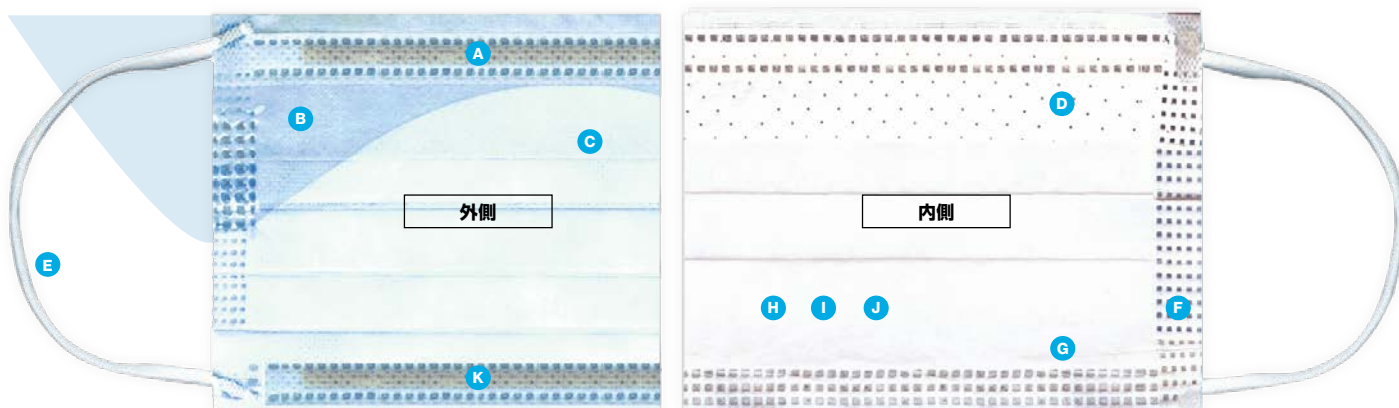

A アルミニウム製ロングノーズピース
長く、丈夫なノーズピースにより、マスクの密着度を最大限に高める。

B マスク外面層素材／高撥水性素材
バクテリアを含んだ水溶液を最大限に撥水。

C 蒸気バリア
マスク外面上部の薄い不織布で、マスク外側面層に付着した水溶液が蒸気になりメガネが曇るのを防ぐ。

D フォグフリーストリップ
マスク内の呼吸を吸収し、メガネ等の曇りを防ぐ。柔らかい素材のクッションで鼻梁周りの圧迫感を軽減し、マスクの密着度を高める。

E 優しいイアーループ(耳かけ紐)
ゴム未使用の耳かけ紐(ラテックス・フリー)。接着部は皮膚への刺激を避ける為、マスク外側に付けている。

F 超音波接着
接着不良が生じにくい超音波接着方式で各層を接着。縫合ミシン目穴や接着剤からの刺激は一切ない。

G 高レベルのフィルター(ろ過)層
ASTM規格のフィルター(ろ過)能力と通気性能。

H 皮膚過敏症に優しいセルロース被膜
セルロース被膜をカバーしており皮膚の乾燥を防ぐ。皮膚過敏症の方が皮膚に刺激を感じることは殆どない仕様。

I フェイシャル・ティッシュ層
白色で柔らかいフェイシャル・ティッシュ素材。

J 不織布内面層
白色の撥水性の高い素材を使用。

K セキュアフィットアルミニウム製チンピース
マスク下部に施されたチンピースは上下、左右からの微粒子の侵入を防止。

処置や環境にあわせたマスクの選び方

実施する処置に基づいて、常に適切な保護レベルを使用する必要があります。処置の長さ、液体またはエアロゾルの量、および標準予防措置に基づいて、臨床判断を使用して適切なバリアのレベルを決定します。

各マスクに記載されている数値は、ASTM-F2100 に従って第三者機関によって実施されたテストに基づいております。

※マスクの製品ごとに入数が異なりますのでご注意ください。尚、一枚からの販売は致しかねますので、ご了承ください。

セキュアフィット (Crosstex™ Secure Fit™) テクノロジー

より良いフィット！ 精度の高いフィルター構造！ より高い保護！

歯科医師や歯科衛生士が行う超音波スケーラーやハンドピースなどを使用する処置の多くでは、汚染されたバイオエアロゾルや飛沫が発生する可能性があります。病原体の伝染を減らす最も効果的な方法は、手袋、マスク、目の保護具などの個人防護具(PPE)を使用することです。

鼻のわき、頬、アゴなどに隙間ができやすいマスクは、感染のリスクが高くなりますが、ぴったりフィットするマスクは、保護効果が向上します。セキュアフィットマスクは、鼻やアゴの形状にあわせてソフトなワイヤーで調整可能な機能がついており、このストリップで固定することで隙間を極力減らし、感染リスクを低下させます。

セキュアフィット (Crosstex™ Secure Fit™) の利点

- 標準的な耳かけ式マスクよりも優れた保護を提供することが実証されています。
- 柔軟なアルミニウムストリップは、装着される方の鼻やアゴに安全かつ確実にフィットする特許取得済のオリジナルデザイン！
- ぴったりとしたカスタムフィットにより、隙間を最小限に抑え、マスクの保護効果を実現します。

※米国特許番号：US-20240359041-A01

※マスクの製品ごとに入数が異なりますのでご注意ください。

尚、一枚からの販売は致しかねますので、ご了承ください。

アルミニウム製のストリップ：ノーズピース（鼻上部）とチンピース（顎部）でマスクをカスタムメイドのように、あらゆるフェイスライン／サイズにぴったりフィットさせます。

マスク上部・下部・両サイドの隙間を封鎖し、感染リスクを低減させます。

セキュアフィット (Crosstex™ Secure Fit™) の装着方法.....



1. 長いストリップ（ノーズピース）を上にしてマスクを装着し、鼻の上でワイヤーを挿して固定



2. 鼻のストリップ（ノーズピース）を軽くおさえながらマスクをアゴ下までのばす



3. 短いストリップ（チンピース）をアゴの下で隙間がないように折りたたむ

● ASTM レベル 3

飛散・飛沫水溶液、空中浮遊物が、通常より多い治療環境下でお使いください

- 口腔外科 (中・重)
- インプラント埋入
- 超音波スケーラーによる処置 (マグネット式・ピエゾ式)
- 支台歯形成
- 歯周外科手術
- レーザー治療



• Secure Fit™ Mask Technology



ウルトラ セキュアフィット

- BFE=99.9% $\times$ 3 μ
- PFE=99.8% $\times$ 0.1 μ
- アルミニウム製チンピース内蔵 (米国特許取得済)
- アルミニウム製 ロングノーズピース
- 内側素材: 白色高撥水性
- 高撥水性外側素材

CTX マスク LV3 ウルトラ SF

パートコード	カラー	入数	標準価格
GCFCXUSF-HF	■ ブルー	50入	3,400 円



• Secure Fit™ Mask Technology



ウルトラ センシティブ セキュアフィット (皮膚過敏症対応)

- BFE=99.9% $\times$ 3 μ
- PFE=99.8% $\times$ 0.1 μ
- 高撥水性外側素材
- アルミニウム製チンピース内蔵 (米国特許取得済)
- 内側素材: 白色低刺激性、セルロール被膜
- 内外両面超ソフト素材: ほつれ、破れなし
- インク、化学物質染料等 不使用
- アルミニウム製ロングノーズピース

CTX マスク LV3 ウルトラ センシティブ SF

パートコード	カラー	入数	標準価格
GCFCXSSF-HF	□ ホワイト	50入	3,400 円



• FogFree™ Mask
• Secure Fit™ Mask Technology



ウルトラ センシティブ フォグフリー セキュアフィット (メガネ曇り止め機能付) (皮膚過敏症対応)

- BFE=99.9% $\times$ 3 μ
- PFE=99.8% $\times$ 0.1 μ
- 高撥水性外側素材
- アルミニウム製チンピース内蔵 (米国特許取得済)
- アルミニウム製 ロングノーズピース
- 内側素材: 白色低刺激性、セルロール被膜
- 内外両面超ソフト素材: ほつれ、破れなし
- インク、化学物質染料等 不使用
- 内側上部: メガネ曇り止めストリップ

CTX マスク LV3 ウルトラ センシティブ フォグフリー SF

パートコード	カラー	入数	標準価格
GCFCXSFSF-HF	□ ホワイト	40入	3,400 円



• FogFree™ Mask



ウルトラ センシティブ (皮膚過敏症対応)

- BFE=99.9% $\times$ 3 μ
- PFE=99.8% $\times$ 0.1 μ
- 高撥水性外側素材
- アルミニウム製 ロングノーズピース
- 内側素材: 白色低刺激性、セルロール被膜
- 内外両面超ソフト素材: ほつれ、破れなし
- インク、化学物質染料等 不使用

CTX マスク LV3 ウルトラ センシティブ

パートコード	カラー	入数	標準価格
GCFCXS-HF	□ ホワイト	50入	3,400 円



- BFE=99.9% $\times$ 3 μ
- PFE=99.8% $\times$ 0.1 μ
- アルミニウム製ロングノーズピース
- 外側素材: 高撥水性
- 内側素材: 白色高撥水性
- 内側上部: メガネ曇り止めストリップ

CTX マスク LV3 ウルトラ フォグフリー

パートコード	カラー	入数	標準価格
GCFCX-HF	■ ブルー	40入	3,000 円

● ASTM レベル 2

飛散・飛沫水溶液、空中浮遊物が、**中程度の治療環境下**でお使いください

- 口腔外科（軽-中）
- 歯内療法
- 予防処置
- コンポジットレジン修復
- シーラント処置
- SRP



• Secure Fit™ Mask Technology



プロシーデュラル セキュアフィット

- BFE=99.9% $@3\mu$
- PFE=99.7% $@0.1\mu$
- アルミニウム製チンピース内蔵（米国特許取得済）
- アルミニウム製ロングノーズピース
- 外面素材：高撥水性
- 内面素材：白色高撥水性

CTX マスク LV2 プロシーデュラル SF

パートコード	カラー	入数	標準価格
GCPBLSF-HF	ブルー	50入	1,800 円



プロシーデュラル

- BFE=99.9% $@3\mu$
- PFE=99.7% $@0.1\mu$
- アルミニウム製ロングノーズピース
- 外面素材：高撥水性
- 内面素材：白色高撥水性

CTX マスク LV2 プロシーデュラル

パートコード	カラー	入数	標準価格
GCPBL-HF	ブルー	50入	1,800 円
GCPPK-HF	ピンク	50入	1,800 円

● ASTM レベル 1

飛散・飛沫水溶液、空中浮遊物が、**少ない治療環境下**でお使いください

- 検査
- クリーニング/メンテナンス
- 印象採取
- 技工物取扱
- 矯正



• Secure Fit™ Mask Technology



アイソフルード セキュアフィット

- BFE=99.1% $\text{@}3\mu$
- PFE=98.9% $\text{@}0.1\mu$
- アルミニウム製チンピース内蔵 (米国特許取得済)
- アルミニウム製ロングノーズピース
- 外面素材: 高撥水性
- 内面素材: 白色ティッシュ

CTX マスク LV1 アイソフルード SF

パートコード	カラー	入数	標準価格
GCIBLSF-HF	ブルー	50入	1,800 円
GCIPKSF-HF	ピンク	50入	1,800 円



• Plus (soft inner layer)



アイソフルード プラス (皮膚過敏症対応)

- BFE=99.8% $\text{@}3\mu$
- PFE=99.1% $\text{@}0.1\mu$
- アルミニウム製ロングノーズピース
- 内側素材: 白色低刺激性、セルロール被膜
- 外側素材: 高撥水性

CTX マスク LV1 アイソフルード プラス

パートコード	カラー	入数	標準価格
GPLUSBL-HF	ブルー	50入	1,800 円
GPLUSPK-HF	ピンク	50入	1,800 円



• FogFree™ Mask



アイソフルード フォグフリー (メガネ曇り止め機能付)

- BFE=99.1% $\text{@}3\mu$
- PFE=98.9% $\text{@}0.1\mu$
- 内側上部: メガネ曇り止めスリッパ
- アルミニウム製ロングノーズピース
- 外面素材: 高撥水性
- 内面素材: 白色ティッシュ

CTX マスク LV1 アイソフルード フォグフリー

パートコード	カラー	入数	標準価格
GCICXB-HF	ブルー	40入	1,700 円



アイソフルード


- BFE=99.1% $\text{@}3\mu$
- PFE=98.9% $\text{@}0.1\mu$
- アルミニウム製ロングノーズピース
- 外面素材: 高撥水性
- 内面素材: 白色ティッシュ

CTX マスク LV1 アイソフルード

パートコード	カラー	入数	標準価格
GCIBL-HF	ブルー	50入	1,800 円
GCIGR-HF	グリーン	50入	1,800 円
GCIPK-HF	ピンク	50入	1,800 円

Crosstex™(クロステックス)ソリューション

クロステックス製品で診療室をトータルサポートします！

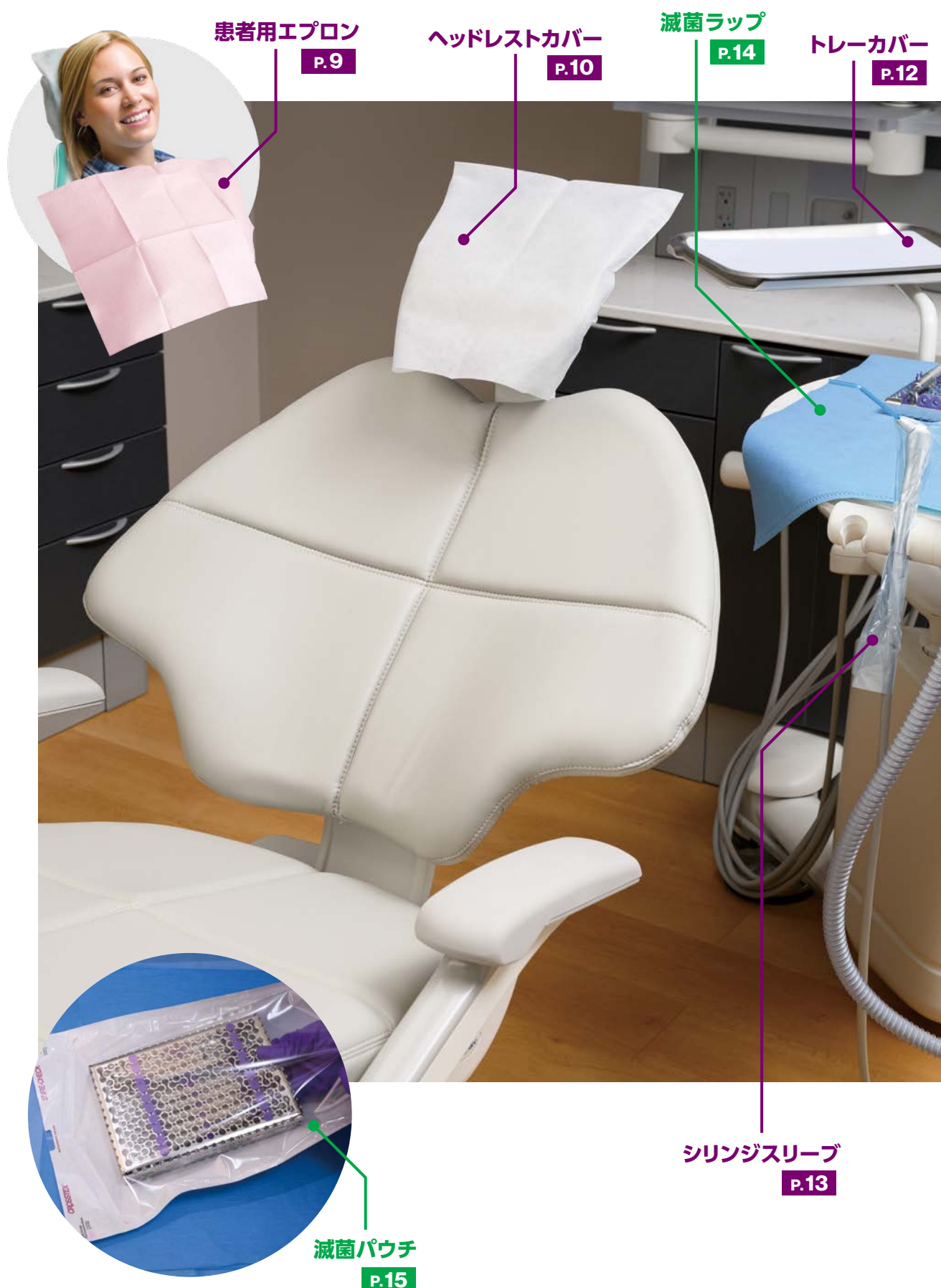

3-Ply Tissue

患者用エプロン

Crosstex™ (クロステックス)は患者用エプロンを製造・販売した初めての会社で、Crosstex™(クロステックス)の歴史もここから始まりました。半世紀以上にわたりCrosstex™(クロステックス)の患者用エプロンは世界中の患者用エプロン品質の基準となっています。



エプロン プロフェッショナル

- ・水溶液がまっすぐ下に落ちないように工夫された押し型加工が施されているため、患者さんの衣服を濡らすリスクが少なくなっています。
- ・エプロン上部の密度が高い特殊な補強押し型はエプロンの強度を増し、クリップを装着しやすくなっています。
- ・ペーパー素材とポリ素材が高密着しているため、剥がれにくいです。
- ・下部の密着度が高い特殊な補強押し型はエプロンの強度を増し、且つ流れ落ちる水溶液を止める役割も果たしています。
- ・サイズ：48×33cm
- ・水平押し型パターン

CTX エプロン プロフェッショナル 3層 500入

パートコード	内容	カラー	標準価格
WTXQA	3層	■ アクア	6,600 円
WTXDR	3層	■ ローズ	6,600 円

Chain-Free Towels

患者用チェーンフリーエプロン サニタブ(Sani-Tab™)

“汚れたエプロンクリップは感染の原因になります!”

エプロンクリップやチェーンは、患者さんの皮膚からの微生物や唾液、プラーク等の飛散する微生物が付着し、しばしば治療中の感染原因にもなっています。患者用チェーンフリーエプロン サニタブ(Sani-Tab™)は、粘着タブ(米国特許取得済)が付いたクリップやチェーン不要の患者さん用ディスポエプロンで、感染を予防してくれます。



粘着タブで
チェーンやクリップ不要!!

患者用チェーンフリーエプロン
サニタブ(Sani-Tab™)

- ・粘着タブは、親指で軽く押しつけるだけで、患者さんの衣服にくっつき、使いやすいです。
- ・クリップやチェーンが必要なタイプと異なり患者さんの衣服のどの場所にもくっつけることができます。
- ・クリップ併用後の消毒や滅菌作業が不要です。
- ・サイズ：48×33cm
- ・水平押し型パターン

CTX チェーンフリーエプロン サニタブ 400入

パートコード	内容	カラー	標準価格
WEXBLT	2層	■ ブルー	8,800 円
WEXLVT	2層	■ ラベンダー	8,800 円
WPXBLT	3層	■ ブルー	8,800 円

エプロンディスペンサー

Towel Dispenser



エプロンディスペンサー

- ・色：透明
- ・サイズ：13×15×18cm
- ・収納可能エプロンサイズ：48×33cm

CTX エプロンディスペンサー

パートコード	標準価格
PTC	7,000 円

Headrest Cover

ヘッドレストカバー

ヘッドレストカバーは交差汚染を防ぎ、患者さんの快適性を高めます。
不織布、ポリコートのオプションを揃え、サイズやカラーのバリエーションをご用意しています。



不織布ヘッドレストカバー



- ・通気性のいい、やわらか不織布素材です。
- ・装着時に不快なガサガサ音はありません。
- ・患者さんに快適感を与えます。

CTX ヘッドレストカバー 不織布 500入

パートコード	サイズ	カラー	標準価格
L0C	S 25×25cm	□ ホワイト	8,800 円
L3C	L 25×33cm	□ ホワイト	9,900 円



ポリコート ヘッドレストカバー



- ・外面フェイシャルティッシュ、内面ポリコートの防水ヘッドレストカバーです。
- ・吸水性が高く、破れにくいヘッドレストカバーです。

CTX ヘッドレストカバー ポリコート L 500入

パートコード	サイズ	カラー	標準価格
L3BL	25×33cm	■ ブルー	9,900 円
L3DR	25×33cm	■ ローズ	9,900 円
L3GR	25×33cm	■ グリーン	9,900 円
L3LV	25×33cm	■ ラベンダー	9,900 円
L3WH	25×33cm	□ ホワイト	9,900 円

Comfort Cushions

快適クッション

フィルム／デジタル・レントゲン撮影作業中に発生する感染を予防し、患者さんの不快感を和らげるイメージング・クッションシリーズです。



バイトウィング・イーズ


LATEX

- ・継ぎ目なし透明バリアスリーブとクッションが一体化になっています。
- ・センサーがぴったり入り、バイトタブを作るホルダー付きです。
- ・センサーのポジショニングが簡単で、精密な映像が得られます。
- ・RinnタイプXCPフィルムホルダーにも使用が可能です。

※センサーは含まれません。

CTX バイトウィングイーズ 50入


パートコード	サイズ	カラー	標準価格
BWEL-HF	L (Size 2センサー対応)	ブルー	8,500 円

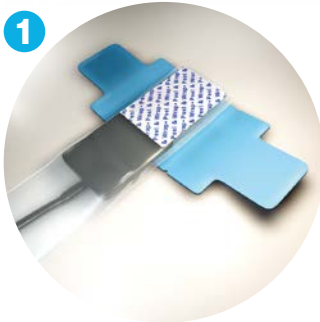


1 イメージ面を上にしてセンサーをスリーブ内に挿入



2 “Peel & Wrap” ライナーを剥がし、バイトタブを作るために中心で折る

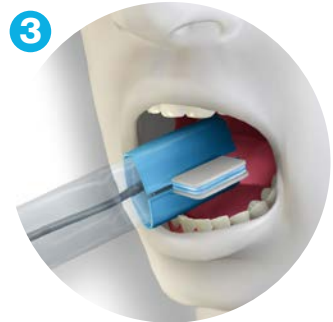

3 口腔内にて使用後は破棄する

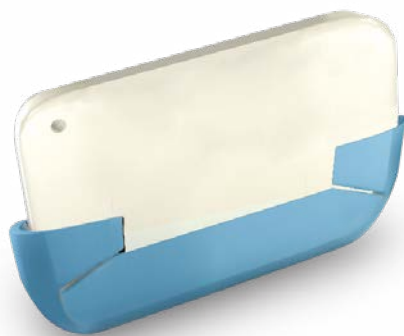

エッジイーズ


LATEX

- ・X線フィルムやセンサーのエッジからの患者さんの不快感を和らげます。
- ・患者さんが強く噛まれても、精密なX線投影結果が得られます。
- ・デンタルポケット、イメージングプレート、デジタルセンサー用バリアスリーブに簡単に取り付けられます。


※フィルムは含まれません。

CTX エッジイーズ 300入

パートコード	サイズ	カラー	標準価格
BWEEW-HF	S (ショートエッジSize 1-2フィルム／0-1センサー対応)	□ ホワイト	8,500 円
BWEEB-HF	L (ロングエッジSize 2フィルム／センサー対応)	■ ブルー	11,000 円

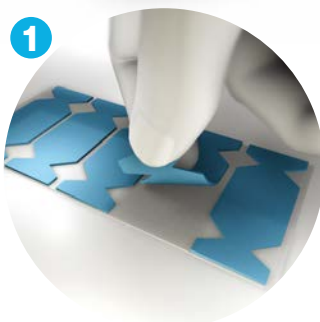

1 エッジイーズ快適クッションを台紙から剥がす

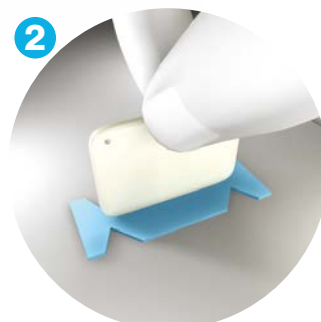

2 快適クッションをフィルムの中央またはバリアのセンサーの周りに置きます。



3 角を内側に折りたたみ撮影します。

Bracket Tray Cover

ブラケットトレーカバー

ブラケットトレーカバーは、独自の厚手の紙で作られており、水分の浸透を防ぎ、トレーへの浸透を最小限に抑えます。処置内容や担当者毎に分けられるよう豊富なカラーバリエーションをご用意しています。



ブラケットトレーカバー



- ・特殊なヘビーウェイト・ペーパーで作られています。
- ・水分が流れにくくなっています。
- ・水分の浸透性は極めて低いです。

CTX ブラケットトレーカバー 1000入			
パートコード	サイズ	カラー	標準価格
FBAQ-HF	22×31cm	■ アクア	7,600 円
FBBL-HF	22×31cm	■ ブルー	7,600 円
FBDR-HF	22×31cm	■ ローズ	7,600 円
FBGR-HF	22×31cm	■ グリーン	7,600 円
FBLV-HF	22×31cm	■ ラベンダー	7,600 円
FBPE-HF	22×31cm	■ ピーチ	7,600 円
FBWH-HF	22×31cm	□ ホワイト	7,600 円
FBYE-HF	22×31cm	■ イエロー	7,600 円



Crosstex™(クロステックス)製品のパートコード・製品名表記について

- マスクや滅菌バッグなどCrosstex™(クロステックス)製品をご購入いただく際のパートコード(製品コード)には、多くの場合は末尾に『**-HF**』という文字が付いてある製品がございます。しかしながら、箱などの製品の外装にはこちらの『**-HF**』は記載されておりません。(一部のパートコードには『**-HF**』が付いてない製品もございます)
尚、『**-HF**』の記載の有無で製品の違いはございません。
ご注文の際には、本カタログ等をご確認の上、『**-HF**』の有無をご確認いただけますようお願いいたします。
- 製品名には、あたまたにクロステックスを意味する『**CTX**』が付いています。

Barrier Film

バリアフィルム

バリアフィルムは、約5mmの非粘着性フィンガーリフトエッジを備えているため、素早く簡単に設置・取り外しできます。軽度の粘着力を持つため、表面に簡単に貼り付けることができ、跡が残りません。バリアフィルムは、手が届きにくい場所や、清掃・消毒が難しい場所に最適です。



バリアフィルム



- ・取りつけ／取り外し作業が簡単にできるよう、ロールの両サイド約5mmは不粘着（フィンガー・リフトエッジ）になっています。
- ・オートクレーブ、ケミクレーブ、ガス滅菌の施しづらい器具、箇所を感染から保護してくれます。
- ・グローブを装着したままでも手軽に取りつけ、取り外しができます。

CTX バリアフィルム 1200入

パートコード	サイズ	カラー	標準価格
BFBL-HF	10×15cm/シート	■ ブルー	5,800 円
BFCL-HF	10×15cm/シート	□ クリア	5,800 円

Syringe Sleeves

シリンジスリーブ

透明なプラスチック製のシリンジスリーブは、スリーウェイシリンジ、ハンドピースに簡単に装着できます。空気中のエアロゾルや体液による交差汚染のリスクを軽減します。



シリンジスリーブ



- ・スリーウェイシリンジ、ハンドピースを簡単にカバーできる透明プラスチック・スリーブです。
- ・飛散水溶液からの感染リスクを軽減してくれます。
- ・簡単に挿入できるようにスリーブ先端部にカット（穴）があるタイプです。

CTX シリンジスリーブ カット有 500入

パートコード	サイズ	カット	カラー	標準価格
BCSSO-HF	6×25cm	カット有	□ クリア	2,800 円

**Crosstex™
CSR
Sterilization
Wrap**

滅菌ラップ

Crosstex™製滅菌ラップは、石油由来ではなく木材パルプ由来の環境に優しいセルロース素材で製造されており、プラスチック製ラップに特有の油性残留物による皮膚への刺激を除去します。このラップは、空気中および水中の汚染物質に対するバクテリアバリアとして機能します。



滅菌ラップ



- ・風呂敷タイプの正方形滅菌ラップです。
- ・高レベルのバクテリア捕集（遮断）（BFE）が可能です。
- ・高レベルの浸透性です。（湿布ではありません）
- ・空中飛散バクテリア、飛沫水溶液からの感染を防御します。
- ・防水性、防アルコール性、防ヨード性が非常に優れています。
- ・オートクレーブ滅菌、ガス滅菌、ガンマー放射滅菌、E-beam滅菌に使用できます。
- ・小さいピンホールや破れが簡単に目視できます。
- ・湿気、乾燥による伸び、縮みはありません。

CTX CSRステリラップ


パートコード	サイズ	入数	標準価格
SW12-HF	300×300mm	100入	2,400 円
SW15-HF	380×380mm	100入	3,200 円
SW18-HF	460×460mm	100入	3,900 円
SW20-HF	510×510mm	100入	5,500 円
SW24-HF	610×610mm	100入	7,000 円
SW30	760×760mm	250入	24,000 円

非石油製品です！

木製パルプから作られた人体に優しいセルロース製品です。
皮膚過敏症の方が触れられても大丈夫です。

包装方法

インスツルメントセットは、標準手順に従い、連続折り（下図参照）で二重に包装してください。
最適なバクテリアバリア効率と使用時の無菌開封を確保するため、二重の連続折りを推奨します。

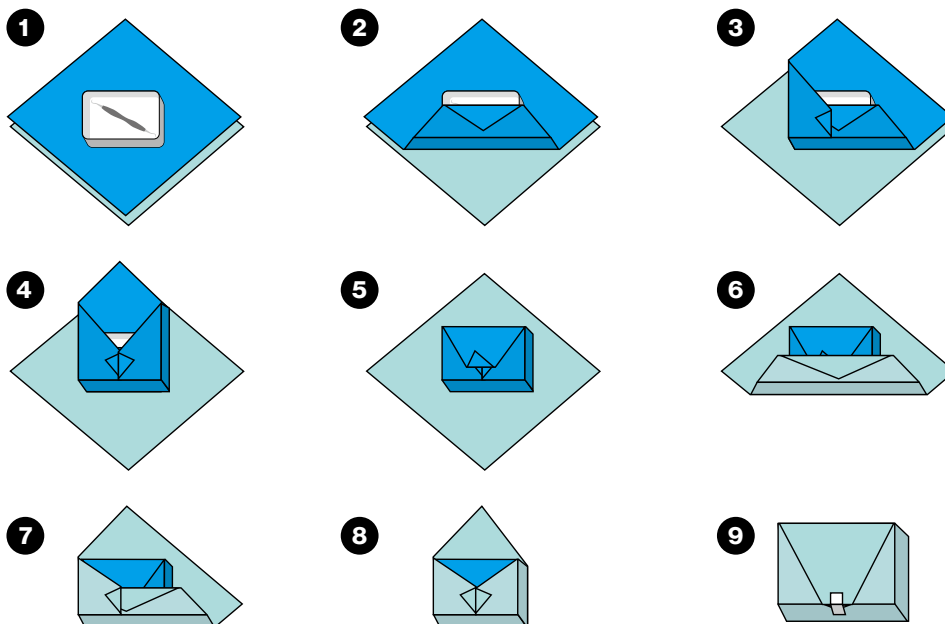

Sure-Check™ Self-Seal Sterilization Pouches

シュア・チェック 滅菌パウチ

100%滅菌完了を100%確認できるISO規格、CDC基準 Class4滅菌パウチです。

パウチ外部／内部に多様性カラーインジケーターが施されています。

ISO規格、CDC(疾病予防管理センター)は滅菌完了確実条件として、3項目の判定基準を明確にするようガイダンスしています。
すなわち、時間、温度、パウチ内に充満した高圧蒸気存在です。シュア・チェック 滅菌パウチはこの条件を満たしています。

※意匠登録申請中



シュア・チェック 滅菌パウチ



・高レベル滅菌完了判定：Class4パウチ内部／外部カラーインジケーターによる滅菌完了条件は3項目の全ての判定基準、時間、温度、パウチ内に充満した高圧蒸気存在を確認後にカラーインジケーターの色が変わります。

・操作の簡便性：滅菌完了Class4カラーインジケーター判定ストリップなどを別途使用する必要もありません。

・CDCガイダンス：

CDCの殺菌／滅菌ガイダンスに合致しています。

・ISO11140／11607規格：

滅菌パウチISO11140／11607規格に合致しています。

・ANSI／AAM ST79：

ANSI／AAM ST79包括ガイダンスに合致しています。

・公的研究機関で試験／承認がされています。

・デュオ・チェック滅菌パウチのより優れたバージョンです。

CTX シュア・チェック 滅菌パウチ

パートコード	サイズ	入数	標準価格
SCXX2-HF	60×100mm	200入	1,700円
SCX2-HF	70×230mm	200入	2,100円
SCXS2-HF	90×130mm	200入	2,300円
SCS2-HF	90×230mm	200入	2,600円
SCM2-HF	130×250mm	200入	3,400円
SCL2-HF	190×330mm	200入	6,400円
SCL12182-HF	300×460mm	100入	7,800円

Duo-Check™ Self-Seal Sterilization Pouches

デュオ・チェック 滅菌パウチ

1 ヘビーシール

インスツルメントが抜け落ちないよう山型シールがパウチ内下部に付け加えられています。

2 医療用グレード・ペーパー

医療用ペーパー基準に合致する、湿気に強い医療用グレード・ペーパーを使用しています。

3 透明フィルム

内部カラーインジケーター、パウチ内器具が鮮明に見える透明フィルムを使用しています。

4 幅広・粘着密封セルフ・シール

完全滅菌ができるよう、操作し易い幅広の完全密封シールです。

5 ミシン目付・折り目ライン

(粘着密封セルフ・シール部)
パウチ内に空気が入らず、キッチリと密封しやすいように折り目ラインにはミシン目が施されています。
粘着テープカバーを取り除く前に、ミシン目を予め折っておいてください。

6 フィルムとペーパーの分離

パウチ開封時はフィルムとペーパーが完全分離しますので、滅菌済みインスツルメントが外側フィルム、ペーパーに触れ汚染されることはありません。

7 サム・ノッチ

パウチ上部中央に施されているサム・ノッチ(ペーパー部カット部分)から簡単にフィルム／ペーパーを分離することができます。

8 上部コーナー・タック

滅菌後、フィルム／ペーパーを分離し易いよう、滅菌パウチ(滅菌済みインスツルメント内蔵)を保管し易いよう、コーナー・タックが施されています。

9 カラーインジケーターについて

滅菌パウチ内部／外部に施されているピンク色／ブルー色のカラーインジケーターは、ピンク色が薄い茶色に変われば滅菌完了です(オートクレーブ滅菌)。ブルー色が濃い茶色に変われば滅菌完了です(ガス滅菌)。

オートクレーブ滅菌、ガス滅菌対応



デュオ・チェック 滅菌パウチ



CTX デュオ・チェック 滅菌パウチ

パートコード	サイズ	入数	標準価格
SCZ-HF	50×200mm	200入	2,400円
SCXX-HF	60×100mm	200入	1,700円
SCX-HF	70×230mm	200入	2,100円
SCXS-HF	90×130mm	200入	2,300円
SCS-HF	90×230mm	200入	2,600円
SCM-HF	130×250mm	200入	3,400円
SCL-HF	190×330mm	200入	6,400円
SCL1015-HF	250×380mm	100入	5,900円
SCL1218-HF	300×460mm	100入	7,800円

ヒューフレディグループ クロステックス製品一覧／注文書

Index & Order Form

※標準価格は全て税抜価格です

商品名				パートコード	標準価格 (円)	数量
CTX マスク	LV3	ウルトラ SF ブルー	50入	GCFCXUSF-HF	3,400	
		ウルトラセンシティブ SF ホワイト	50入	GCFCXSSF-HF	3,400	
		ウルトラセンシティブフォグフリー SF	40入	GCFCXSFSF-HF	3,400	
		ウルトラセンシティブ ホワイト	50入	GCFCXS-HF	3,400	
		ウルトラ フォグフリー ブルー	40入	GCFCX-HF	3,000	
	LV2	プロシーデュラル SF ブルー	50入	GCPBLSF-HF	1,800	
		プロシーデュラル	ブルー 50入	GCPBL-HF	1,800	
		プロシーデュラル	ピンク 50入	GCPPK-HF	1,800	
	LV1	アイソフルード SF	ブルー 50入	GCIBLSF-HF	1,800	
			ピンク 50入	GCIPKSF-HF	1,800	
		アイソフルード プラス	ブルー 50入	GPLUSBL-HF	1,800	
			ピンク 50入	GPLUSPK-HF	1,800	
		アイソフルード フォグフリー ブルー	40入	GCICXB-HF	1,700	
				ブルー 50入	GCIBL-HF	1,800
		アイソフルード	グリーン 50入	GCIGR-HF	1,800	
				ピンク 50入	GCIPK-HF	1,800
CTX エブロン プロフェッショナル	3層	アクア	500入	WTXAQ	6,600	
ローズ		500入	WTXDR	6,600		
CTX チェーン フリーエブロン	サニタブ 2層	ブルー	400入	WEXBLT	8,800	
		ラベンダー	400入	WEXLVT	8,800	
	サニタブ 3層	ブルー	400入	WPXBLT	8,800	
CTX エブロン ディスペンサー				PTC	7,000	
CTX ヘッド レスト カバー	不織布	S ホワイト	500入	L0C	8,800	
		L ホワイト	500入	L3C	9,900	
	ポリコート	L ブルー	500入	L3BL	9,900	
		L ローズ	500入	L3DR	9,900	
		L グリーン	500入	L3GR	9,900	
		L ラベンダー	500入	L3LV	9,900	
		L ホワイト	500入	L3WH	9,900	
CTX バイトウィング イーズ		L ブルー	50入	BWEL-HF	8,500	
CTX エッジ イーズ	S ホワイト	300入	BWEEW-HF	8,500		
	L ブルー	300入	BWEEB-HF	11,000		
CTX ブラケット トレーカバー	アクア	1000入	FBAQ-HF	7,600		
	ブルー	1000入	FBBL-HF	7,600		
	ローズ	1000入	FBDR-HF	7,600		
	グリーン	1000入	FBGR-HF	7,600		
	ラベンダー	1000入	FBLV-HF	7,600		
	ピーチ	1000入	FBPE-HF	7,600		
	ホワイト	1000入	FBWH-HF	7,600		
	イエロー	1000入	FBYE-HF	7,600		

商品名			パートコード	標準価格 (円)	数量
CTX バリアフィルム	ブルー	1200入	BFBL-HF	5,800	
	クリア	1200入	BFCL-HF	5,800	
CTX シリンジスリーブ		カット有 クリア	500入	BCSSO-HF	2,800
CTX CSRステリ ラップ	300×300mm	100入	SW12-HF	2,400	
	380×380mm	100入	SW15-HF	3,200	
	460×460mm	100入	SW18-HF	3,900	
	510×510mm	100入	SW20-HF	5,500	
	610×610mm	100入	SW24-HF	7,000	
CTX シュア・チェック 滅菌パウチ	760×760mm	250入	SW30	24,000	
	60×100mm	200入	SCXX2-HF	1,700	
	70×230mm	200入	SCX2-HF	2,100	
	90×130mm	200入	SCXS2-HF	2,300	
	90×230mm	200入	SCS2-HF	2,600	
	130×250mm	200入	SCM2-HF	3,400	
	190×330mm	200入	SCL2-HF	6,400	
	300×460mm	100入	SCL12182-HF	7,800	
CTX デュオ・チェック 滅菌パウチ	50×200mm	200入	SCZ-HF	2,400	
	60×100mm	200入	SCXX-HF	1,700	
	70×230mm	200入	SCX-HF	2,100	
	90×130mm	200入	SCXS-HF	2,300	
	90×230mm	200入	SCS-HF	2,600	
	130×250mm	200入	SCM-HF	3,400	
	190×330mm	200入	SCL-HF	6,400	
	250×380mm	100入	SCL1015-HF	5,900	
	300×460mm	100入	SCL1218-HF	7,800	

クロステックス製品の発注方法

クロステックス製品は、歯科器材販売店様を通じて購入いただけます。
ご注文は、お出入りの歯科器材販売店様へお願いします。

【製造販売元・製品に関するお問い合わせ先】
ヒューフレディ・ジャパン合同会社 **Hu-Friedy.co.jp**
〒101-0021 東京都千代田区外神田6-13-10 プロステック秋葉原6F
Tel 03-4550-0660 【受付時間】 9:00～17:00 (土・日・祝祭日を除く)

【製造元】 **Crosstex International, Inc.**

掲載商品の標準価格には消費税等は含まれておりません。標準価格は、2025年6月23日現在のものです。
仕様および外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。記載されている寸法は特定の記載が無い限り、作業部の幅および径、または全長を示した公称値になります。

©2025 Hu-Friedy Japan LLC. All rights reserved. HF-456J/2508
All company and product names are trademarks of Hu-Friedy Mfg. Co. LLC its affiliates or related companies, unless otherwise noted. Marks not registered in all jurisdictions. Hu-Friedy Mfg. Co., LLC. reserves the right to change features, products, images and text at any time without notice.

クロステックス製品の発注方法

クロステックス製品は、歯科器材販売店様を通じて購入いただけます。
ご注文は、お出入りの歯科器材販売店様へお願いします。

【製造販売元・製品に関するお問い合わせ先】

ヒューフレディ・ジャパン合同会社 **Hu-Friedy.co.jp**

〒101-0021 東京都千代田区外神田6-13-10 プロステック秋葉原6F

Tel 03-4550-0660 【受付時間】9:00～17:00(土・日・祝祭日を除く)

【製造元】 **Crosstex International, Inc.**

掲載商品の標準価格には消費税等は含まれておりません。標準価格は、2025年6月23日現在のものです。
仕様および外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。記載されている寸法は特定の記載が無い限り
作業部の幅および径、または全長を示した公称値になります。

©2025 Hu-Friedy Japan LLC. All rights reserved. HF-456/J/2508
All company and product names are trademarks of Hu-Friedy Mfg. Co., LLC its affiliates or related companies, unless
otherwise noted. Marks not registered in all jurisdictions. Hu-Friedy Mfg. Co., LLC. reserves the right to change features of
products, images and text at any time without notice.

■ 歯科医院名	【歯科商店名】
■ お名前	
■ ご住所 〒 -	
TEL - -	