

# ヒューフレディ 矯正キャンペーン!

対象期間: 2025. 10/21(火) ▶ 12/19(金)

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。  
日頃のご愛顧に感謝し、矯正製品のキャンペーンを開催いたします。  
この期間中は、対象製品を**特別価格**にてご提供いたします。  
是非ご活用ください。

ワイヤー  
ベンディング  
コンテスト  
開催決定!!

※詳細は裏面をご覧ください

製品  
の  
特  
徴

## Production of Precision 厳密な生産

ひとつの製品を仕上げる為、ヒューフレディグループ製矯正製品は30種類以上の工程が施されます。

## Immunity Steel™ Alloy イミュニティスチール

ヒューフレディグループが独自の製法で開発したイミュニティスチールは、クロムとカーボンを主成分とする合金の鍛造仕上げなので耐久性が強く、オートクレーブにも対応しています。

## Orbit Joint オービットジョイント

刃の先端のズレやジョイントのがたつきがなく、スムーズなカットングアクションが持続する特殊製法です。※定期的にジョイント部に潤滑剤を挿してください。

【製造販売元・製品に関するお問い合わせ先】

ヒューフレディ・ジャパン合同会社 [Hu-Friedy.co.jp](http://Hu-Friedy.co.jp)

〒101-0021 東京都千代田区外神田6-13-10 プロステック秋葉原6F

Tel 03-4550-0660 【受付時間】 9:00~17:00(土・日・祝祭日を除く)

【製造元】 Hu-Friedy Mfg. Co., LLC

※上記製品左から678-702、678-500、678-800、678-502

掲載製品 ● カッター ● ユーティリティプライヤー ● ワイヤーフォーミングプライヤー ● クリアコレクション

カッター




スリム

スリムマイクロカッター ★

678-500 25,200円

くりぬかれた形状のヘッドは従来品(678-110)と比べ13%スリムになり、より容易にエラスティック除去が可能。  
【切断許容径】.008"-.012"

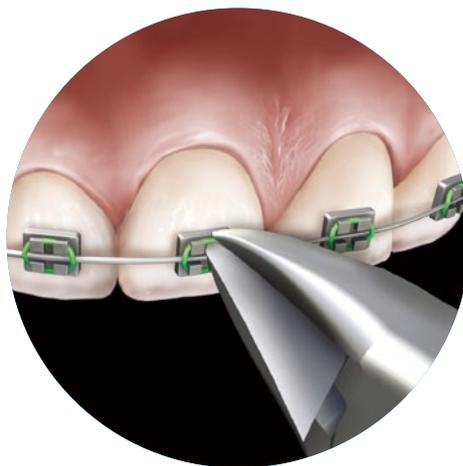

エラスティック切断の唇側面観

オービットジョイントにより  
カッターの刃先がしっかりと合い、  
ジョイント誤差を抑え  
高い機能性とスムーズな  
開閉動作が持続します。



マイクロカッター

678-110 25,200円

コンパクトな作業部が特徴  
【切断許容径】-.012"



ハードワイヤーカッター 15°

678-103 25,200円

オフセット15°で届きにくい部位  
でも容易に切断が可能  
【切断許容径】-.022" x .028"



マイクロミニピン&  
リガチャーカッター 15°

678-109 25,200円

オフセット15°スリムカッター  
【切断許容径】-.012"



マイクロミニピン&  
リガチャーカッター ★

678-107 25,200円

スリムタイプで狭いエリアでの  
作業が容易  
【切断許容径】-.012"

マイクロミニピン&  
リガチャーカッター ロング

678-107L 25,200円

スリムタイプで狭いエリアでの  
作業が容易  
【切断許容径】-.012"

※678-107の長ハンドルタイプです。



ミニピン&リガチャーカッター

678-106 25,200円


スリムタイプのピンカッター  
【切断許容径】-.012"



ピン&リガチャーカッター

678-105 25,200円

【切断許容径】-.015"

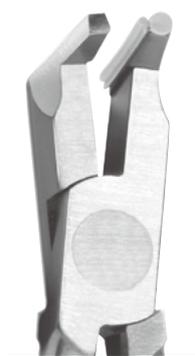


スリム



スリムディスタルエンドカッター  
フラッシュカット&ホールド

678-113 30,500円

従来品(678-111)よりヘッドが50%スリムになり、  
カットポイントが見やすく、より優れた操作性を発揮。  
切断されたワイヤーを把持するホールドタイプで、  
ロールワッテやガーゼ等を使用せずフラッシュカットが可能。  
【切断許容径】.012"-.021" x .025"  
シリコンインサート×3入  
(カッター装着分を含む)

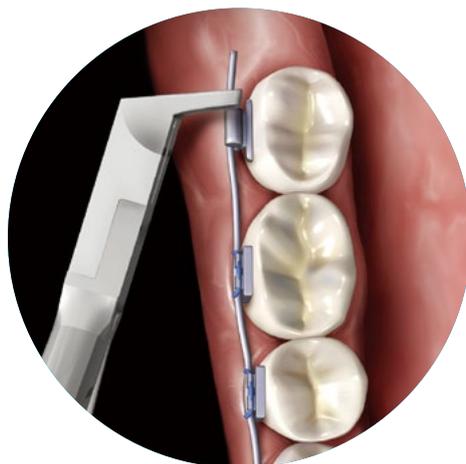

バックアルチューブ内に挿入された  
アーチワイヤーを切断している咬合面観



ディスタルエンドカッター  
フラッシュカット&ホールド

678-111 30,500円

【切断許容径】  
-.020"ホールド/- .030"切断  
シリコンインサート×3入  
(カッター装着分を含む)



ユニバーサルディスタルエンド  
カッター ホールド ★

678-101 25,200円  
【切断許容径】.012"-.021" x .025"

ユニバーサルディスタルエンド  
カッター ホールド ロング

678-101L 25,200円  
【切断許容径】.012"-.021" x .025"  
※678-101の長ハンドルタイプです。



ディスタルエンドカッター  
フラッシュカット

678-102 25,200円  
【切断許容径】-.021" x .025"

リンガル



リンガル  
ピン&リガチャーカッター

678-701 39,900円  
【切断許容径】-.012"



リガチャーワイヤーの過剰部分を  
切断している咬合面観



リンガル



リンガル  
ディスタルエンドカッター

678-700 39,900円  
【切断許容径】-.018"



リンガルチューブ遠心部に出た過剰な  
ワイヤーを切断している咬合面観



ユーティリティプライヤー

スリム

ウルTRASリムウィンガルトプライヤー ★

678-501 22,100円

従来品(678-202)と比べ20%スリムになり、ギザがついたコンパクトなヘッドが確実にワイヤーを把持。限られたスペースでも指先の延長のように操作でき、容易にアーチワイヤーをバケットチューブやブラケットスロットに通すことが可能。  
【ワイヤー使用許容径】-.030"



アーチワイヤーをブラケットスロットに挿入している頬側面観

スリムウィンガルト  
プライヤー

678-202 22,100円

20°アングル付  
【ワイヤー使用許容径】-.030"



ホーププライヤー 直

678-203 22,100円

ワイヤーやピン等の着脱に適した多目的プライヤー  
【ワイヤー使用許容径】-.030"



ホーププライヤー  
オフセット

678-204 22,100円

40°アングル付。ワイヤーやピン等の着脱に適した多目的プライヤー  
【ワイヤー使用許容径】-.030"

アドヒーシブリムービング  
プライヤー ★

678-206 22,100円

ブラケットディボンディング後の歯面に残った接着剤除去用  
プレート×1本、1/4パッド×2個、六角レンチ×1本入



スリムバンド  
リムービングプライヤー

678-503 22,100円

白歯バンド撤去用  
従来品(678-207、678-208)よりヘッドが21%スリムになり、先端によりテーパーが付き、より大白歯へ到達し易く、歯肉を傷つけにくく、患者さんに与える不快感を軽減。



バンドを除去している頬側面観



バンドリムーバー  
ロング

678-207 22,100円

白歯バンド撤去用  
交換用パッド1/4×1、  
交換用パッド3/16×1



バンドリムーバー  
ショート

678-208 22,100円

白歯バンド撤去用。ショート  
交換用パッド1/4×1、  
交換用パッド3/16×1



モジュール  
セパレーティング  
プライヤー

678-210 29,400円

歯間分離用モジュール装着用



リガチャータイピング  
プライヤー コーン

678-211 29,400円

コーンタイプ、  
リガチャーワイヤー結紮用  
【ワイヤー使用許容径】-.015"



タイピングプライヤー  
スタイナー

678-222 31,500円

スタイナータイプ、  
リガチャーワイヤー結紮用  
【ワイヤー使用許容径】-.015"



ブラケットリムーバー 直

678-219 22,100円

メタル、プラスチック、  
セラミック等すべての素材の  
ブラケットディボンディングに  
適用





**ブラケットリムーバー  
アングル**  
678-220L 22,100円  
前歯・臼歯部用ブラケット  
ディボンディングに適用



**クラウン&バンド  
カンタリングプライヤー**  
678-221 22,100円  
バンド調整用



リングガル

**リングガル ワインガルトプライヤー ★**  
678-702 36,800円  
【ワイヤー使用許容径】-.030"



アーチワイヤーを  
ブラケットスロットに  
挿入している頬側面観

**リングガル ワインガルトプライヤー 90°**  
678-702-90 36,800円  
【ワイヤー使用許容径】-.030"



リングガル

ブラケットと  
ディボンディング  
している咬合面観



リングガル

ディボンディングプライヤーの  
一方のフック型アームが舌側の  
ブラケット下部に届くようにあてます。

もう一方のくさび型チップをブラケットと  
歯面の接着境界に差し込むようにしながら、  
タイウィングの下にアームのフックをひっかけます。  
プライヤーを握ると、くさび型チップが  
歯牙とブラケットの接着境界に挿入され、  
ブラケットを剥離します。

**リングガル ブラケット  
リムービングプライヤー**  
678-703 36,800円

**リングガル ディボンディングプライヤー**  
678-709 39,900円  
スプリングの反発力を応用して、舌側矯正用  
ブラケットを最小限の力でスムーズに除去。  
患者さんの快適性を損なうことなくブラケットを  
素早くディボンディング可能。



使用方法はこちらから  
ご覧いただけます。  
(英語)

ワイヤーフォーミングプライヤー



**バードビークプライヤー**  
678-304 22,100円  
ラウンドワイヤーの  
ループ成形用  
【屈曲許容径】-.030"




**バードビークプライヤー  
カッター付 ★**  
678-325 22,100円  
ワイヤーのバンドやカットが  
一本で可能  
【屈曲許容径】-.022" x .025"



**オメガループフォーミング  
プライヤー**  
678-303 22,100円  
3段階(.045", .060", .075")の  
作業部でオメガループを正確に  
フォーミング  
【屈曲許容径】-.022" x .025"  
予備用交換用ブレード×1枚入




**ツイードループ  
フォーミングプライヤー  
ツイード**  
678-306 22,100円  
3段階(.055", .075", .090")の  
作業部で正確にフォーミング  
【屈曲許容径】-.022" x .025"

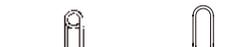

## ワイヤーフォーミングプライヤー



**アーチベンディング  
プライヤー ツイード**  
**678-307 22,100円**  
ブレード幅.050"。  
ファースト、セカンド、サード  
オーダーバンド用  
【屈曲許容径】-.022" x .025"

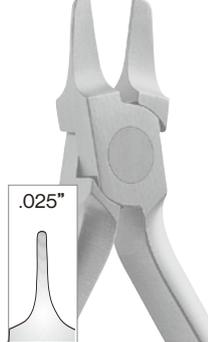

**アーチベンディング  
プライヤー ツイード  
スリムタイプ**  
**678-307S 22,100円**  
ブレード幅.025"。  
ファースト、セカンド、サード  
オーダーバンド用  
【屈曲許容径】-.022" x .025"



**レクタングュラー  
アーチベンディング  
プライヤー ツイード**  
**678-308 22,100円**  
ブレード幅.070"。  
ファースト、セカンド、サード  
オーダーバンド用  
【屈曲許容径】-.022" x .025"



**ホローチョップ  
カンタリングプライヤー**  
**678-310 22,100円**  
あらゆる種類のアーチワイヤーの  
微妙なカーブの付与が可能  
【屈曲許容径】-.030"



**アダムスプライヤー**  
**678-320 22,100円**  
アダムスクラスプの製作や  
調整に適用  
【屈曲許容径】-.040"



**NiTi用**  
**NiTiベンダー  
3プロング**  
**678-322 22,100円**  
NiTi含む全ての  
アーチワイヤーに適用  
【屈曲許容径】-.020"



**スリム**  
**NiTi用**  
**スリムハンマーヘッドNiTiプライヤー ★**  
**678-502 22,100円**  
熱処理せずにNiTiワイヤーを曲げる事が可能。  
従来品(678-327)と比べヘッドが10%スリムになり、  
更に広い視野を確保し、患者さんの不快感を軽減。  
【屈曲許容径】-.025"




図1 舌側面方向に曲げている頬側面観  
図2 ワイヤー屈曲図(P.12参照)

NiTiワイヤーを遠心から歯肉側に曲げている咬合面観  
(図1) 舌側面方向に曲げている頬側面観  
(図2) ワイヤー屈曲図(P.12参照)



**NiTi用**  
**ハンマーヘッド  
NiTiベンダー**  
**678-327 22,100円**  
NiTiワイヤー加熱なしで  
バンド可能  
左右のシンチバック適用  
【屈曲許容径】-.025"




A. NiTiワイヤーを遠心から  
歯肉側に曲げている咬合面観




B. 舌側面方向に曲げている頬側面観



**リングル**  
**NiTi用**  
**678-704**  
**678-704SER**

リングル ハンマーヘッドNiTiプライヤー  
**678-704 36,800円**  
【屈曲許容径】-.025"

リングル ハンマーヘッドNiTiプライヤー  
ギザ付  
**678-704SER 36,800円**  
【屈曲許容径】-.025"



リングルチューブ遠心から  
出たNiTiワイヤーを  
曲げている咬合面観



**トーキングプライヤー  
020キー付(.016" x .018")**  
**678-328-20 22,100円**  
【屈曲許容径】-.018"  
キー×1本入

**トーキングプライヤー  
021キー付(.018" x .022")**  
**678-328-21 22,100円**  
【屈曲許容径】-.022"  
キー×1本入



**IMS潤滑スプレー  
236ml**  
**ILS 3,200円**  
ヒンジ部の動きを  
スムーズにします。

クリアコレクション (アライナー矯正用インスツルメント)



**クリアコレクション  
ティアドロッププライヤー ★**  
**678-800 25,200円**  
CPAの辺縁に使用することで、  
エラストックをかける際の  
涙滴状ホールをあけることができます。  
このホールを付与することにより、  
患者さん自身でエラストックを  
より簡単に交換することができます。



**クリアコレクション  
ホールパンチプライヤー ★**  
**678-803 25,200円**  
CPAの辺縁に半月型のくりぬきを作り、  
リングボタンやブラケットなどを併用する際の  
接着位置を確保します。  
また、装着時に歯肉にあたる部分のトリミングに  
使用することも可能です。



**クリアコレクション  
ペティートパンチプライヤー**  
**678-805 25,200円**  
エラストックをかけるためのリングボタンの  
接着位置を確保するために、アライナーの辺縁部に  
直径4.5mmの半月状のスペース(くりぬき)を  
作るためのインスツルメントです。



**クリアコレクション  
スポットプライヤー**  
**678-804 25,200円**  
小さな個々の歯牙の移動やアライナーの  
保持力を高める点接触を作成するための、  
ごく小さな丸いくぼみを付与します。



**クリアコレクション  
バーティカルプライヤー ★**  
**678-801 25,200円**  
CPAのそれぞれの歯牙に対して、頬側・  
舌側の近心・遠心に垂直的なくぼみを付与します。  
このくぼみによりローテーションコントロールを  
促進します。



**クリアコレクション  
ホリゾンタルプライヤー ★**  
**678-802 25,200円**  
CPAのそれぞれの歯牙に対して、頬側・  
舌側の辺縁に水平的なくぼみを付与します。  
このくぼみによりトルクコントロールを促進します。



**クリアコレクション  
クロックワイズウェッジプライヤー**  
**678-808 25,200円**  
特定の歯牙に対して頬側面とその反対側の舌側面の  
隅角で、アライナーに楔形のくぼみを作ることにより、  
回転応力を生じさせるために使用されるインスツルメントです。  
時計回りに回転させる際に使用されます。



**クリアコレクション  
カンタークロックワイズウェッジプライヤー**  
**678-807 25,200円**  
特定の歯牙に対して頬側面とその反対側の舌側面の  
隅角で、アライナーに楔形のくぼみを作ることにより、  
回転応力を生じさせるために使用されるインスツルメントです。  
半時計回りに回転させる際に使用されます。



**クリアコレクション  
イレイサープライヤー**  
**678-811 25,200円**  
CPA用プライヤーやその他のインスツルメントにより  
付与された不要なくぼみを元に戻す、または取り除く  
ために設計されています。

商品名	パートコード	標準価格(円)	数量
カッター	スリムマイクロカッター	678-500	25,200
	マイクロカッター	678-110	25,200
	ハードワイヤーカッター 15°	678-103	25,200
	マイクロミニピン&リガチャーカッター 15°	678-109	25,200
	マイクロミニピン&リガチャーカッター	678-107	25,200
	マイクロミニピン&リガチャーカッター ロング	678-107L	25,200
	ミニピン&リガチャーカッター	678-106	25,200
	ピン&リガチャーカッター	678-105	25,200
	スリムディスタルエンドカッターフラッシュカット&ホールド	678-113	30,500
	ディスタルエンドカッターフラッシュカット&ホールド	678-111	30,500
	ユニバーサルディスタルエンドカッター ホールド	678-101	25,200
	ユニバーサルディスタルエンドカッター ホールドロング	678-101L	25,200
	ディスタルエンドカッターフラッシュカット	678-102	25,200
	リングルピン&リガチャーカッター	678-701	39,900
	リングルディスタルエンドカッター	678-700	39,900
	ユーティリティワイヤー	ウルTRASリムワインガルトブライヤー	678-501
スリムワインガルトブライヤー		678-202	22,100
ホーブライヤー直		678-203	22,100
ホーブライヤー オフセット		678-204	22,100
アドヒーズプリムーピングブライヤー		678-206	22,100
スリムバンドリムーピングブライヤー		678-503	22,100
バンドリムーパー ロング		678-207	22,100
バンドリムーパー ショート		678-208	22,100
モジュールセパレーティングブライヤー		678-210	29,400
リガチャータイピングブライヤー コーン		678-211	29,400
タイピングブライヤー スタイナー		678-222	31,500
ブラケットリムーパー直		678-219	22,100
ブラケットリムーパー アンブル		678-220L	22,100
クラウン&バンドカンタリングブライヤー		678-221	22,100
リングルワインガルトブライヤー		678-702	36,800
リングルワインガルトブライヤー 90°		678-702-90	36,800
リングル ブラケットリムーピングブライヤー		678-703	36,800
リングル ディボンディングブライヤー		678-709	39,900

商品名	パートコード	標準価格(円)	数量
ワイヤーフォーミングブライヤー	バードビークブライヤー	678-304	22,100
	バードビークブライヤー カッター付	678-325	22,100
	オメガグループフォーミングブライヤー	678-303	22,100
	ツイードループフォーミングブライヤーツイード	678-306	22,100
	アーチベンディングブライヤーツイード	678-307	22,100
	アーチベンディングブライヤーツイードスリムタイプ	678-307S	22,100
	レクタングルアーチベンディングブライヤーツイード	678-308	22,100
	ホローチョップカンタリングブライヤー	678-310	22,100
	アダムスブライヤー	678-320	22,100
	NiTiベンダー 3プロング	678-322	22,100
	スリムハンマーヘッドNiTiブライヤー	678-502	22,100
	ハンマーヘッドNiTiベンダー	678-327	22,100
	リングルハンマーヘッドNiTiブライヤー	678-704	36,800
	リングルハンマーヘッドNiTiブライヤーギザ付	678-704SER	36,800
クリアコレクション	トーキングブライヤー 020 キー付 (.018 x .018)	678-328-20	22,100
	トーキングブライヤー 021 キー付 (.018 x .022)	678-328-21	22,100
	IMS潤滑スプレー 236ml	ILS	3,200
	ティアドロップブライヤー	678-800	25,200
	ホールパンチブライヤー	678-803	25,200
	ペティートパンチブライヤー	678-805	25,200
	スポットブライヤー	678-804	25,200
	パーティカルブライヤー	678-801	25,200
	ホリゾンタルブライヤー	678-802	25,200
	クロックワイズウェッジブライヤー	678-808	25,200
カンタークロックワイズウェッジブライヤー	678-807	25,200	
イレイサーブライヤー	678-811	25,200	

現在一部の製品につきましては、ご注文を多くいただいているため、お届けまで時間を要する製品もございます。在庫状況は流動的になりますので予めご了承ください。キャンペーンを実施していない地域がございます。予めご了承ください。掲載商品の標準価格は2025年10月21日現在のものです。標準価格には消費税等は含まれておりません。

こちらの注文書に記載のない製品・規格はセール対象外となります。価格のお問い合わせについては、お出りの歯科商店までお願いします。仕様および外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。記載されている寸法は特定の記載が無い限り作業部の幅および径、または全長を示した公称値になります。ヒューフレディグループ製品は職人の手によって最終仕上げを行っているため、若干の誤差が生じることがあります。

応募についての詳細はこちらから



※過去の入賞作品

## 矯正ワイヤー ベンディングコンテスト 開催決定

1本のワイヤー(シングルワイヤー)のみを使用して  
作品を完成してください!!  
ワイヤーの材質の指定はシングルなら何でも可!!  
作品提出締切は12月19日(金)まで。

<p>■ 歯科医院名</p> <p>■ お名前</p> <p>■ ご住所 〒 -</p> <p style="text-align: center;">TEL - -</p>	<p>【歯科商店名】</p>
---	----------------