

# HuFriedyGroup Preventive Collection

ヒューフレディ 歯周治療・検査コレクション



Instrumentation and  
Procedural Products



## 掲載製品

- グレーシーキュレット
- シックスケーラー
- ユニバーサルキュレット
- インプラントスケラー チタン
- インプラケアⅡ
- カラービュープローブ
- HDミラー・ロジウムコーティングミラー
- エクスプローラー（探針）
- カラーコードプローブ
- ピンセット
- インストルメントシャープニング
  - ・サイドキック
  - ・ダイヤモンドシャープニングカード
  - ・デュアルストーン

# HARMONY™

## ハーモニー エルゴノミック スケーラー

Designed with TrueFit™ Technology

### 歯牙に加わる圧力を40.9%低減※

※ヒューフレディ社製角柄ハンドル(#2)との比較での平均値

ハーモニー エルゴノミック スケーラー及びキュレットは、スケーリング時に歯牙に加わる圧力を小さくできるため、患者様の快適さを高め、術者の疲労も軽減することができます。

表1: スケーリング時に歯牙に加わった圧力の平均値

| ハンドルの種類      | ピーク圧時点の平均値 (N) | ハーモニー エルゴノミック スケーラーハンドルとの差 (増分) |
|--------------|----------------|---------------------------------|
| ハーモニー (#XE2) | 1.20           | —                               |
| 角 柄 (#2)     | 2.03           | 40.9%                           |

### シャープさがさらに長持ち! コーティングなしの高性能!!

刃物の調査機関CATRA (Cutlery and Allied Trades Research Association) の試験※1結果において、エバーエッジ (EverEdge™) 2.0のカッティングエッジが試験用のシリコンストリップに加えた圧力は、開封時に約6ニュートン(約600g)、500回のストローク後も約7ニュートン(約700g)という結果でした。エバーエッジ (EverEdge™) 2.0のカッティングエッジが付与されたハーモニー (Harmony™) エルゴノミック スケーラーはシャープさが持続するため、軽い力で効率よくスケーリング操作ができ、術者は疲れにくく、患者様の負担も軽減されます。


※1: 測定用に調整されたシリコンストリップにブレードを反復して押し当て、ストリップを突き抜いた際の圧力を測定(加えられた圧力が低いほどブレードが鋭利なことを示し、ストロークによってブレードの鋭利さが低減すると、より多くの圧力を加える必要があるためニュートンの数値は増加する)

### あらゆる方向から確実に 素早い把持が可能

シリコングリップが従来品と比較して30%長くなり、より**確実に且つ鋭敏に把持が可能**になりました。グリップ部分の幾何学模様はあらゆる方向から把持してもしっかりと操作できるように設計されています。

※従来のIMS シグネチャーグリップはサイズが異なるためご使用いただけません。

## グレイシーキュレット/シックルスケーラー 一覧表 (作業部の材質とハンドルのご紹介)

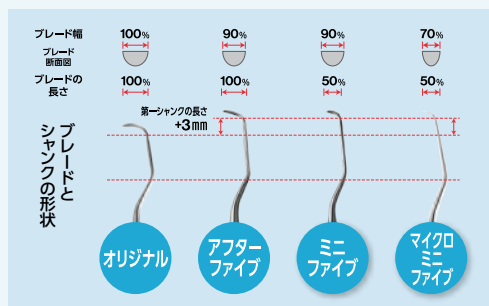

スタンダード: 細く柔軟性に富み、感触が伝わりやすい。超音波スケーリング後の仕上げとして細かなスケーリングやルートプレーニングに使用。  
リジッド: スタンダードシャンクに比べて頑丈。比較的強い歯石や多量に付着した歯石を除去する際に使用。

| 作業部の材質     |                                                                                                                                      | エバーエッジ 2.0 (EverEdge™ 2.0)                                                                                                                                  |                                                                                   |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ハンドルのオプション | ハーモニー (Harmony™) #XE2                                                                                                                | ヒューフレディ社がキュレット・スケーラーの <b>エッジのシャープさをより持続するために開発</b> した優れた合金。ステンレススチールに含まれるカーボン含有率を増加させ、冶金学に基づいた金属の結晶粒を微細にし、3段階の熱処理の温度・時間設定を改善、ブレードの表面処理を向上させ、パリの発生を抑制する合金です。 |                                                                                   |
|            | エバーエッジ (EverEdge™) #9E2                                                                                                              | 人間工学的に優れたハンドルデザイン。しっかり把持できるダイヤモンドパターン。(パープルのグリップを標準装着)                                                                                                      |                                                                                   |
| グレイシーキュレット | オリジナル<br>現在世界のグレイシーキュレットの基準となっている、グレイシー博士が考案した当初のシャンク・ブレードの長さ・幅。                                                                     | スタンダード/リジッド<br>1/2、3/4、5/6、7/8、9/10、11/12、13/14、15/16 (FIT11/12)、17/18 (FIT13/14)                                                                           | スタンダード/リジッド<br>1/2、3/4、5/6、7/8、9/10、11/12、13/14、15/16 (FIT11/12)、17/18 (FIT13/14) |
|            | アフターファイブ<br>5mm以上の深い歯周ポケットや根面に到達。オリジナルと比較し第一シャンクが3mm長く、ブレードが10%細いため、歯肉への挿入が容易で組織への負担を軽減。                                             | スタンダード/リジッド<br>1/2、3/4、5/6、7/8、11/12、13/14、15/16 (FIT11/12)                                                                                                 | スタンダード/リジッド<br>1/2、3/4、5/6、7/8、11/12、13/14、15/16 (FIT11/12)                       |
|            | ミニファイブ<br>5mm以上の深い歯周ポケットや根面に到達。ブレードはオリジナルとアフターファイブの半分の長さで、狭いポケットや根分岐部での使用に適用。オリジナルと比較し第一シャンクが3mm長く、ブレードが10%細いため、歯肉への挿入が容易で組織への負担を軽減。 | スタンダード<br>1/2、3/4、5/6、7/8、11/12、13/14、15/16 (FIT11/12)、 <b>17/18 (FIT13/14)</b><br>↑ハーモニーで新たにラインナップされました!!                                                  | スタンダード/リジッド<br>1/2、3/4、5/6、7/8、11/12、13/14、15/16 (FIT11/12)                       |
|            | マイクロミニファイブ (シャンクが細くて硬いリジッドタイプ)<br>5mm以上の深い歯周ポケットや根面に到達。シャンクとブレードの長さは、ミニファイブと同等だが、幅がオリジナルと比較し30%細いため、歯肉への挿入がさらに容易で組織への負担を軽減。          | リジッド<br>1/2、3/4、5/6、7/8、11/12、13/14、15/16 (FIT11/12)                                                                                                        | リジッド<br>1/2、3/4、5/6、7/8、11/12、13/14                                               |
|            | マイクロミニファイブ (シャンクが細くて硬いリジッドタイプ)<br>5mm以上の深い歯周ポケットや根面に到達。シャンクとブレードの長さは、ミニファイブと同等だが、幅がオリジナルと比較し30%細いため、歯肉への挿入がさらに容易で組織への負担を軽減。          | リジッド<br>1/2、7/8、11/12、13/14                                                                                                                                 | リジッド<br>1/2、7/8、11/12、13/14                                                       |
| シックル       | ネビィ                                                                                                                                  | 1、2、3、4                                                                                                                                                     | 1、2、3、4                                                                           |
|            | 衛生士用                                                                                                                                 | H5/33、H6/H7                                                                                                                                                 | H5/33、H6/H7                                                                       |
|            | 前歯用、臼歯用                                                                                                                              | 204S、204SD、モース 0/00                                                                                                                                         | 204S、204SD、モース 0/00                                                               |

## 把持力が57.3%低減※

※ヒューフレディ社製角柄ハンドル(#2)との比較での平均値

軽い力でインスツルメントを把持できるため、反復動作による手の疲労や  
手根管症候群などのリスクを軽減することができます。

表2: スケーリング時の親指・人差し指・中指の総把持力の平均値  
(歯牙に加わった圧力が最大値時)

| ハンドルの種類      | 親指、人差し指、中指の<br>総把持力の平均値 (kPa) | ハーモニー エルゴノミック<br>スケーラーハンドル<br>との差 (増分) |
|--------------|-------------------------------|----------------------------------------|
| ハーモニー (#XE2) | 29.75                         | —                                      |
| 角 柄 (#2)     | 69.69                         | 57.3%                                  |



## 重すぎず軽すぎない、 『バランスの良い』重さの ハンドル

ハーモニー エルゴノミック スケーラーのハンドルは  
エパーエッジハンドル(#9E2)と同様『バランスの良い』重量感で、  
砂時計の形状をしたハンドルは術者の手によりフィットするよう設計されています。

## 信頼感のあるメタルハンドル

耐久性が高く洗浄が容易なメタルハンドルを採用しています。  
滑りにくい2重らせんデザインのハンドルは、  
手指感覚を向上、疲労を軽減します。

## 280万を超える データを収集

(世界各国のDHの方々が参加した  
試験結果の合計)

スケーリング時の  
手の動きをデータ化して、  
より把持しやすいように  
デザインされたハンドル




シャープさがさらに長持ち!!  
コーティングなしの高性能

| イミュニティスチール (Immunity Steel™)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ヒューフレディ社で独自に開発されたカーボンとクロムを絶妙のバランスで配合した合金です。繰り返しの使用後も精密なエッジを保つことのできるステンレス鋼で、シャープニングしやすく耐腐食性に優れています。さらに3段階の熱処理が施されたインスツルメントは、硬さとしなやかさを持ちあわせています。                                                                      |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                   |
| <b>レジン8カラー (Resin 8 Colors)</b><br>#C8E2<br><br>レジン製のため軽量。使用部位ごとにハンドルの色が違うため、スケーラーの識別が容易。<br>(ハンドルと同色のグリップを標準装着)<br><b>6,300円</b> | <b>サテンスチールカラー (Satin Steel™ Colours™) #7</b><br><br>シリコン製リングの採用により、繊細な触感で把持しやすい。ウォーターウェーブデザインのすべり止め。(黒色のグリップを標準装着)<br><b>5,900円</b> | <b>サテンスチール (Satin Steel™) #6</b><br><br>力の弱い方でも力を入れずにリラックスして持つことができる太いハンドル。ウォーターウェーブデザインのすべり止め。<br><b>5,700円</b> | <b>角 柄 #2</b><br><br>8面の角形で指を固定しやすく、適度な重量感。<br><b>5,300円</b> |
| <b>スタンダード／リジッド</b><br>1/2、3/4、5/6、7/8、9/10、11/12、13/14、15/16 (FIT11/12)、17/18 (FIT13/14) ※9/10はスタンダードのみ                                                                                                             | <b>スタンダード／リジッド</b><br>1/2、3/4、5/6、7/8、9/10、11/12、13/14、15/16 (FIT11/12)、17/18 (FIT13/14)                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                   |
| <b>スタンダード／リジッド</b><br>1/2、3/4、5/6、7/8、11/12、13/14、15/16 (FIT11/12)                                                                                                                                                  | <b>スタンダード／リジッド</b><br>1/2、3/4、5/6、7/8、11/12、13/14、15/16 (FIT11/12)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                   |
| <b>スタンダード／リジッド</b><br>1/2、3/4、5/6、7/8、11/12、13/14、15/16 (FIT11/12)                                                                                                                                                  | <b>スタンダード／リジッド</b><br>1/2、3/4、5/6、7/8、11/12、13/14、15/16 (FIT11/12)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                   |
| 1、2、3、4                                                                                                                                                                                                             | 1、2                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                   |
| H5/33、H6/H7                                                                                                                                                                                                         | H5/33、H6/H7                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                   |
| 204S、204SD、モース 0/00                                                                                                                                                                                                 | 204SD                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                   |



※標準価格は全て税抜



## グレーシーキュレット

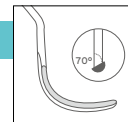

15/16 (FIT11/12)、  
17/18 (FIT13/14)は  
シャンクの角度を大きく  
しているため、対合歯に  
干渉される事なく、  
より良くフィットします。

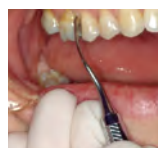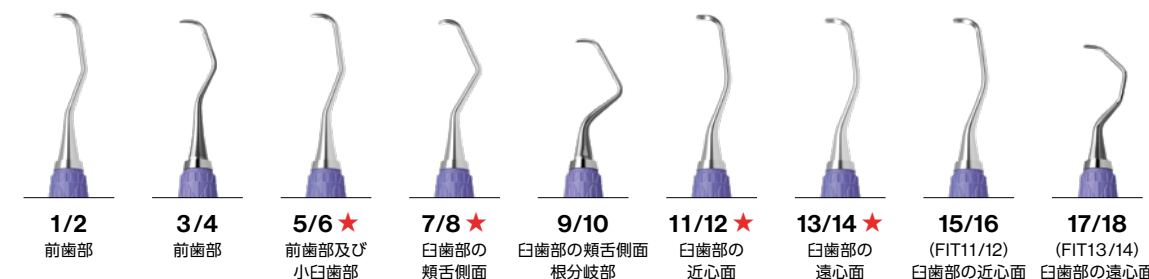

通常の11/12

通常の11/12では、  
近心面に平行に  
なるように第一  
シャンクを固定  
することが困難な  
場合があります。



15/16 (FIT11/12)

15/16 (FIT11/12)は  
シャンクの角度を  
大きく取ったことにより、  
インスツルメントの  
ポジショニングが  
容易になり、固定点も  
近くに取れます。



通常の13/14


通常の13/14では、  
遠心面への到達が  
患者様の開口度によ  
って制限される  
ことがあります。



17/18 (FIT13/14)

17/18 (FIT13/14)は  
ハンドルを咬合面と  
水平に近い角度で  
把持する事ができ、  
開口量の少ない患者様  
でも到達し難い遠心面に  
到達しやすくなります。

## シクルスケーラー

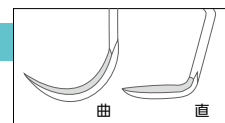

喫煙される患者さん等ステインが  
沈着しやすい方に…  
医院に1本は必需品です！



## ネビィ1(前歯用)★

コンパクトな鎌型とスプーン型の  
2種のブレード。前歯のステインや  
歯石を効率良く除去。

## ネビィ2(臼歯用)

大きな屈曲と長めのブレードで、取り残しが  
できやすい最後臼歯遠心面や歯間部への  
アクセスが容易。

## ネビィ3(臼歯用)★

コンパクトで細いブレードは狭小な歯間部に  
適用。緩やかな屈曲がついているので、特に  
臼歯部のスケーリング向き。

## ネビィ4(臼歯用)

ネビィシリーズで最大サイズ且つ硬いリジッド  
タイプのブレード。長めのブレードは歯冠形態  
に沿わせながら、近遠心面への到達が可能。



## 衛生士用 H5/H33

非常に薄い曲と直のブレードの  
コンビネーション。前歯の歯頸部や  
歯間部のスケーリングに適用。

## 衛生士用 H6/H7

超薄型コントラアングルの  
デザイン。隣接歯間部に適用。  
シャンクのアングルにより  
前歯および小臼歯に対応。

## 204S

臼歯歯肉縁上の  
隣接歯間部用。

## 204SD

コントラアングルの  
シャンクデザインにより、  
臼歯部近遠心面に適用。

## モース 0/00


叢生歯や細かい操作に  
向いている前歯部用の  
小型ブレード。

ヒューフレディで克服しよう！  
苦手シリーズもチェックしてね！  
(YouTube)

15/16 17/18 ネビィ1 ネビィ3



## ユニバーサルキュレット

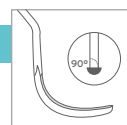

## マッコール 17/18

歯牙を包み込むようなブレードの形状。  
同じ作業部で遠心から近心まで使用可能です。



## ランガー 1/2 ★

下顎臼歯用

## ランガー 3/4

上顎臼歯用

## ランガー 5/6

前歯用

## ランガー 17/18

上下顎臼歯用

コロンビア大学型  
2R/2Lコロンビア大学型  
4R/4L

臼歯部で高度に  
沈着してしまった  
歯石の除去に特に適用。

コロンビア大学型  
13/14

浅いポケットの歯肉  
縁上・縁下の歯石除去、  
小児にも適用。

ランガー ミニファイブ  
1/2 ★

下顎臼歯用

ランガー ミニファイブ  
3/4

上顎臼歯用

ランガー ミニファイブ  
5/6

前歯用


## ランガー ミニファイブ

- 第一シャンクは通常のランガーより3mm長く、  
5mm以上の深い歯周ポケットや根面に届きやすいデザイン。
- ブレード幅が10%薄く、歯肉への挿入が容易で組織の損傷を軽減。
- ミニファイブ (Mini Five™) はブレードの長さが通常の半分のサイズで、  
狭いポケットや根分岐部に適用。

※お求めの規格のハンドルの種類は7ページの注文書をご確認ください。


## グレーシーキュレット バイオジェント

- 薄いブレードで、狭いポケットにも容易にアクセス!
- これまで以上に、組織に優しいアプローチと歯周ポケットへの良好なアクセスを提供!
- アフターファイブ、ミニファイブ、マイクロミニファイブのコンセプトをバランス良く調和!
- 歯周治療の世界的名医 コーテリーニ先生ご考案!

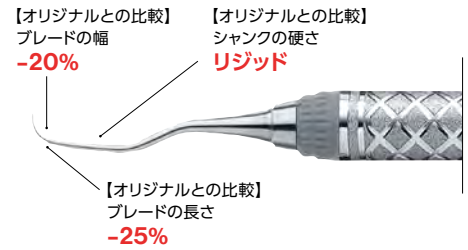

※グレーシーキュレット バイオジェントのハンドルはエバーエッジ(#9E2)のみになります。

## インプラントスケーラー チタン

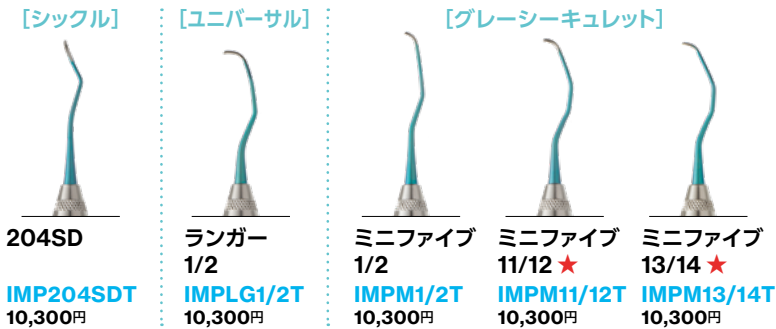

- 視認性の向上: 通常のスケーラーとの違いを一目で識別できるティール色陽極酸化チタンを採用
- シャープな切れ味を実現: 陽極酸化処理後に精巧に研磨し鋭利に仕上げたカッティングエッジ
- シャープニング可能: シャープニングを行うことで、シャープさを復元することが可能 (チタンスケーラーのみに使用するストーンをご準備いただくことを推奨)
- 機能を強化: インプラントの歯石やバイオフィルムの除去などのメインテナンスが可能
- 人間工学的な使いやすさに配慮: 太めでウォーターウェーブ柄のしっかりと把持出来るサテンスチールハンドルを採用




## インプラケアⅡ

チタン製のインプラント体やアパットメントを傷つけずに、プラークを除去できる、ディスポーザブルのレジンスケーラーです。(オートクレーブ滅菌してからご使用ください。)


### [ユニバーサルキュレット]

ブレード相当部の先端が丸みを帯びているので、インプラント周囲の全てのエリアの清掃が行えます。

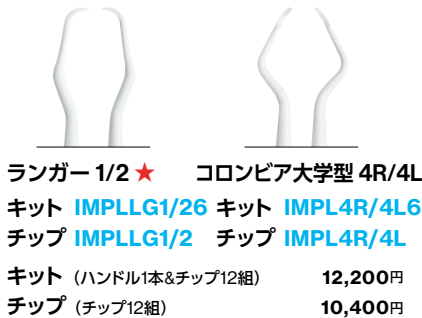


### [シグルスケーラー]

ブレード相当部は先端に向かって細くなっており、歯冠修復部の除石に適用です。

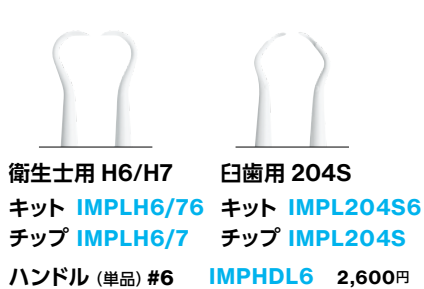

## カラービュープローブ

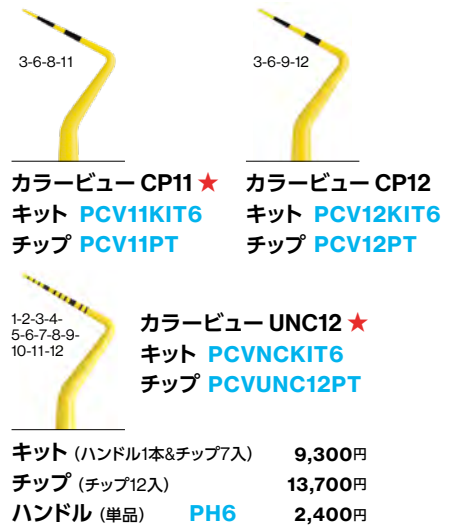

## HDミラー・ロジウムコーティングミラー

両面タイプはチークリトラクターとして使用しながら口腔内を照らすことが可能。ミラートップはダイレクトミラーのため2重3重に見えない。30°のオフセット。(141℃以下でオートクレーブ可)

|                | 片面3<br>φ20mm     | 片面4 ★<br>φ22mm   | 片面5<br>φ24mm     | 両面4 ★<br>φ22mm     | 両面5<br>φ24mm       |
|----------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| HD<br>コーティング   | 1入 MIR3HD 1,600円 | 1入 MIR4HD 1,600円 | 1入 MIR5HD 1,600円 | 1入 MIR4DSHD 1,800円 | 1入 MIR5DSHD 2,200円 |
|                | 3入               | MIR4HD3 4,200円   | MIR5HD3 4,200円   |                    |                    |
|                | 6入               |                  |                  | MIR4DSHD6 10,200円  | MIR5DSHD6 12,600円  |
|                | 12入              | MIR4HD12 16,300円 | MIR5HD12 16,300円 |                    |                    |
| ロジウム<br>コーティング | 3入 MIR4/3 3,000円 | MIR5/3 3,000円    | MIR4DS/3 4,200円  | MIR5DS/3 4,200円    |                    |

### HDミラーとは…

- ロジウムコーティングのミラーより明るさが38.5%向上\*
- 他の表面ミラーより、明るさが50%向上\*
- 傷がつきにくく、長時間使用できる

※社内資料

### コーンソケットハンドル



## エクスプローラー (探針)

特殊配合スチール合金「デュラスポンド」を使用、柔軟性と弾力性、さらに従来品よりも高い触覚感度を発揮し、高精度の診断を実現します。

この形状に曲げても  
折れないほどの弾力性!!




3A 歯肉縁上用  
#6 **EXS3A6** 2,400円  
#7 **EXS3A7** 2,600円




グレーシーキュレット11/12と同型の探針で  
歯肉縁下の歯石探知におすすめ

EXD11/12より第一シャンクが3mm長いので、  
より深いポケットの探知におすすめ

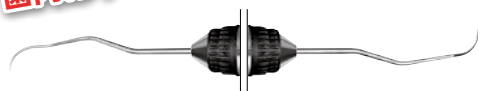


11/12 根面用  
#6 **EXD11/126** 3,300円  
#7 **EXD11/127** 3,500円

特に臼歯部隣接面のポケット内の歯石探査に適しています。  
1本で全顎の探査ができるデザインです。

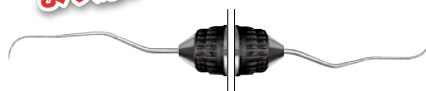

アフターファイブ 11/12 深い根面用  
#6 **EXD11/12A6** 3,300円  
#7 **EXD11/12A7** 3,500円

EXD11/12より第一シャンクが3mm長いので、  
より深いポケットの歯石探査に適しています。

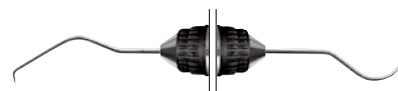

5 歯肉縁上及び縁下用  
#6 **EXD56** 3,300円  
#7 **EXD57** 3,500円

## カラーコードプローブ

繰り返し使用しても、消えにくいマーキング (Qulix™) を採用しています。

圧倒的なマーキングの  
見やすさ!!



ネイバース Q2N  
#6 **PQ2N6** 6,700円  
#7 **PQ2N7** 6,900円  
#31 **PQ2N** 6,500円




基本の3-3-2-3の  
プローブ




CP11  
#6 **PCP116** 4,700円  
#7 **PCP117** 4,800円  
#30 **PCP11** 4,300円



CP12  
#6 **PCP126** 4,700円  
#7 **PCP127** 4,800円  
#30 **PCP12** 4,300円

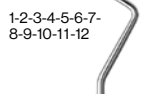

CPUNC12  
#6 **PCPUNC126** 4,700円  
#7 **PCPUNC127** 4,800円  
#30 **PCPUNC12** 4,300円

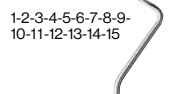

CPUNC15  
#6 **PCPUNC156** 4,700円  
#7 **PCPUNC157** 4,800円  
#30 **PCPUNC15** 4,300円

【ハンドル 略称】 #6…サテンスチール #7…サテンスチールカラー (黒いシリコングリップ付) #30/#31…細丸

## ピンセット



コーク型18JSII ギザなし **DP18JS-II** 3,700円



ピンセット 汎用 **DPU17** 4,400円

## インスツルメントシャープニング

### 電動タイプ

#### サイドキック ★

ハンディサイズのコンパクト・軽量デザインにより、チェアサイドでのシャープニングに対応。

**SDKKIT**  
79,860円



サイドキックの  
使い方を動画で  
**CHECK!!**



### カードタイプ

#### ダイヤモンドシャープニングカード

繰り返し使用しても平らな表面を維持!  
超音波洗浄器で容易に洗浄・高圧蒸気滅菌にも対応!  
クレジットカードサイズのシャープナー!!



超細目  
(EXTRA FINE)  
**DSCXFINE**  
7,400円

細目 ★  
(FINE)  
**DSCFINE**  
7,400円

中目  
(MEDIUM)  
**DSCMED**  
7,400円

### ストーン

#### デュアルストーン ★

極度に鈍化したスケーラーの  
研磨や修正用の粗目の青色面と、  
日常のメンテナンス用の細目の  
白色面をひとつに組み合わせた  
セラミックストーン。

**SSDGRIT**  
5,300円



スケーラーやキュレットの  
ハンドシャープニングの  
方法についてはこちら!





# ヒューフレディ 歯周治療・検査コレクション 注文書

※ 標準価格は全て税抜

| 商品名          |                    | ハンドルの種類<br>標準価格   | ハーモニー<br>#XE2<br>7,000円 | 数量 | エバーエッジ<br>#9E2<br>6,600円 | 数量 | レジン8カラー<br>#C8E2<br>6,300円 | 数量       | サテンスチールカラー<br>#7<br>5,900円 | 数量       | サテンスチール<br>#6<br>5,700円 | 数量       | 角 柄<br>#2<br>5,300円 | 数量 |
|--------------|--------------------|-------------------|-------------------------|----|--------------------------|----|----------------------------|----------|----------------------------|----------|-------------------------|----------|---------------------|----|
| オリジナル        | スタンダード             | 1/2               | SG1/2XE2                |    | SG1/29E2                 |    | SG1/2C8E2                  |          | SG1/27                     |          | SG1/26                  |          | SG1/2               |    |
|              |                    | 3/4               | SG3/4XE2                |    | SG3/49E2                 |    | SG3/4C8E2                  |          | SG3/47                     |          | SG3/46                  |          | SG3/4               |    |
|              |                    | 5/6               | SG5/6XE2                |    | SG5/69E2                 |    | SG5/6C8E2                  |          | SG5/67                     |          | SG5/66                  |          | SG5/6               |    |
|              |                    | 7/8               | SG7/8XE2                |    | SG7/89E2                 |    | SG7/8C8E2                  |          | SG7/87                     |          | SG7/86                  |          | SG7/8               |    |
|              |                    | 9/10              | SG9/10XE2               |    | SG9/109E2                |    | SG9/10C8E2                 |          | SG9/107                    |          | SG9/106                 |          | SG9/10              |    |
|              |                    | 11/12             | SG11/12XE2              |    | SG11/129E2               |    | SG11/12C8E2                |          | SG11/127                   |          | SG11/126                |          | SG11/12             |    |
|              |                    | 13/14             | SG13/14XE2              |    | SG13/149E2               |    | SG13/14C8E2                |          | SG13/147                   |          | SG13/146                |          | SG13/14             |    |
|              |                    | 15/16 (FIT 11/12) | SG15/16XE2              |    | SG15/169E2               |    | SG15/16C8E2                |          | SG15/167                   |          | SG15/166                |          | SG15/16             |    |
|              |                    | 17/18 (FIT 13/14) | SG17/18XE2              |    | SG17/189E2               |    | SG17/18C8E2                |          | SG17/187                   |          | SG17/186                |          | SG17/18             |    |
|              | レジッド               | 1/2               | SG1/2RXE2               |    | SG1/2R9E2                |    | SG1/2RC8E2                 |          | SG1/2R7                    |          | SG1/2R6                 |          | SGR1/2R             |    |
|              |                    | 3/4               | SG3/4RXE2               |    | SG3/4R9E2                |    | SG3/4RC8E2                 |          | SG3/4R7                    |          | SG3/4R6                 |          | SGR3/4R             |    |
|              |                    | 5/6               | SG5/6RXE2               |    | SG5/6R9E2                |    | SG5/6RC8E2                 |          | SG5/6R7                    |          | SG5/6R6                 |          | SGR5/6R             |    |
|              |                    | 7/8               | SG7/8RXE2               |    | SG7/8R9E2                |    | SG7/8RC8E2                 |          | SG7/8R7                    |          | SG7/8R6                 |          | SGR7/8R             |    |
|              |                    | 9/10              | SG9/10RXE2              |    | SG9/10R9E2               |    |                            | SG9/10R7 |                            | SG9/10R6 |                         | SGR9/10R |                     |    |
|              |                    | 11/12             | SG11/12RXE2             |    | SG11/12R9E2              |    | SG11/12RC8E2               |          | SG11/12R7                  |          | SG11/12R6               |          | SGR11/12R           |    |
|              |                    | 13/14             | SG13/14RXE2             |    | SG13/14R9E2              |    | SG13/14RC8E2               |          | SG13/14R7                  |          | SG13/14R6               |          | SGR13/14R           |    |
|              |                    | 15/16 (FIT 11/12) | SG15/16RXE2             |    | SG15/16R9E2              |    | SG15/16RC8E2               |          | SG15/16R7                  |          | SG15/16R6               |          | SGR15/16R           |    |
|              |                    | 17/18 (FIT 13/14) | SG17/18RXE2             |    | SG17/18R9E2              |    | SG17/18RC8E2               |          | SG17/18R7                  |          | SG17/18R6               |          | SGR17/18R           |    |
|              | アフターファイブ           | 1/2               | SRPG1/2XE2              |    | SRPG1/29E2               |    | SRPG1/2C8E2                |          | SRPG1/27                   |          | SRPG1/26                |          | SRPG1/2             |    |
|              |                    | 3/4               | SRPG3/4XE2              |    | SRPG3/49E2               |    | SRPG3/4C8E2                |          | SRPG3/47                   |          | SRPG3/46                |          | SRPG3/4             |    |
|              |                    | 5/6               | SRPG5/6XE2              |    | SRPG5/69E2               |    | SRPG5/6C8E2                |          | SRPG5/67                   |          | SRPG5/66                |          | SRPG5/6             |    |
|              |                    | 7/8               | SRPG7/8XE2              |    | SRPG7/89E2               |    | SRPG7/8C8E2                |          | SRPG7/87                   |          | SRPG7/86                |          | SRPG7/8             |    |
|              |                    | 11/12             | SRPG11/12XE2            |    | SRPG11/129E2             |    | SRPG11/12C8E2              |          | SRPG11/127                 |          | SRPG11/126              |          | SRPG11/12           |    |
|              |                    | 13/14             | SRPG13/14XE2            |    | SRPG13/149E2             |    | SRPG13/14C8E2              |          | SRPG13/147                 |          | SRPG13/146              |          | SRPG13/14           |    |
|              |                    | 15/16 (FIT 11/12) | SRPG15/16XE2            |    | SRPG15/169E2             |    | SRPG15/16C8E2              |          | SRPG15/167                 |          | SRPG15/166              |          | SRPG15/16           |    |
|              | レジッド               | 1/2               | SRP1/2RXE2              |    | SRP1/2R9E2               |    | SRP1/2RC8E2                |          | SRP1/2R7                   |          | SRP1/2R6                |          | SRPG1/2R            |    |
|              |                    | 3/4               | SRP3/4RXE2              |    | SRP3/4R9E2               |    | SRP3/4RC8E2                |          | SRP3/4R7                   |          | SRP3/4R6                |          | SRPG3/4R            |    |
|              |                    | 5/6               | SRP5/6RXE2              |    | SRP5/6R9E2               |    | SRP5/6RC8E2                |          | SRP5/6R7                   |          | SRP5/6R6                |          | SRPG5/6R            |    |
|              |                    | 7/8               | SRP7/8RXE2              |    | SRP7/8R9E2               |    | SRP7/8RC8E2                |          | SRP7/8R7                   |          | SRP7/8R6                |          | SRPG7/8R            |    |
|              |                    | 11/12             | SRP11/12RXE2            |    | SRP11/12R9E2             |    | SRP11/12RC8E2              |          | SRP11/12R7                 |          | SRP11/12R6              |          | SRPG11/12R          |    |
|              |                    | 13/14             | SRP13/14RXE2            |    | SRP13/14R9E2             |    | SRP13/14RC8E2              |          | SRP13/14R7                 |          | SRP13/14R6              |          | SRPG13/14R          |    |
|              |                    | 15/16 (FIT 11/12) | SRP15/16RXE2            |    | SRP15/16R9E2             |    | SRP15/16RC8E2              |          | SRP15/16R7                 |          | SRP15/16R6              |          | SRPG15/16R          |    |
| グレースーキュレット   | スタンダード             | 1/2               | SAS1/2XE2               |    | SAS1/29E2                |    | SAS1/2C8E2                 |          | SAS1/27                    |          | SAS1/26                 |          | SAS1/2              |    |
|              |                    | 3/4               | SAS3/4XE2               |    | SAS3/49E2                |    | SAS3/4C8E2                 |          | SAS3/47                    |          | SAS3/46                 |          | SAS3/4              |    |
|              |                    | 5/6               | SAS5/6XE2               |    | SAS5/69E2                |    | SAS5/6C8E2                 |          | SAS5/67                    |          | SAS5/66                 |          | SAS5/6              |    |
|              |                    | 7/8               | SAS7/8XE2               |    | SAS7/89E2                |    | SAS7/8C8E2                 |          | SAS7/87                    |          | SAS7/86                 |          | SAS7/8              |    |
|              |                    | 11/12             | SAS11/12XE2             |    | SAS11/129E2              |    | SAS11/12C8E2               |          | SAS11/127                  |          | SAS11/126               |          | SAS11/12            |    |
|              |                    | 13/14             | SAS13/14XE2             |    | SAS13/149E2              |    | SAS13/14C8E2               |          | SAS13/147                  |          | SAS13/146               |          | SAS13/14            |    |
|              |                    | 15/16 (FIT 11/12) | SAS15/16XE2             |    | SAS15/169E2              |    | SAS15/16C8E2               |          | SAS15/167                  |          | SAS15/166               |          | SAS15/16            |    |
|              |                    | 17/18 (FIT 13/14) | SAS17/18XE2             |    |                          |    |                            |          |                            |          |                         |          |                     |    |
|              | レジッド               | 1/2               | SAS1/2RXE2              |    | SAS1/2R9E2               |    | SAS1/2RC8E2                |          | SAS1/2R7                   |          | SAS1/2R6                |          | SAS1/2R             |    |
|              |                    | 3/4               | SAS3/4RXE2              |    | SAS3/4R9E2               |    | SAS3/4RC8E2                |          | SAS3/4R7                   |          | SAS3/4R6                |          | SAS3/4R             |    |
|              |                    | 5/6               | SAS5/6RXE2              |    | SAS5/6R9E2               |    | SAS5/6RC8E2                |          | SAS5/6R7                   |          | SAS5/6R6                |          | SAS5/6R             |    |
|              |                    | 7/8               | SAS7/8RXE2              |    | SAS7/8R9E2               |    | SAS7/8RC8E2                |          | SAS7/8R7                   |          | SAS7/8R6                |          | SAS7/8R             |    |
|              |                    | 11/12             | SAS11/12RXE2            |    | SAS11/12R9E2             |    | SAS11/12RC8E2              |          | SAS11/12R7                 |          | SAS11/12R6              |          | SAS11/12R           |    |
|              |                    | 13/14             | SAS13/14RXE2            |    | SAS13/14R9E2             |    | SAS13/14RC8E2              |          | SAS13/14R7                 |          | SAS13/14R6              |          | SAS13/14R           |    |
|              |                    | 15/16 (FIT 11/12) | SAS15/16RXE2            |    | SAS15/16R9E2             |    | SAS15/16RC8E2              |          | SAS15/16R7                 |          | SAS15/16R6              |          | SAS15/16R           |    |
|              | リジッド               | 1/2               | SMS1/2XE2               |    | SMS1/29E2                |    |                            |          |                            |          |                         |          |                     |    |
|              |                    | 7/8               | SMS7/8XE2               |    | SMS7/89E2                |    |                            |          |                            |          |                         |          |                     |    |
|              |                    | 11/12             | SMS11/12XE2             |    | SMS11/129E2              |    |                            |          |                            |          |                         |          |                     |    |
|              |                    | 13/14             | SMS13/14XE2             |    | SMS13/149E2              |    |                            |          |                            |          |                         |          |                     |    |
| シンブルスケーラー    | ネビィ                | 1前歯用              | SCNEVI1XE2              |    | SCNEVI19E2               |    | SCNEVI1C8E2                |          | SCNEVI17                   |          | SCNEVI1                 |          |                     |    |
|              |                    | 2臼歯用              | SCNEVI2XE2              |    | SCNEVI29E2               |    | SCNEVI2C8E2                |          | SCNEVI27                   |          | SCNEVI2                 |          |                     |    |
|              |                    | 3臼歯用              | SCNEVI3XE2              |    | SCNEVI39E2               |    | SCNEVI3C8E2                |          |                            |          |                         |          |                     |    |
|              |                    | 4臼歯用              | SCNEVI4XE2              |    | SCNEVI49E2               |    | SCNEVI4C8E2                |          |                            |          |                         |          |                     |    |
|              | 衛生士用               | H5/33             | SH5/33XE2               |    | SH5/339E2                |    | SH5/33C8E2                 |          | SH5/337                    |          | SH5/336                 |          | SH5/33              |    |
|              |                    | H6/H7             | SH6/7XE2                |    | SH6/79E2                 |    | SH6/7C8E2                  |          | SH6/77                     |          | SH6/76                  |          | SH6/7               |    |
|              | 臼歯用                | 204S              | S204SXE2                |    | S204S9E2                 |    | S204SC8E2                  |          |                            |          |                         |          |                     |    |
|              |                    | 204SD             | S204SDXE2               |    | S204SD9E2                |    | S204SDC8E2                 |          | S204SD7                    |          | S204SD6                 |          | S204SD2             |    |
|              | 前歯用                | モース 0/00          | SM0/00XE2               |    | SM0/009E2                |    | SM0/00C8E2                 |          |                            |          |                         |          |                     |    |
| ユニバーサルキキュレット | マッコール              | 17/18             | SM17/18XE2              |    | SM17/189E2               |    |                            |          |                            |          |                         |          |                     |    |
|              |                    | 1/2               | SL1/2XE2                |    | SL1/29E2                 |    | SL1/2C8E2                  |          |                            |          |                         |          |                     |    |
|              |                    | 3/4               | SL3/4XE2                |    | SL3/49E2                 |    | SL3/4C8E2                  |          |                            |          |                         |          |                     |    |
|              |                    | 5/6               | SL5/6XE2                |    | SL5/69E2                 |    | SL5/6C8E2                  |          |                            |          |                         |          |                     |    |
|              | ランガー               | 17/18             | SL17/18XE2              |    | SL17/189E2               |    | SL17/18C8E2                |          |                            |          |                         |          |                     |    |
|              |                    | 2R/2L             | SC2R/2LXE2              |    |                          |    |                            |          |                            |          |                         |          |                     |    |
|              | コロソピア<br>大学型       | 4R/4L             | SC4R/4LXE2              |    | SC4R/4L9E2               |    | SC4R/4LC8E2                |          |                            |          |                         |          |                     |    |
|              |                    | 13/14             | SC13/14XE2              |    | SC13/149E2               |    | SC13/14C8E2                |          |                            |          |                         |          |                     |    |
|              | ランガー<br>ミニ<br>ファイブ | 1/2               |                         |    | SL1/2MF9E2               |    |                            |          |                            |          |                         |          |                     |    |
|              |                    | 3/4               |                         |    | SL3/4MF9E2               |    |                            |          |                            |          |                         |          |                     |    |
|              |                    | 5/6               |                         |    | SL5/6MF9E2               |    |                            |          |                            |          |                         |          |                     |    |
| バイオシフト       | リジッド               | 1/2               |                         |    | SG1/29LCE2               |    |                            |          |                            |          |                         |          |                     |    |
|              |                    | 7/8               |                         |    | SG7/89LCE2               |    |                            |          |                            |          |                         |          |                     |    |
|              |                    | 11/12             |                         |    | SG11/129LCE2             |    |                            |          |                            |          |                         |          |                     |    |
|              |                    | 13/14             |                         |    | SG13/149LCE2             |    |                            |          |                            |          |                         |          |                     |    |



ヒューフレディ 歯周治療・検査コレクション 注文書

| 商品名                      |                                 | パートコード         | 標準価格(税別)   | 数量      |
|--------------------------|---------------------------------|----------------|------------|---------|
| インプラント<br>スケーラー<br>チタン   | 204SD                           | IMP204SDT      | 10,300円    |         |
|                          | ランガー 1/2                        | IMPLG1/2T      | 10,300円    |         |
|                          | ミニファイブ 1/2                      | IMPM1/2T       | 10,300円    |         |
|                          | ミニファイブ 11/12                    | IMPM11/12T     | 10,300円    |         |
|                          | ミニファイブ 13/14                    | IMPM13/14T     | 10,300円    |         |
| インプラケアII                 | キット<br>ハンドル<br>1本<br>チップ<br>12組 | ランガー 1/2       | IMPLLG1/26 | 12,200円 |
|                          |                                 | コロンビア大学型 4R/4L | IMPL4R/4L6 | 12,200円 |
|                          |                                 | 衛生土用 H6/H7     | IMPLH6/76  | 12,200円 |
|                          |                                 | 臼歯用 204S       | IMPL204S6  | 12,200円 |
|                          | チップ<br>12組                      | ランガー 1/2       | IMPLLG1/2  | 10,400円 |
|                          |                                 | コロンビア大学型 4R/4L | IMPL4R/4L  | 10,400円 |
|                          |                                 | 衛生土用 H6/H7     | IMPLH6/7   | 10,400円 |
|                          |                                 | 臼歯用 204S       | IMPL204S   | 10,400円 |
| カラービュー<br>プローブ           | ハンドル(単品) #6                     |                | IMPHDL6    | 2,600円  |
|                          | キット<br>ハンドル<br>1本<br>チップ<br>7入  | CP11           | PCV11KIT6  | 9,300円  |
|                          |                                 | CP12           | PCV12KIT6  | 9,300円  |
|                          |                                 | UNC12          | PCVNCKIT6  | 9,300円  |
|                          |                                 | CP11           | PCV11PT    | 13,700円 |
|                          | チップ<br>12入                      | CP12           | PCV12PT    | 13,700円 |
|                          |                                 | UNC12          | PCVUNC12PT | 13,700円 |
|                          | ハンドル(単品)                        |                | PH6        | 2,400円  |
| ミラートップ<br>HD<br>コーティング   | 片面<br>1入                        | 3 (φ20mm)      | MIR3HD     | 1,600円  |
|                          |                                 | 4 (φ22mm)      | MIR4HD     | 1,600円  |
|                          |                                 | 5 (φ24mm)      | MIR5HD     | 1,600円  |
|                          | 片面<br>3入                        | 4 (φ22mm)      | MIR4HD3    | 4,200円  |
|                          |                                 | 5 (φ24mm)      | MIR5HD3    | 4,200円  |
|                          |                                 | 4 (φ22mm)      | MIR4HD12   | 16,300円 |
|                          | 片面<br>12入                       | 5 (φ24mm)      | MIR5HD12   | 16,300円 |
|                          |                                 | 4 (φ22mm)      | MIR4DSHD   | 1,800円  |
|                          |                                 | 5 (φ24mm)      | MIR5DSHD   | 2,200円  |
|                          | 両面<br>1入                        | 4 (φ22mm)      | MIR4DSHD6  | 10,200円 |
|                          |                                 | 5 (φ24mm)      | MIR5DSHD6  | 12,600円 |
|                          |                                 | 4 (φ22mm)      | MIR4/3     | 3,000円  |
| ミラートップ<br>ロジウム<br>コーティング | 3入                              | 5 (φ24mm)      | MIR5/3     | 3,000円  |
|                          | 両面<br>3入                        | 4 (φ22mm)      | MIR4DS/3   | 4,200円  |
|                          |                                 | 5 (φ24mm)      | MIR5DS/3   | 4,200円  |
| コーンソケット<br>ハンドル          | #1                              | MH1            | 2,400円     |         |
|                          | #6                              | MH6            | 2,800円     |         |
|                          | #7                              | MH7            | 2,800円     |         |

| 商品名                      |       |                                |          | パートコード     | 標準価格(税別) | 数量 |
|--------------------------|-------|--------------------------------|----------|------------|----------|----|
| エクス<br>プローラー             | 片頭    | 3A                             | #6       | EXS3A6     | 2,400円   |    |
|                          |       |                                | #7       | EXS3A7     | 2,600円   |    |
|                          | 両頭    | 11/12<br>アフター<br>ファイブ<br>11/12 | #6       | EXD11/126  | 3,300円   |    |
|                          |       |                                | #7       | EXD11/127  | 3,500円   |    |
|                          |       |                                | #6       | EXD11/12A6 | 3,300円   |    |
|                          |       |                                | #7       | EXD11/12A7 | 3,500円   |    |
|                          |       |                                | #6       | EXD56      | 3,300円   |    |
| #7                       | EXD57 | 3,500円                         |          |            |          |    |
| カラー<br>コード<br>プローブ       | 両頭    | ネイ<br>バース<br>Q2N               | #6       | PQ2N6      | 6,700円   |    |
|                          |       |                                | #7       | PQ2N7      | 6,900円   |    |
|                          |       |                                | #31      | PQ2N       | 6,500円   |    |
|                          | 片頭    | CP11                           | #6       | PCP116     | 4,700円   |    |
|                          |       |                                | #7       | PCP117     | 4,800円   |    |
|                          |       |                                | #30      | PCP11      | 4,300円   |    |
|                          |       | CP12                           | #6       | PCP126     | 4,700円   |    |
|                          |       |                                | #7       | PCP127     | 4,800円   |    |
|                          |       |                                | #30      | PCP12      | 4,300円   |    |
|                          |       | CPUNC<br>12                    | #6       | PCPUNC126  | 4,700円   |    |
|                          |       |                                | #7       | PCPUNC127  | 4,800円   |    |
|                          |       |                                | #30      | PCPUNC12   | 4,300円   |    |
|                          |       | CPUNC<br>15                    | #6       | PCPUNC156  | 4,700円   |    |
|                          |       |                                | #7       | PCPUNC157  | 4,800円   |    |
|                          |       |                                | #30      | PCPUNC15   | 4,300円   |    |
| ピンセット                    |       | コーク型18JSⅡ                      | DP18JS-Ⅱ | 3,700円     |          |    |
|                          |       | ピンセット 汎用                       | DPUI7    | 4,400円     |          |    |
| サイドキック                   |       |                                |          | SDKKIT     | 79,860円  |    |
| ダイヤモンド<br>シャープニング<br>カード |       | 超細目                            | DSCXFINE | 7,400円     |          |    |
|                          |       | 細目                             | DSCFINE  | 7,400円     |          |    |
|                          |       | 中目                             | DSCMED   | 7,400円     |          |    |
| デュアルストーン                 |       |                                |          | SSDGRIT    | 5,300円   |    |

掲載商品の標準価格は2026年7月21日現在のものです。標準価格には消費税等は含まれておりません。

仕様および外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。記載されている寸法は特定の記載が無い限り作業部の幅および径、または全長を示した公称値になります。ヒューフレディ社製品は職人の手によって最終仕上げを行っているため、若干の誤差が生じることがあります。

販売名: インプラケアII (一般的名称: 歯科用スケーラ) 医療機器届出番号: 13B1X10238G02103  
販売名: インプラントスケーラー (一般的名称: 歯科用スケーラ) 医療機器届出番号: 13B1X10238G02107  
販売名: エクスプローラー (一般的名称: 歯科用探針) 医療機器届出番号: 13B1X10238G05101  
販売名: カラーコードプローブ (一般的名称: 歯周ポケットプローブ) 医療機器届出番号: 13B1X10238G07101  
販売名: カラービュープローブ (一般的名称: 歯周ポケットプローブ) 医療機器届出番号: 13B1X10238G07103  
販売名: グレーシークュレット (一般的名称: 歯周用キュレット) 医療機器届出番号: 13B1X10238G01101  
販売名: スケーラー (一般的名称: 歯科用スケーラ) 医療機器届出番号: 13B1X10238G02101  
販売名: ピンセット (一般的名称: ピンセット) 医療機器届出番号: 13B1X10238G34102  
販売名: ミラー (一般的名称: 歯鏡) 医療機器届出番号: 13B1X10238G22101  
販売名: ユニバーサルキュレット (一般的名称: 歯周用キュレット) 医療機器届出番号: 13B1X10238G01102  
【商標について】 以下はヒューフレディ社またはその関連会社の商標です:  
Hu-Friedy, After Five, Colours, EVEREDGE, Harmony, Immunity Steel, Implacare, Micro Mini Five, Mini Five, Satin Steel, Sidekick, True Fit  
●医療機器の分類: 一般医療機器 (クラスI)

【製品に関するお問い合わせ先】  
**ヒューフレディ・ジャパン合同会社 Hu-Friedy.co.jp**  
〒101-0021 東京都千代田区外神田6-13-10 プロステック秋葉原6F  
Tel 03-4550-0660 【受付時間】 9:00~17:00 (土・日・祝祭日を除く)  
【製造販売元】 株式会社アルファメッド 〒106-0031 東京都港区西麻布3-6-4  
【製造元】 Hu-Friedy Mfg. Co., LLC

ヒューフレディ オフィシャルSNSでは様々な情報を発信しております。

ネビィとサイドキックの  
LINE スタンプ販売中!

|         |         |
|---------|---------|
| ■ 歯科医院名 | 【歯科商店名】 |
| ■ お名前   |         |
| ■ ご住所 〒 | -       |
| TEL     | -       |