

Sidekick™ Sharpener

ハンディシャープナー サイドキック



サイドキック (Sidekick™) とは？

スケーラーやキュレットの定期的なシャープニングに使用します。正しいシャープニングを定期的に行うことで、インスツルメントの寿命が長くなります。

※Sidekick: 口語的表現で、「親友」「仲間」「パートナー」を意味します

● AC電源不要のコードレス仕様

単3電池2個で動きます。

● ハンディサイズのコンパクト・軽量デザインにより、チェアサイドでのシャープニングに対応

持ち運びに便利なハンディサイズで、診察室のわずかなスペースでシャープニングすることができます。また、チェアサイドで即シャープニングすることができるなど場所を選びません。

● 難しい技術を必要としない、簡単なシャープニング


インスツルメントの第一シャンクを第一シャンクガイドに沿わせるだけの簡単操作で、シャープニングが可能です。

● 短時間でシャープニング完了、メンテナンス効率をアップ


わずかな時間でシャープニングが行えるので、日常的な器具のメンテナンスの効率化を図ります。

● オートクレーブ滅菌が可能なパーツを採用

シャープニングストーン、ガイドプレート、ガイドプレートスクリューは取り外すことができ、オートクレーブ滅菌が可能です。

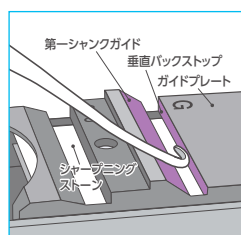

G グレーシーキュレット

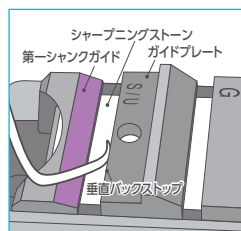

S/U シックルスケラー
ユニバーサルキュレット

サイドキックの使用法

● インスツルメントに合った溝にブレードをあてる:

グレイシーキュレットは (G)、シックルスケラーとユニバーサルキュレットは (S/U) の溝にブレードを置きます。

● 第一シャンクガイドに沿わせる:

インスツルメントの第一シャンクを第一シャンクガイドに沿わせ (これだけで角度が決まります) ブレードの背面を垂直バックストップに当てるようにします。

● スイッチを入れて簡単シャープニング:

シャープニング中はブレードの角度は動かさず、インスツルメントを左右に動かすと、砥石をまんべんなく使用することができ、砥石を長持ちさせられます。

実際の動作は…

使用方法
説明ムービーを
チェック!!!



サイドキック シャープニングキット

SDKKIT 79,860円

【付属品】

セラミックストーン (SDKSTONEC) ×1個、プラスチックテストスティック×1本、拡大レンズ×1個、取扱説明書×1冊

【交換用パーツ】

セラミックストーン※
SDKSTONEC 4,400円


セラミックストーン 粗目※
SDKSTCOARS 4,400円

保持クリップ
SDKCLIP 2,800円

ガイドプレート
SDKGPLATE 5,200円

ガイドプレートスクリュー
SDKGPSCREW 2,800円

※ストーンは裏返して両面使用できます。

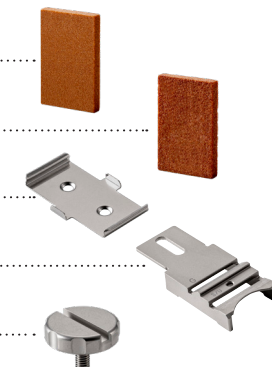

【製造販売元・製品に関するお問い合わせ先】

ヒューフレディ・ジャパン合同会社 **Hu-Friedy.co.jp**

〒101-0021 東京都千代田区外神田6-13-10 プロステック秋葉原6F

Tel 03-4550-0660 【受付時間】9:00~17:00 (土・日・祝祭日を除く)

【製造元】 **Hu-Friedy Mfg. Co., LLC**

掲載商品の標準価格には消費税等は含まれておりません。標準価格は、2026年7月21日現在のものです。
仕様および外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。記載されている寸法は特定の記載が無い限り作業部の幅および径、または全長を示した公称値になります。ヒューフレディ社製品は職人の手によって最終仕上げを行っているため、若干の誤差が生じることがあります。【商標について】以下はヒューフレディ社またはその関連会社の商標です: Hu-Friedy, Sidekick ©2026 Hu-Friedy Japan LLC. All rights reserved.
HF-577J/2607

HuFriedyGroup
The Best In Practice